

UPDATE BESCHREIBUNG

Das Service Pack CEREC SW 4.4.2 aktualisiert bestehende CEREC SW 4.4.1- und CEREC SW 4.4.0-Installationen. Das Service Pack beinhaltet die folgenden Änderungen und Fehlerbehebungen:

ÄNDERUNGEN

- Die Software unterstützt den CEREC SpeedFire Ofen.
- Es ist nun möglich alle Restauration, die gefräst werden können, mit der entsprechenden Hardware auch trocken zu fräsen.
- Sirona CEREC Zirconia ist als Material verfügbar.
- Sirona CEREC Zirconia Meso ist als Material verfügbar.
- Coltene Brilliant Crios ist als Material verfügbar.
- SHOFU Block HC ist als Material verfügbar.
- Bei der Material-Favoriten-Auswahl kann nun auch der Bearbeitungsmodus (Schleifen/Fräsen) gewählt werden.
- Die Erstvorschläge wurden weiter optimiert und verbessert.

FEHLERBEHEBUNGEN

- Grafikfehler in der Schleifvorschau wurden behoben.
- Kommunikationsfehler mit der Schleifeinheit wurden behoben.
- Fehler beim Schleifen von Veneers wurden behoben.
- Fehler bei dem die Kiefer nach der bukkalen Registrierung weit auseinanderstehen wurden behoben.
- Probleme beim Anwenden des Shape-Tools im Randbereich der Restauration wurden behoben.
- Probleme mit verdrehten Einschubachsen wurden behoben.
- Probleme mit Abstürzen wurden behoben.
- Abstürze beim Editieren des Präparationsrandes wurden behoben.
- Fehler beim Ändern von Materialien wurde behoben.
- Meso-Blöcke lassen sich in der Schleifvorschau nicht mehr frei positionieren.
- Speicherverbrauch wurde für eine bessere Systemperformance optimiert, damit wird auch die Zahl der Abstürze auf Grund eines vollen Speichers reduziert.
- Die Modellberechnung wurde beschleunigt.
- Probleme bei direktverschraubten Kronen wurden behoben.
- Probleme bei der Berechnung von Erstvorschlägen bei Brücken wurden behoben.
- Artefakte am Präparationsrand der Restauration wurden reduziert.