

Digitale Abformung mit Primescan: Alltägliche Hygiene, der Sie vertrauen können


Ein zentrales Element bei der Entwicklung von Primescan war es, die gesetzlichen Hygieneanforderungen zu übertreffen und gleichzeitig höchste Scanqualität zu gewährleisten. Mit unseren vielseitigen Hygiene-Optionen können Sie sich jederzeit auf eine optimale Infektionskontrolle verlassen, sowohl mit dem Intraoralscanner als auch mit der Aufnahmeeinheit.

Primescan – der Intraoralscanner für höchste Ansprüche

- Komfortable digitale Abdrücke ohne das Risiko kontaminierter Abdrucklöffel
- Umfassendes Hygienekonzept mit mehreren Hülsen zur Auswahl
- Einziger Intraoralscanner, der eine Vielzahl von Reinigungs- und Desinfektionsoptionen bietet und die gesetzlichen Anforderungen übertrifft
- Vollständig geschlossenes Scanfenster, um das Eindringen von Flüssigkeit während des Scanvorgangs zu verhindern

Die Aufnahmeeinheit – ein Medizinprodukt ohne Kompromisse

- Modernes Hardware-Design mit glatten Oberflächen, die leicht zu reinigen sind
- Touch-Interface gewährleistet im Vergleich zu einer herkömmlichen Tastatur einen höheren Hygienestandard
- Medizinprodukt zur Verwendung in der Patientenumgebung zugelassen

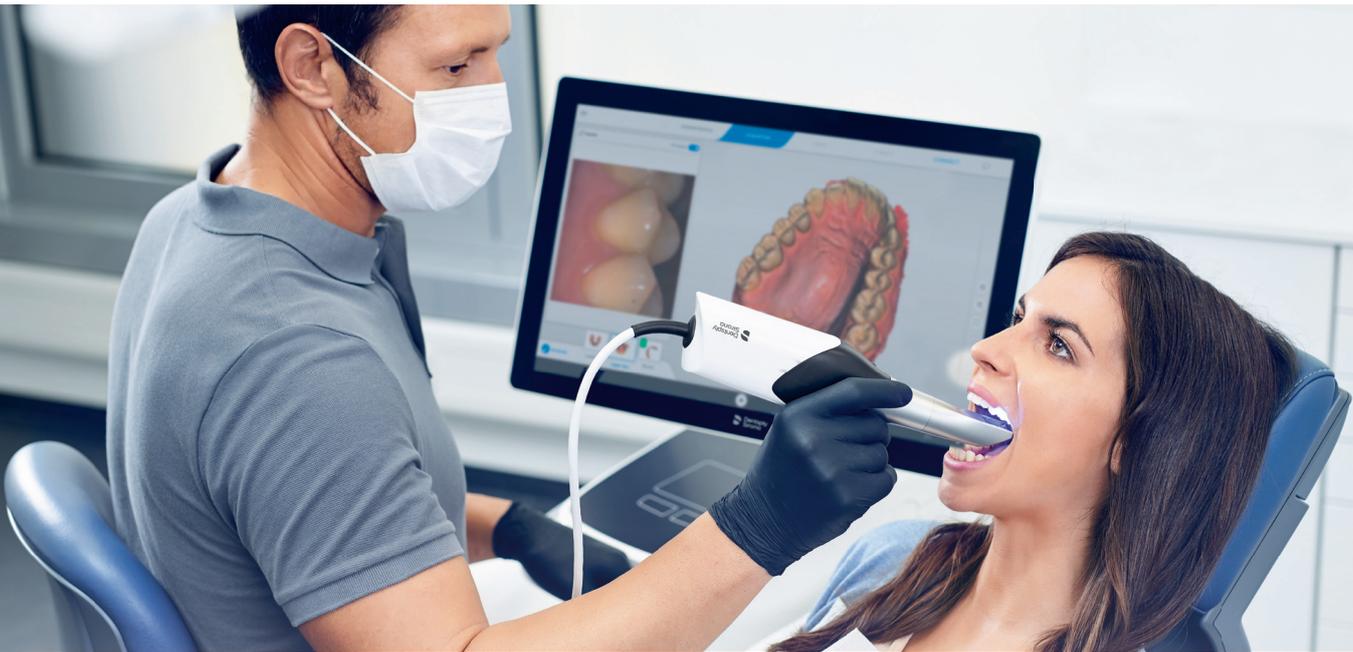

„Aus hygienischer Sicht überzeugt mich persönlich bei Primescan vor allem das geschlossene Scanfenster. Speichel hat überhaupt keine Chance, in Nischen zu gelangen, die schwer zu desinfizieren sind. Außerdem gibt es auch keine zusätzlichen Geräte wie Laptops, die durch Aerosole kontaminiert sind und nie vollständig gereinigt werden können. Das gibt mir und den Patienten ein gutes und sicheres Gefühl.“

Dr. Verena Freier, Deutschland

Die richtige Hülse für Ihre Hygieneanforderungen

Mit drei verschiedenen Hülse-Optionen war es noch nie so einfach und hygienisch, digitale Abdrücke zu nehmen. Alle Hülse gewährleisten ein hervorragendes Scan-Erlebnis und können nach Gebrauch desinfiziert, autoklaviert oder entsorgt werden. Damit hat Primescan sowohl für die Erfüllung Ihrer eigenen Hygienebedürfnisse als auch jeglicher behördlicher Anforderungen, die passende Lösung und gewährleistet ein sicheres intraorales Scannen.



„In der neuen Situation, in der wir alle arbeiten, ist die Sterilisation neben der Reinigung und Desinfektion noch wichtiger als je zuvor. Die Möglichkeit, zwischen einer Vielzahl von Aufbereitungsoptionen wählen zu können, gibt mir und meinem Praxisteam eine hohe Flexibilität und ein Gefühl der Sicherheit, auch für unsere Patienten. Die autoklavierbare Hülse für Primescan wird, sobald sie verfügbar ist, zusätzliche Vorteile und Workflow-Optionen bieten. Ich würde diese Lösung vorbehaltlos empfehlen.“

Dr. Mike Skramstad, USA

Edelstahlhülse mit Saphirglas-Sichtfenster



Hochwertiges Hülse-Konzept: Glatte Stahloberfläche für optimale Wischdesinfektion. Saphirfenster garantiert hochwertige Bilder und eine lange Lebensdauer.

- Die Wischdesinfektion ist die einfachste und kosteneffizienteste Art der Wiederaufbereitung, auch mit Desinfektionsmitteln von Dentsply Sirona möglich
- Bewährte Lösung
- Heißluftsterilisation und High-Level-Desinfektion (HLD) möglich
- Standardhülse, ohne zusätzliche Kosten im Lieferumfang enthalten

Autoklavierbare Hülse



Hochwertige Hülse mit austauschbarem Einwegfenster zum Autoklavieren.

Geplante Markteinführung: Herbst 2020

- Sterilisation durch Autoklavieren, zur Minimierung des Kreuzkontaminationsrisikos
- Häufigster Sterilisationsprozess in Zahnarztpraxen
- Lange Lebensdauer durch Edelstahlmaterial
- Zusätzliche Hülse, kann separat erworben werden

Einweg-Hülse



Einweg-Hülse zur vollständigen Vermeidung von Kreuzkontamination.

- Alternative für höchste Hygieneanforderungen, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Einfach zu bedienen: Wechsel von Stahl- auf Einweg-Hülse, ohne dass der Scanner neu kalibriert werden muss
- Zusätzliche Hülse, kann separat erworben werden