


CEREC SW 5.1.3 Material Pack: CEREC MC XL Premium Package, CEREC MC XL, CEREC MC X

Motoren Set	Links	Rechts	Kombination
Set1 (oder Set2**)	Step Bur 12S	Cylinder Pointed Bur 12S	1
Set1 (oder Set2**)	Step Bur 12	Cylinder Pointed Bur 12S	2
Set1 (oder Set2**)	Step Bur 20	Cylinder Pointed Bur 20	3
Set1	Shaper 25 RZ	Finisher 10	4 ⁽¹⁾ Nassfräsen
Set1	Cylinder Bur 12 EF	Cylinder Pointed Bur 12 EF	5 ⁽²⁾ Extrafein
Set1	Shaper 25	Finisher 10	6 ⁽³⁾ Trockenfräsen

- ⁽¹⁾ Nur mit Schleif-/ Fräseinheiten ab folgenden Seriennummern: inLab MC XL 129001, CEREC MC XL 129001, CEREC MC XL Premium Package 302001, CEREC MC X 231001 oder Austausch des linken Motors bei 2-motorigen Maschinen oder des linken Motors in Motorset 1 bei 4-motorigen Maschinen.
- ⁽²⁾ Nur für 4-motorige Schleif-/ Fräseinheiten
- ⁽³⁾ Setzt CEREC Schleif-/ Fräseinheit mit Trockenfräskonfiguration und CEREC Absaugung voraus.
- ⁽⁴⁾ USA/Japan
- ⁽⁵⁾ Weltweit außer Japan
- ⁽⁶⁾ Japan
- ⁽⁷⁾ Weltweit außer USA

Bezeichnung	Abbildung	REF.
Step Bur 12S	1	62 40 167
Step Bur 12	2	62 60 025
Cylinder Pointed Bur 12S	3	62 40 159
Cylinder Bur 12 EF	4	65 35 186
Cylinder Pointed Bur 12 EF	5	65 35 178
Step Bur 20	6	62 59 597
Cylinder Pointed Bur 20	7	62 59 589
Shaper 25 RZ	8	64 33 440
Finisher 10	9	62 99 387
Shaper 25	10	62 99 395

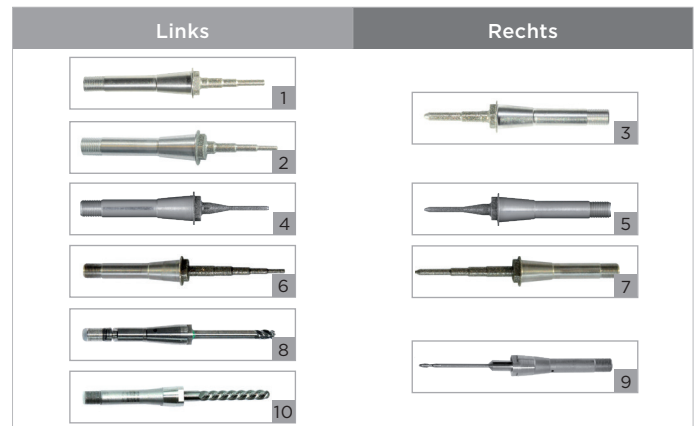

Hersteller	Material	Kombination
Dentsply Sirona	CEREC Tessera	1 2 5
	CELTRA® Duo	1 2 5
	CEREC Blocs C / CEREC Blocs	1 2 5
	CEREC Blocs C PC / CEREC Blocs PC	1 2 5
	CEREC Blocs C In	1 2 5
	CEREC Guide Blocs ⁽⁷⁾ (für CEREC Guide 2 und 3)	4
	CEREC Zirconia	3 4 6
	CEREC Zirconia meso	3 4 6
	CEREC Zirconia+	6
	CEREC MTL Zirconia	6
	inCoris TZI C	3 4 6
	inCoris TZI	3 4 6
	inCoris ZI meso	3 4 6
	3M	Lava™ Ultimate
Paradigm™ MZ 100 ⁽⁴⁾		1 2 5
Chairside Zirconia		6
COLTENE	BRILLIANT Crios	1 2 5
GC	CERASMART™ 270 ⁽⁶⁾	1 2 5
	CERASMART™ 300 ⁽⁶⁾	1 2 5
	CERASMART™ LAYER ⁽⁶⁾	1 2 5
	Initial™ LRF	1 5
	Initial™ LiSi Block ⁽⁷⁾	1 2
MERZ DENTAL	artBloc® Temp	1 4
KURARAY NORITAKE	KATANA™ Zr STML	3 4 6
	KATANA™ Avencia Block	1 2 5

Hersteller	Material	Kombination
SHOFU	BLOCK HC	1 2 5
	BLOCK HC (2L)	1 2 5
	BLOCK HC HARD ⁽⁶⁾	1 2 5
	BLOCK HC SUPERHARD ⁽⁶⁾	1 2 5
	BLOCK ZR LUCENT ⁽⁶⁾	6
VITA	VITABLOCS® MarkII	1 2 5
	VITABLOCS® TriLuxe	1 2 5
	VITABLOCS® TriLuxe forte	1 2 5
	VITABLOCS RealLife®	1 2 5
	VITA ENAMIC®	1 2 5
	VITA ENAMIC® IS	1 5
	VITA ENAMIC® multiColor	1 2 5
	VITA SUPRINITY® PC	1 2 5
	VITA CAD-Temp® monoColor	1 4
VITA CAD-Temp® multiColor	3 4	
IVOCLAR VIVADENT	IPS Empress® CAD	1 2 5
	IPS Empress® CAD Multi	1 2 5
	IPS e.max® CAD	1 2 5
	IPS e.max® ZirCAD LT	3 4 6
	IPS e.max® ZirCAD MT Multi	3 4 6
	IPS e.max® CAD Abutment	1 5
	Telio® CAD	1 4
	Telio® CAD Abutment ⁽⁷⁾	3 4
	Tetric® CAD	1 2 5
	VITA CAD-Temp® IS ⁽⁷⁾	3 4
VITA YZ HT	3 4 6	

Bestell-Nr. 62 38 351, Á.-Nr.: 130475