

## Connect SW 5.1

# UPGRADE BESCHREIBUNG

Die Connect SW 5.1 ist die neue Software Version für Primescan und Omnicam.

### Installation und Anforderungen

- Installierbar auf Primescan AC und Omnicam AC mit der neuen Aufnahmeeinheit und auf CEREC AC mit Omnicam (vorherige Aufnahmeeinheit), die durch Performance Paket geupgradet wurde
- Weitere Informationen rund um das Performance Paket finden Sie auf [my.cerec.com](http://my.cerec.com)
- Connect SW 5.1 ist eine Vollversion, die keine Vorinstallation benötigt
- Vor Installationsstart schließen Sie bitte alle Anwendungen, entpacken den heruntergeladenen Ordner auf Ihrer Aufnahmeeinheit. Um die Installation zu starten, öffnen Sie die .exe und folgen dem Installationssetup.

### Neuigkeiten und Änderungen im Vergleich zur Connect SW 5.0.1

- Neue Auswahlmöglichkeiten zur Bestellung von Alignern, Schienen und individuellen Abformungslöffeln beim Labor oder Zentralfertigungen
- Bessere Stabilität der Software in der Aufnahmephase
- Verbesserte Stabilität während der Modellberechnung
- Integration neuer TiBase\*

Hersteller	TiBase
DS	Ti Base: AstraTech OsseoSpeed TX AT TX 3.0 S; AT TX 3.5/4.0 L; AT TX 4.5/5.0 L
DS	Ti Base: XiVe XiVE 3.0 S; XiVE 3.4 S; XiVE 3.8 S; XiVE 4.5 L; XiVE 5.5 L

\*Abhängig vom Zulassungsdatum des Medizinprodukts sind möglicherweise nicht alle TiBase-Produkte in allen Ländern gleichzeitig verfügbar. Bitte beachten Sie regionale Einschränkungen bezüglich TiBase und Materialien.