

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Dòng sản phẩm T1, T2 và T3 Nhỏ gọn trong tầm tay

dentsplysirona.com




Chỉ cung cấp sản phẩm tốt nhất cho mọi điều trị

Để đạt kết quả tối ưu, cần phải có công cụ phù hợp; dù chỉ với những công cụ trọng lượng nhẹ và dễ thao tác cũng có thể đạt kết quả chính xác. Chúng tôi luôn đáp ứng được yêu cầu này với các dòng sản phẩm tay khoan của mình. Dù bạn chọn dòng tay khoan nào, bạn cũng sẽ có trong tay sản phẩm chất lượng hàng đầu mang đến sự hài lòng trong công việc - mọi khu vực điều trị và bước thao tác.

Bất kể liệu pháp điều trị nào,
Dentsply Sirona cũng sẽ luôn luôn
cung cấp giải pháp phù hợp




Sửa soạn
xoang & mũi

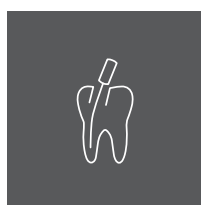

Nội nha



Phòng ngừa

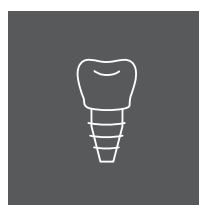

Cấy ghép



Phẫu thuật



Tay khoan thẳng và khuỷu độ dao ở từng phân khúc

Dù bạn thao tác với tay khoan tốc độ cao hoặc tay khoan tốc độ chậm, bạn đều có thể yên tâm về kết quả cao nhất được đảm bảo cho mọi chỉ định.



Mỗi tay khoan thẳng và khuỷu

- Vệ sinh tuyệt đối – các tay khoan có thể tiệt trùng và tẩy trùng nhiệt
- Hệ thống phun sương tối ưu
- Độ ồn thấp đáng kinh ngạc nhờ 4 tia phun sương
- Tầm nhìn tối ưu nhờ kích thước đầu nhỏ
- Vỏ bọc titan trọng lượng nhẹ linh hoạt



Tua-bin - vô cùng mạnh mẽ nhưng rất êm ái

Danh mục tay khoan nhanh của chúng tôi mang đến cho bạn những sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu. Tất cả sản phẩm đều có đặc điểm chung: điều khiển vận hành ở công suất tối đa - và thêm nữa là êm ái hơn bao giờ hết so với trước đây.




Mỗi tay khoan nhanh:

- Lực xoắn cao tối đa đến 26 watt.
- Tầm nhìn tối ưu nhờ nguồn sáng lý tưởng và kích thước đầu nhỏ gọn: giảm thể tích đầu tối đa đến 11%.
- Tính năng ngăn hút ngược kép (hệ thống đầu bảo vệ).
- Vòng bi chất liệu gốm sứ mạnh mẽ.
- Chức năng dừng nhanh: Giảm thời gian dừng quay mũi khoan nhanh tối đa đến 50% nhờ tính năng dừng không trầy xước.
- Âm thanh ổn thấp đáng kinh ngạc do có đến 4 tia phun sương.
- Vệ sinh: Có thể tiệt trùng và tẩy trùng nhiệt.
- Tính năng Dynamic Speed Control (DSC - Kiểm soát tốc độ động lực) giúp vận hành mượt mà hơn ở tốc độ quay thấp hơn.
- Tích hợp phin lọc nước.



Mỗi sản phẩm thể hiện niềm kiêu hãnh về đặc tính chất lượng tuyệt vời

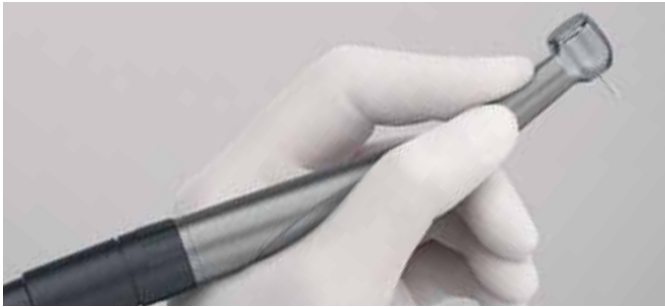

Thiết kế chất liệu titan sử dụng thuận tiện

Chúng tôi sử dụng công nghệ định hình titan siêu dẻo để tạo thành những chiếc tay khoan có trọng lượng nhẹ nhất trong phân khúc.



Phanh cánh quạt

Phanh này đảm bảo tốc độ không tải của tay khoan nhanh được hạn chế mà không làm giảm đáng kể công suất vận hành.



Đảm bảo tuổi thọ vận hành bền bỉ

Tất cả tay khoan Dentsply Sirona đại diện cho tuổi thọ vận hành bền bỉ với thời hạn bảo hành tối thiểu 12 tháng.



Chức năng kiểm soát đặc trưng

Chức năng được đăng ký bản quyền này đảm bảo lực xoắn (torque) đặc biệt và công tác sửa soạn mạnh mẽ liên tục.



Kích thước đầu nhỏ

Kích thước đầu tay khoan Dentsply Sirona nhỏ nhằm đảm bảo thao tác thuận tiện và đạt kết quả chính xác, đồng thời bảo đảm luôn có tầm quan sát tối ưu.



Trung tâm sửa chữa tay khoan

Dịch vụ sửa chữa đáng tin cậy trong vòng 24 đến tối đa 48 giờ - sử dụng phụ kiện chính hãng Dentsply Sirona.



Chất lượng tốt nhất được sản xuất tại Đức.

“Sản xuất tại Đức” – đây là cam kết thương hiệu không ngừng đổi mới của Dentsply Sirona về sứ mệnh làm hài lòng khách hàng ở mức ưu tiên cao nhất. Lời cam kết vẫn đang còn tồn tại. Và tại Đức, hàng ngày chúng tôi đều thổi một luồng sức sống mới lên sản phẩm. Chất lượng tuyệt vời của những sản phẩm tay khoan dựa trên ba giá trị tiêu biểu của người Đức: Kỹ lưỡng, khả năng tin cậy và tinh thần tiên phong.

Dòng tay khoan T1, T2 và T3 - nhu cầu của bạn, lựa chọn của bạn



Độ tin cậy là ưu tiên.

“Tôi chỉ cân nhắc tay khoan có các tính năng hàng đầu và thiết kế tinh xảo tuyệt vời.”

Dòng tay khoan chậm T1 Line -
Linh hoạt để thao tác.

Dòng tay khoan nhanh T1 -
Hoàn hảo vừa khít trong tay.



Chất lượng.

“Tay khoan hiệu năng cao và thao tác linh hoạt là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi ”

**Dòng tay khoan chậm T2 Line/
T2 S-Line -** Giải pháp tiện lợi

Dòng tay khoan nhanh T2 -
Chất lượng bạn có thể tin cậy



Lợi ích từ các sản phẩm được chứng nhận.

“Tôi sẽ chỉ cân nhắc tay khoan mang đến giá trị tốt về đầu tư.”


**Dòng tay khoan chậm T3 Line/
T3 S-Line -** Duy trì hiệu quả chi phí

Dòng tay khoan nhanh T3 -
Khớp nối nhanh/khớp nối cố định



T1 Line – Linh hoạt dễ thao tác

Tay khoan thẳng và khuỷu dòng T1 Line chất lượng cao tuyệt vời nhờ thiết kế công thái học. Tay khoan nằm gọn chắc trong tay nhờ vỏ bọc chất liệu titan. Ưu điểm này đảm bảo bàn tay làm việc không bị mỏi và đạt kết quả chính xác. Bạn sẽ luôn linh hoạt với chuẩn kết nối ISO, dù đang sử dụng loại ghế nha nào.

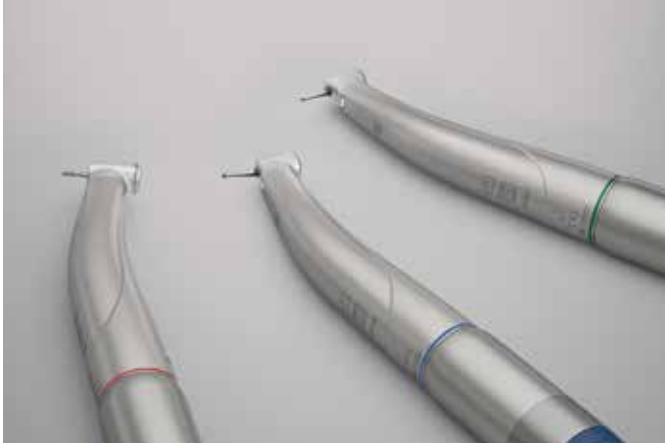

Dòng T1 Line mang đến cho bạn những lợi ích sau:

- 3 năm bảo hành
- Tuổi thọ cao hơn nhờ vòng bi phủ lớp DLC (Diamond like Carbon – Than giống kim cương)
- Ánh sáng tối ưu giúp tầm nhìn tuyệt vời
- Chuẩn kết nối ISO phổ biến
- Khả năng tương thích với khớp nối có đèn nhờ chuẩn kết nối ISO Slider®

Với T1 Line, bạn tận dụng được chuẩn kết nối ISO và tính năng phun sương 4 tia êm ái

Tay khoan nhanh T1 – Hoàn hảo vừa vặn trong tay

Dòng tay khoan nhanh cao cấp vận hành cân bằng lý tưởng trên tay.


Bất kể bạn chọn tay khoan T1 Control, T1 Boost hay T1 mini, tất cả đều có công suất cao, cung cấp độ kiểm soát tối ưu và cực kỳ êm ái khi hoạt động.



Tay khoan nhanh T1 mang đến những ưu điểm sau:

- Vỏ ngoài chất liệu titan trọng lượng nhẹ dễ thao tác
- Vòng bi gốm sứ phủ lớp DLC*
- Chức năng kiểm soát - vận hành êm ái liên tục
- Phù hợp cho tất cả các phiên bản khớp nối nhanh thông dụng (Click & Go)
- Người dùng thay thế phụ kiện rô-to kinh tế

Thiết kế phun sương 4 tia giúp tay nhanh T1 trở thành tay khoan êm ái nhất trong phân khúc

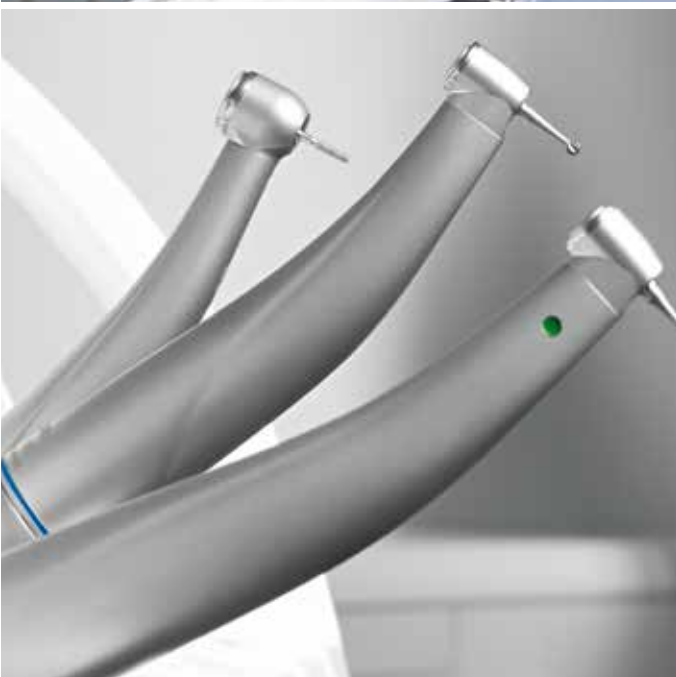

* Tuổi thọ vận hành lâu hơn nhờ vòng bi phủ DLC (diamond-like carbon - than bền vững như kim cương)

T2 Line – Giải pháp tiện lợi

T2 Line là dòng tay khoan thẳng và khuỷu mạnh mẽ trong phân khúc cao cấp. Chất lượng kết hợp với sự chuyên nghiệp của Dentsply Sirona tạo nên dòng sản phẩm hiệu năng và đáng tin cậy đảm bảo tập trung tối đa vào ca điều trị.



Tận dụng nhiều tính năng tiện lợi:

- 2 năm bảo hành
- Ánh sáng tối ưu giúp tầm nhìn tuyệt vời
- Chuẩn kết nối ISO phổ biến
- Khả năng tương thích với khớp nối có đèn nhờ chuẩn kết nối ISO ISO Slider®

T2 S-Line:

- Ngắn hơn đáng kể, cải thiện thao tác làm việc
- Trọng lượng rất nhẹ nhờ kích thước nhỏ gọn
- Kích thước đầu nhỏ nhất, đường kính chỉ 8.7 mm

Tay khoan nhanh T2 – Chất lượng bạn có thể tin cậy

Bạn có thể tin cậy vào dòng tay khoan nhanh T2 của chúng tôi trong mọi trường hợp. Hiệu năng cao không đổi, hình dạng công thái học cùng với bề mặt giúp cầm nắm chắc chắn, những tay khoan nhanh này có chất liệu thép không gỉ đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bạn.



Mức độ ổn thấp: Tay khoan nhanh 2 với 4 tia phun sương

Tay khoan nhanh T2 mang đến những lợi ích sau:

- Độ bền chắc cao do vỏ bọc được làm từ chất liệu thép không gỉ và bề mặt giúp cầm nắm chắc chắn.
- Vòng bi gốm sứ bền chắc.
- Tính năng Dynamic Speed Control (DSC) giúp vận hành mượt mà và ít gây xước hơn.
- Phù hợp với mọi kiểu khớp nối nhanh thông thường (Click & Go).
- Người dùng thay thế phụ kiện rô-to kinh tế.



T3 Line – Duy trì hiệu quả chi phí

Dòng tay khoan thẳng và khuỷu T3 với vỏ bọc chất liệu titan cực kỳ bền chắc hoạt động ổn định và là một sự đầu tư sẽ mang đến mức độ hài lòng trong nhiều năm.



T3 Line cũng có:

- Chuẩn kết nối ISO phổ biến



T3 S-Line

- Ngắn hơn đáng kể, cải thiện thao tác làm việc
- Trọng lượng rất nhẹ nhờ kích thước nhỏ gọn
- Kích thước đầu nhỏ nhất, đường kính chỉ 8.7 mm

Tay khoan nhanh T3 – Khớp nối nhanh

Tay khoan nhanh T3 có chất liệu thép không gỉ, dễ vệ sinh và cầm nắm chắc chắn. Công suất tối đa lên đến 26 watt và vòng bi gốm sứ đảm bảo làm việc hiệu quả trong thời gian vận hành lâu. Nói cách khác là: hiệu quả bền lâu.

T3 mini: Với tùy chọn đầu mini siêu nhỏ, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận vùng răng cối cũng như quan sát tối ưu khu vực sửa soạn. T3 mini có kích thước đầu ấn tượng (cao: 12.7 mm, đường kính: 9.7 mm) so với tỉ lệ lực xoắn.

T3 Boost: T3 Boost mạnh mẽ! Tay khoan nhanh thép không gỉ cung cấp chất lượng vượt trội nhờ dễ sử dụng và cung cấp công suất cần thiết đáp ứng mọi yêu cầu.



Tay khoan nhanh T3 còn có:

- Hệ thống kẹp ít rung
- Tích hợp phin lọc

Tay khoan nhanh T3 – Khớp nối cố định

Chất liệu ổn định lâu dài đảm bảo cho tay khoan nhanh T3 kiểu khớp nối cố định sẽ duy trì ổn định trong nhiều năm. Tay khoan nhanh với 4 tia phun sương đặc biệt êm ái và vỏ bọc chất lượng cao giúp dễ dàng vệ sinh.

T3 mini: Với tùy chọn đầu mini siêu nhỏ, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận vùng răng cối cũng như quan sát tối ưu khu vực sửa soạn. T3 mini có kích thước đầu ấn tượng (cao: 12.7 mm, đường kính: 10.2 mm) so với tỉ lệ lực xoắn.

T3 Racer: Tối đa lên đến 30 watt, T3 Racer hiện là tay khoan nhanh kiểu khớp nối cố định mạnh mẽ nhất. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm việc thậm chí còn nhanh hơn và hiệu quả hơn.



Tay khoan nhanh T3 (khớp nối cố định) còn có:

- Lựa chọn giữa kiểu midwest 4 lỗ và Borden 2/3 lỗ
- Hệ thống kẹp ít rung
- Hệ thống kẹp rung chậm



Tay khoan khuỷu phù hợp cho mọi tác vụ

Dòng cao cấp còn có bộ tay khoan khuỷu đặc biệt toàn diện từ Dentsply Sirona. Đảm bảo giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp cho mọi tác vụ.



Tay khoan Prophy dùng cho phòng ngừa

Tay khoan khuỷu Prophy cho phép đánh bóng răng và bề mặt vật liệu bằng chổi và nắp chụp.



EVA 04 L/11 L để sửa soạn phạm vi nhỏ

Nhờ độ linh hoạt điều chỉnh trầm, tay khoan khuỷu EVA đặc biệt phù hợp để đánh bóng, loại bỏ lượng dư thừa composite và mài mịn bề mặt chân răng.



Endo L dùng cho nội nha

Sửa soạn ống chân răng 2 trong 1 chỉ với một tay khoan khuỷu cho phép sử dụng hiệu quả trầm tay cũng như trầm máy bằng thép.





Endo 6 L dùng cho nội nha/đo chóp

Kết hợp với ApexLocator, tay khoan Endo 6 L cho phép định vị chóp mà không cần dùng kẹp trâm. Kích thước đầu cực nhỏ đảm bảo giúp nha sỹ quan sát ống chân răng tốt nhất có thể.



KM 1.6 L dùng cho phẫu thuật

Áp dụng nguyên lý Kirschner/Meyer là chất lỏng/chất làm mát làm sạch được phun xả trực tiếp vào khu vực mài tại đầu mũi khoan cho phép sửa soạn không gây chấn thương và hỗ trợ tối ưu quá trình can thiệp phẫu thuật.



Tay khoan Codens cô đặc chất trám amalgam

Chất trám Amalgam có thể được cô đặc dễ dàng bằng tay khoan chậm Codens kết hợp với mũi DENTATUS AVA.



Tổng quan về dữ liệu kỹ thuật

T1 Line

Loại		Tỷ lệ bánh răng	Tốc độ	Đường kính đầu (mm)	Chiều cao đầu (mm)	Đặc tính	Chỉ định	Mã hàng	
T1 Line C 200 L			1:5	Tối đa khoảng 200,000	Khoảng 8.7	Khoảng 14.6	Đ. kính 1.6 FG	Sửa soạn xoang và mão	33 28 452
T1 Line C 40 L			1:1	Tối đa khoảng 40,000	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Đánh bóng	33 28 437
T1 Line C 6 L			6:1	Tối đa khoảng 6,000	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Lấy tủy	33 28 429
T1 Line C 1,6 L			24:1	Tối đa khoảng 1,600	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Lấy tủy	33 28 411
T1 Line H 40 L			1:1	Tối đa khoảng 40,000	-	-	Đ. kính 2.35 HB/WB	Sửa soạn	60 31 277

Tay khoan khuỷu, đỏ 1:5 có 4 tia phun sương, tay khoan khuỷu, xanh dương 1:1 và xanh lá 6:1 hoặc 24:1 có 1 tia phun sương, tay khoan, xanh dương 1:1 có 1 tia phun sương.

Tay khoan nhanh T1

Loại		Công suất (W)	Đường kính đầu (mm)	Chiều cao đầu (mm)	Trọng lượng (g)	Tốc độ không tải (rpm)	Chỉ định
T1 Control		Tối đa đến 22	Khoảng 12.4	Khoảng 13.8	Khoảng 56	Khoảng 250,000	Sửa soạn xoang
T1 Boost		Tối đa đến 26	Khoảng 11.9	Khoảng 13.0	Khoảng 55	Khoảng 370,000	Sửa soạn xoang
T1 mini		Tối đa đến 21	Khoảng 10.2	Khoảng 12.7	Khoảng 54	Khoảng 400,000	Sửa soạn xoang

Loại/Mã hàng	Khớp nối Dentsply Sirona	Khớp nối Kavo	Khớp nối W&H	Khớp nối NSK connection
T1 Control	63 86 598	63 86 754	63 86 770	63 86 812
T1 Boost	63 86 606	63 86 911	63 86 929	63 86 937
T1 mini	63 86 630	63 86 994	63 87 000	63 87 018

Khớp nối nhanh Dentsply Sirona/Mã hàng	R, có dòng hồi hơi	R (LED), có dòng hồi hơi	F, không có dòng hồi hơi
Khớp nối chuẩn 4 lỗ có đèn, kiểm soát phun sương và ngăn hút ngược	18 94 588	63 19 706	41 74 467

Tay khoan khuỷu đặc biệt

Loại	Tỷ lệ bánh răng	Tốc độ/chu kỳ	Đặc tính	T1 Classic Mã hàng	T1 Line Mã hàng	Chỉ định
Prophy	2.4:1	Tối đa khoảng 5,000	Khớp gắn & khớp vận	58 99 278	18 94 901	Phòng ngừa
EVA 04 L	-	Hành trình 0.4 mm	-	58 99 237	33 29 260	Đánh bóng
EVA 11 L	-	Hành trình 1.1 mm	-	58 99 245	41 77 015	Nội nha
Endo L	-	Góc chuyển động ± 30°	Đ kính trục 3.6-4.0/ Đ. kính chuyển đổi 2.35	58 99 260	58 69 552	Nội nha
Endo 6 L	6:1	Tối đa khoảng 6,000	Đ. kính 2.35 WB	-	65 27 191	Nội nha
KM 1.6 L	2.4:1	Tối đa khoảng 1,600	Đ. kính 2.35 WB	58 99 252	-	Phẫu thuật
Condens	-	Tối đa khoảng 12,000	-	-	18 94 737	Cô đặc Amalgam

Tổng quan về dữ liệu kỹ thuật

T2 Line

Loại		Tỷ lệ bánh răng	Tốc độ	Đường kính đầu (mm)	Chiều cao đầu (mm)	Đặc tính	Chỉ định	Mã hàng
T2 Line A 200 L	 	1:5	Tối đa khoảng 200,000	Khoảng 8.7	Khoảng 14.6	Đ. kính 1.6 FG	Sửa soạn xoang và mào	63 76 177
T2 Line A 40 L	 	1:1	Tối đa khoảng 40,000	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Hoàn tất	63 76 185
T2 Line A 6 L	 	6:1	Tối đa khoảng 6,000	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Lấy tùy	63 76 193
T2 Line AH 40 L	 	1:1	Tối đa khoảng 40,000	-	-	Đ. kính 2.35 HB/WB	Sửa soạn	63 76 201

Tay khoan khuỷu, đỏ 1:5 có 4 tia phun sương, tay khoan khuỷu, xanh dương 1:1 và xanh lá 6:1 có 1 tia phun sương, tay khoan, xanh dương 1:1 có 1 tia phun sương.

T2 S-Line

Loại		Tỷ lệ bánh răng	Tốc độ	Đường kính đầu (mm)	Chiều cao đầu (mm)	Đặc tính	Chỉ định	Mã hàng
T2 S-Line AS 200 L	 	1:5	Tối đa khoảng 200,000	Khoảng 8.7	Khoảng 14.6	Đ. kính 1.6 FG	Sửa soạn xoang và mào	65 76 065
T2 S-Line AS 40 L	 	1:1	Tối đa khoảng 40,000	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Hoàn tất	65 76 073
T2 S-Line AS 6 L	 	6:1	Tối đa khoảng 6,000	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Lấy tùy	65 76 081

Tay khoan khuỷu, đỏ 1:5 có 4 tia phun sương, tay khoan khuỷu, xanh dương 1:1 và xanh lá 6:1 có 1 tia phun sương.

Tay khoan nhanh T2

Loại		Công suất (W)	Đường kính đầu (mm)	Chiều cao đầu (mm)	Trọng lượng (g)	Tốc độ không tải (rpm)	Chỉ định
T2 Control		Tối đa đến 22	Khoảng 12.4	Khoảng 13.8	Khoảng 57	Khoảng 250,000	Sửa soạn xoang
T2 Boost		Tối đa đến 23	Khoảng 11.9	Khoảng 13.0	Khoảng 56	Khoảng 370,000	Sửa soạn xoang
T2 mini		Tối đa đến	Khoảng 10.2	Khoảng 12.7	Khoảng 55	Khoảng 400,000	Sửa soạn xoang

Loại/Mã hàng	Khớp nối Dentsply Sirona	Khớp nối Kavo	Khớp nối W&H	Khớp nối NSK connection
T2 Control	63 86 648	63 87 737	63 87 802	63 87 760
T2 Boost	63 86 655	63 87 778	63 87 786	63 87 794
T2 mini	63 86 663	63 87 802	63 87 810	63 87 828

Khớp nối nhanh Dentsply Sirona/Mã hàng	R, có dòng hồi hơi	R (LED), có dòng hồi hơi	F, không có dòng hồi hơi
Khớp nối chuẩn 4 lỗ có đèn, kiểm soát phun sương và ngăn hút ngược	18 94 588	63 19 706	41 74 467

T3 Line

Loại		Tỷ lệ bánh răng	Tốc độ	Đường kính đầu (mm)	Chiều cao đầu (mm)	Đặc tính	Chỉ định	Mã hàng
T3 Line E 200		1:5	Tối đa khoảng 200,000	Khoảng 8.7	Khoảng 14.6	Đ. kính 1.6 FG	Sửa soạn xoang và mào	63 92 679
T3 Line E 40		1:1	Tối đa khoảng 40,000	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Hoàn tất	63 92 687
T3 Line E 6		6:1	Tối đa khoảng 6,000	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Lấy tủy	63 92 695
T3 Line EH 40		1:1	Tối đa khoảng 40,000	-	-	Đ. kính 2.35 HB/WB	Sửa soạn	63 92 711

T3 Line: Tay khoan khuỷu, đỏ 1:5 có 4 tia phun sương, tay khoan khuỷu, xanh dương 1:1 và xanh lá 6:1 có 1 tia phun sương.

T3 S-Line

Loại		Tỷ lệ bánh răng	Tốc độ	Đường kính đầu (mm)	Chiều cao đầu (mm)	Đặc tính	Chỉ định	Mã hàng
T3 S-Line ES 200		1:5	Tối đa khoảng 200,000	Khoảng 8.7	Khoảng 14.6	Đ. kính 1.6 FG	Sửa soạn xoang và mào	65 76 123
T3 S-Line ES 40		1:1	Tối đa khoảng 40,000	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Hoàn tất	65 76 131
T3 S-Line ES 6		6:1	Tối đa khoảng 6,000	Khoảng 8.7	Khoảng 12.4	Đ. kính 2.35 WB	Lấy tủy	65 76 149

T3 S-Line: Tay khoan khuỷu, đỏ 1:5 có 4 tia phun sương, tay khoan khuỷu, xanh dương 1:1 và xanh lá 6:1 có 1 tia phun sương

Tay khoan nhanh T3 – Khớp nối nhanh

Loại	Công suất (W)	Đường kính đầu (mm)	Chiều cao đầu (mm)	Trọng lượng (g)	Tốc độ không tải (rpm)	Tia phun sương	Đặc tính (mm)	Chỉ định
T3 Boost	Tối đa đến 23	Khoảng 11.9	Khoảng 13.0	Khoảng 56	Khoảng 370,000	4	1.6 FG	Sửa soạn xoang
T3 mini	Tối đa đến 20	Khoảng 10.2	Khoảng 12.7	Khoảng 55	Khoảng 400,000	4	1.6 FG	Sửa soạn xoang

Loại/Mã hàng	Khớp nối Dentsply Sirona	Khớp nối Kavo	Khớp nối W&H	Khớp nối NSK
T3 Boost	63 87 919	63 87 927	63 87 935	63 87 943
T3 mini	63 87 950	63 87 968	63 87 976	63 87 984

Khớp nối nhanh Dentsply Sirona /Mã hàng	F, không có dòng hồi hơi
Khớp nối chuẩn 4 lỗ có đèn, kiểm soát phun sương và ngăn hút ngược	41 74 467

Tay khoan nhanh T3 – Khớp nối cố định

Loại	Công suất (W)	Đường kính đầu (mm)	Chiều cao đầu (mm)	Trọng lượng (g)	Tốc độ không tải (rpm)	Tia phun sương	Đặc tính (mm)	Chỉ định	Mã hàng
T3 Racer Midwest	Tối đa đến 30	Khoảng 11.9	Khoảng 13.0	Khoảng 46	Khoảng 400,000	4	1.6 FG	Sửa soạn xoang	64 60 385
T3 Racer Borden	Tối đa đến 30	Khoảng 11.9	Khoảng 13.0	Khoảng 46	Khoảng 400,000	4	1.6 FG	Sửa soạn xoang	64 60 427
T3 mini Midwest	Tối đa đến 24	Khoảng 10.2	Khoảng 12.7	Khoảng 47	Khoảng 410,000	4	1.6 FG	Sửa soạn xoang	66 01 731
T3 mini Borden	Tối đa đến 24	Khoảng 10.2	Khoảng 12.7	Khoảng 47	Khoảng 410,000	4	1.6 FG	Sửa soạn xoang	66 01 756



Bạn muốn loại bỏ rủi ro về vệ sinh? Hãy nghĩ đến DAC Universal

Tuân theo tiêu chuẩn vệ sinh chỉ với thao tác bấm nút và tránh lây nhiễm chéo: Đảm bảo vệ sinh an toàn với DAC Universal. Bệnh nhân lẫn nhân viên phòng khám đều có thể tin cậy vào thiết bị bảo vệ đa năng này, đồng thời trao trọn niềm tin vào ca điều trị khi sử dụng các dụng cụ đã được xử lý, tẩy trùng hoặc tiệt khuẩn

Chắc chắn về pháp lý

Sử dụng DAC Universal, bạn hoàn toàn đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu từ khuyến cáo "Yêu cầu về vệ sinh trong việc tái xử lý thiết bị y tế" của Học viện Robert Koch (RKI 2012).

Tương thích với các tiêu chuẩn

Quy trình tiệt khuẩn của DAC Universal đạt yêu cầu của tiêu chuẩn Châu Âu DIN EN 13060 dành cho thiết bị tiệt khuẩn dùng hơi cỡ nhỏ. Quy trình rửa và tẩy trùng được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế DIN EN ISO 15883 dành cho thiết bị tẩy rửa.

DAC Universal – Tổng quan về kỹ thuật:

Loại	Đặc tính	Nguồn điện vào	Chất lượng nước	Chiều rộng/sâu/cao, mở	Chiều rộng/sâu/cao, mở
DAC Universal	DAC Universal, giá giữ tay khoan, gồm 6 đầu kết nối chuyển đổi theo từng nhu cầu	1.1 kW	Nước không chứa khoáng hoặc nước cứng thấp (< 3QS)	37 cm/38 cm/53 cm	5 đến 8 bar

Công ty TNHH Dentsply Sirona Việt Nam

Lầu 20A, Vincom Center Đồng Khởi,
72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng,
P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
+84 28 3622 0080

Các điều trị lâm sàng

Nha khoa phòng ngừa
Nha khoa phục hồi
Chỉnh nha
Nội nha
Implant
Phục hình

Các công nghệ hệ thống

CAD/CAM
Hệ thống hình ảnh
Trung tâm điều trị
Dụng cụ