


Une liste actualisée en permanence des produits d'entretien, de nettoyage et de désinfection agréés peut être consultée sous la REF 5970905 depuis la page d'accueil Dentsply Sirona sur Internet à l'adresse suivante : [www.dentsplysirona.com/manuals](http://www.dentsplysirona.com/manuals)

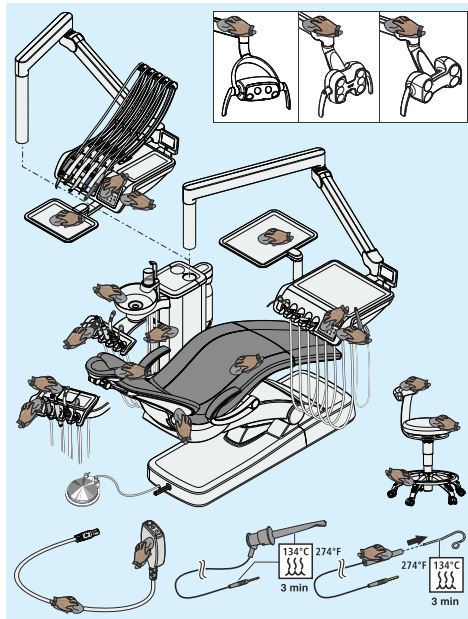


### Après chaque patient

#### Nettoyer/désinfecter les surfaces

ATTENTION ! Utiliser exclusivement des produits de nettoyage, d'entretien et de désinfection agréés par Dentsply Sirona !

- Désinfecter les surfaces et les selleries
- Désinfecter les panneaux de commande
- Entretien, désinfecter/stériliser les instruments (voir les notices d'utilisation des instruments)
- Nettoyer, désinfecter/stériliser les composants d'ApexLocator
- Désinfecter le porte-instruments
- Désinfecter les poignées
- Désinfecter le tray
- Désinfecter les raccords de nettoyage des cordons d'aspiration
- Entretien et nettoyer le scalytique (voir la notice d'utilisation du LEDlight, LEDlight Plus ou LEDview Plus)

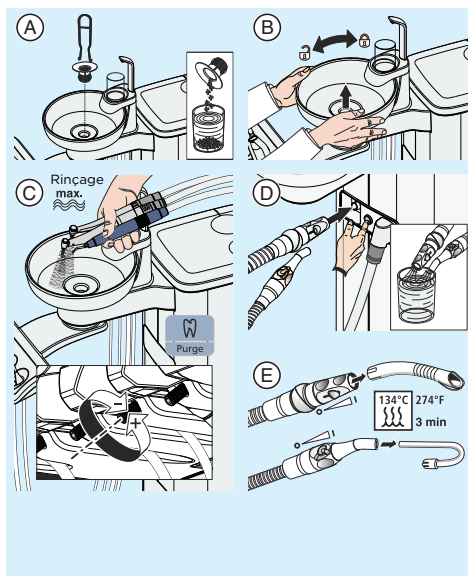


#### Nettoyer/désinfecter les circuits d'eau et le système d'aspiration

ATTENTION ! Utiliser exclusivement des produits de nettoyage, d'entretien et de désinfection agréés par Dentsply Sirona !

- A) Nettoyer le collecteur d'or
- ATTENTION ! Éliminer les restes d'amalgame dans le respect de l'environnement !
- B) Nettoyer/désinfecter (nettoyant spécial) le crachoir (amovible)
- C) Rincer les conduits d'eau des instruments utilisés en utilisant la fonction Purge, ou manuellement.
- D) Effectuer le nettoyage des cordons d'aspiration

REMARQUE : En l'absence de cordons d'aspiration, aspirer le contenu d'un verre d'eau froide.  
E) Stériliser les pièces-à-main d'aspiration  
Pour éviter le reflux, utiliser la canule d'aspiration avec arrivées d'air auxiliaires.

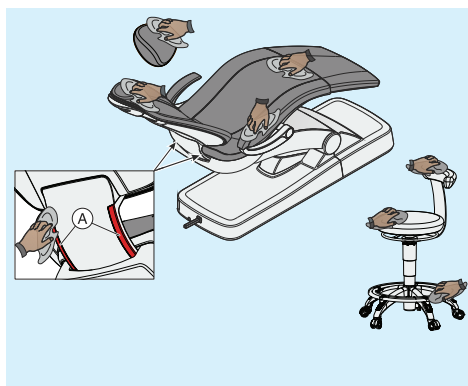

### Une fois par semaine

#### Entretien et nettoyer les selleries

ATTENTION ! Utiliser uniquement des produits de nettoyage et d'entretien pour selleries agréés par Dentsply Sirona !



Observer minutieusement les instructions d'utilisation du produit de nettoyage et d'entretien.

Eviter tout contact entre le produit FD360 et des surfaces chromées.

Nettoyer la partie inférieure de la surface de déplacement de la barre-support (A) du dossier

#### Nettoyer la pédale

Nettoyez la face inférieure de la pédale avec un chiffon humide (eau).

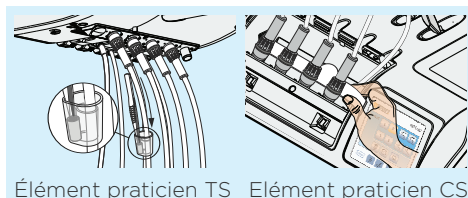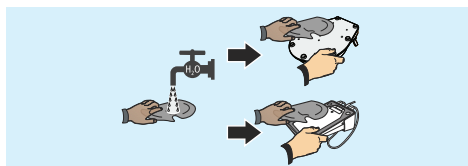


Élément praticien TS Élément praticien CS

#### Élément praticien TS

Changer le rouleau de coton sur le cordon de turbine


#### Élément praticien CS

Remplacer le collecteur d'huile

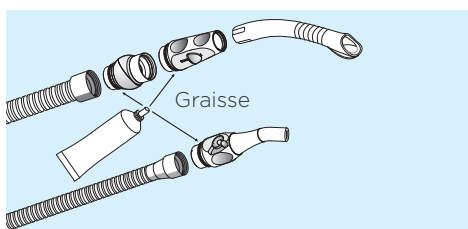

#### Graisser les pièces-à-main d'aspiration

Séparer les pièces à main d'aspiration et graisser les joints toriques après la thermo-désinfection ou la stérilisation, ainsi que toutes les semaines.

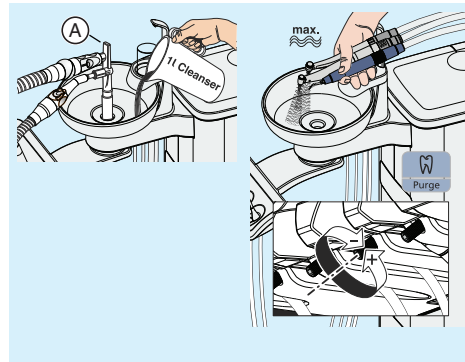

### Chaque jour


désinfecter les cordons d'aspiration à l'aide de l'adaptateur de nettoyage (A)

- chaque jour à midi et
- à la fin de la journée de travail.

#### Rinçage des conduits d'eau

Rincer le système de remplissage du verre, les seringues à 3 voies et les conduits d'eau des instruments à l'aide de la fonction Purge ou manuellement.


- Chaque jour avant le début du travail
- après la journée de travail

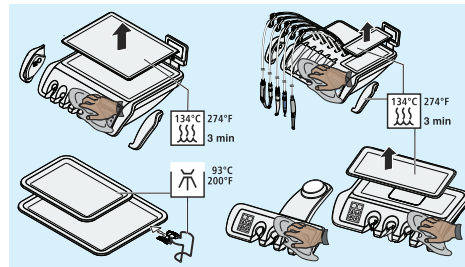

Stériliser les tapis en silicone / les housses des poignées

Thermodésinfection du tray et du porte-verre

Désinfecter l'élément praticien et l'élément assistante

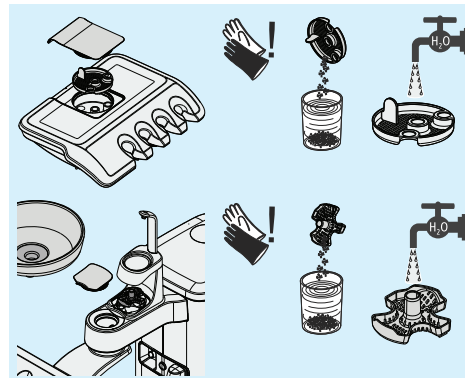


#### Vider la crépine d'aspiration centrale

Porter des gants de protection pour vider la crépine d'aspiration centrale !

Collecter les résidus d'amalgame dans un récipient fermé contenant de l'eau.

ATTENTION ! Éliminer les restes d'amalgame dans le respect de l'environnement.

Nettoyer la crépine d'aspiration sous l'eau courante.

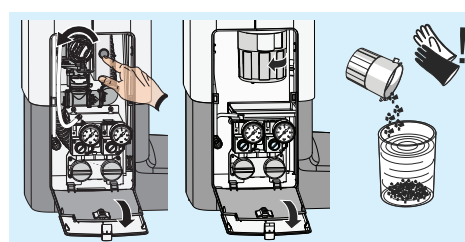

### Tous les mois ou en fonction des besoins

Nettoyer l'élément filtrant de l'aspiration humide

Dans le sous-dialogue Démarrer, appuyer sur la touche "Aspirer l'eau résiduelle" avant de retirer le filtre pour le nettoyer.

Vider le réservoir collecteur de la pompe à injection d'air


Remplacer les filtres (C) pour l'eau (A) et l'air (B)

Vider le bac à sédimentation (D) (option)

Porter des gants de protection pour vider le bac à sédimentation !


#### Contrôle microbiologique de l'eau

- A intervalles réguliers en fonction des résultats et
- après des périodes d'arrêt > 1 semaine.

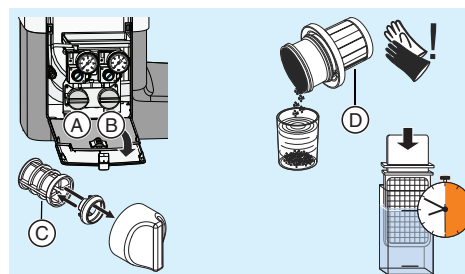

#### Assainissement du poste de traitement


1. Régler le débit d'eau maximal sur les instruments
2. Poser un gobelet sous le bec de remplissage du verre
3. Commuter sur la bouteille d'eau fraîche
4. Produits de désinfection des circuits d'eau
5. Démarrer l'assainissement
6. Remplir les conduits d'eau avec le produit de désinfection
7. Laisser agir pendant 24 heures
8. Rincer les conduits d'eau à l'eau
9. Effectuer le nettoyage des cordons d'aspiration

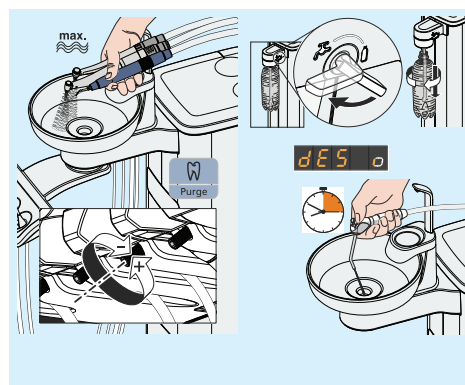

#### Remplacer le rotor d'amalgame

ATTENTION ! Le rotor doit être systématiquement remplacé au bout de 12 mois au maximum !

1. „Amalg“ s'affiche sur l'interface utilisateur. Procéder à la désinfection
2. Uniquement lorsque l'unité est en service : retirer le rotor d'amalgame.
3. Verser les résidus d'amalgame collectés, fermer le rotor d'amalgame.
4. Retirer le rotor d'amalgame de la partie inférieure et l'éliminer dans le respect de l'environnement.

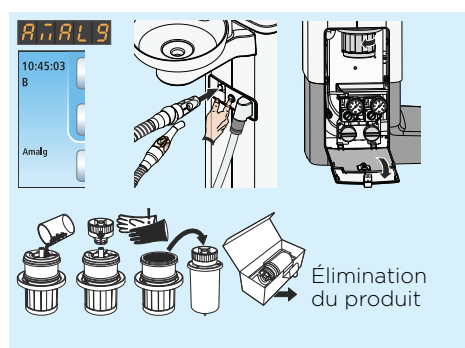


Pour plus de détails, se reporter à la notice d'utilisation.

En matière d'hygiène et de désinfection, observer les exigences et recommandations nationales (p. ex. RKI, ADA, CDC etc.).

# Intego Pro

## Planning d'entretien et de nettoyage du poste de traitement

Une liste actualisée en permanence des produits d'entretien, de nettoyage et de désinfection agréés peut être consultée sous la REF 5970905 depuis la page d'accueil Dentsply Sirona sur Internet à l'adresse suivante : [www.dentsplysirona.com/manuals](http://www.dentsplysirona.com/manuals)

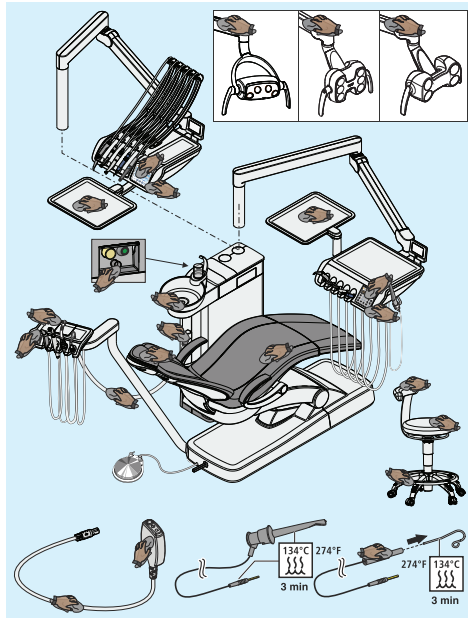


### Après chaque patient

Nettoyer/désinfecter les surfaces

ATTENTION ! Utiliser exclusivement des produits de nettoyage, d'entretien et de désinfection agréés par Dentsply Sirona !


- Désinfecter les surfaces et les selleries
- Désinfecter les panneaux de commande
- Entretien, désinfecter/stériliser les instruments (voir les notices d'utilisation des instruments)
- Nettoyer, désinfecter/stériliser les composants d'ApexLocator
- Désinfecter le porte-instruments
- Désinfecter les poignées
- Désinfecter le tray
- Désinfecter les raccords de nettoyage des cordons d'aspiration
- Entretien et nettoyer le scalytique (voir la notice d'utilisation du LEDlight, LEDlight Plus ou LEDview Plus)

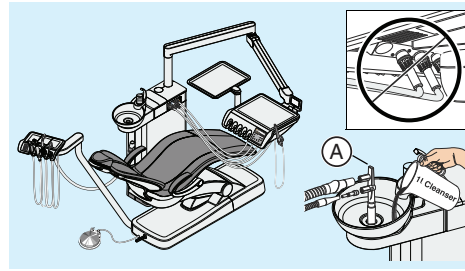

### Chaque jour

Si l'option „Nettoyage chimique des cordons” n'est pas présente : désinfecter les cordons d'aspiration à l'aide de l'adaptateur de nettoyage (A)


- chaque jour à midi et
- à la fin de la journée de travail.

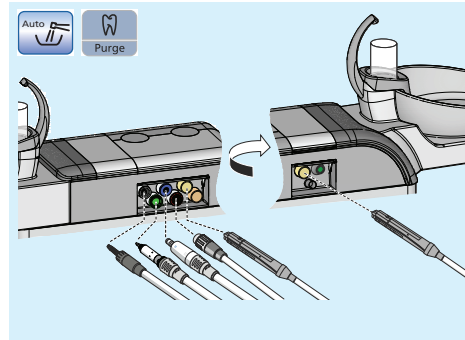

Déclencher le rinçage automatique des conduits d'eau (fonction Purge automatique)

Au début et à la fin de la journée de travail, brancher les raccords dans les adaptateurs correspondants :


- blanc - turbine
- vert - moteur BL E
- bleu - moteur BL ISO E (interface ISO)
- rouge - détartreur SiroSonic L
- jaune - Sprayvit E, eau sur la touche de droite
- orange - Sprayvit E, eau sur la touche de gauche

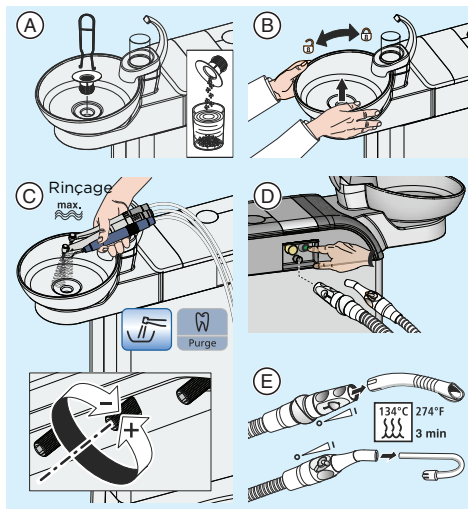

Nettoyer/désinfecter les circuits d'eau et le système d'aspiration

ATTENTION ! Utiliser exclusivement des produits de nettoyage, d'entretien et de désinfection agréés par Dentsply Sirona !


- A) Nettoyer le collecteur d'or
  - ATTENTION ! Eliminer les restes d'amalgame dans le respect de l'environnement !
  - B) Nettoyer/désinfecter (nettoyant spécial) le crachoir (amovible)
  - C) Rincer les conduits d'eau des instruments utilisés de l'élément praticien (fonction Purge)
  - D) Effectuer le nettoyage des cordons d'aspiration
  - E) Stériliser les pièces-à-main d'aspiration
- Pour éviter le reflux, utiliser la canule d'aspiration avec arrivées d'air auxiliaires.

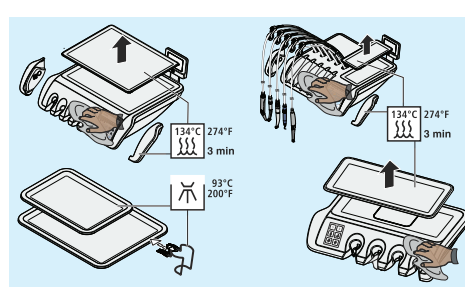

Stériliser les tapis en silicone / les housses des poignées

Thermodésinfection du tray et du porte-verre

Désinfecter l'élément praticien et l'élément assistante

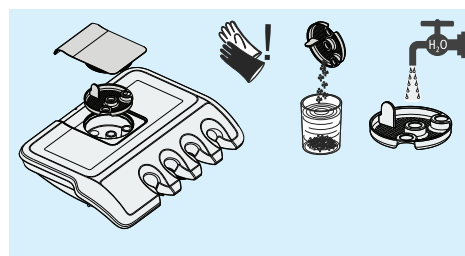


Vider la crépine d'aspiration centrale

Porter des gants de protection pour vider la crépine d'aspiration centrale !

Collecter les résidus d'amalgame dans un récipient fermé contenant de l'eau. ATTENTION ! Eliminer les restes d'amalgame dans le respect de l'environnement.

Nettoyer la crépine d'aspiration sous l'eau courante.

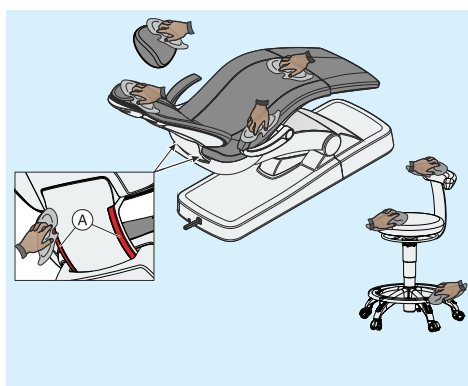

### Une fois par semaine

Entretien et nettoyer les selleries

ATTENTION ! Utiliser uniquement des produits de nettoyage et d'entretien pour selleries agréés par Dentsply Sirona !



Observer minutieusement les instructions d'utilisation du produit de nettoyage et d'entretien.

Eviter tout contact entre le produit FD360 et des surfaces chromées.

Nettoyer la partie inférieure de la surface de déplacement de la barre-support (A) du dossier

Nettoyer la pédale


Nettoyez la face inférieure de la pédale avec un chiffon humide (eau).

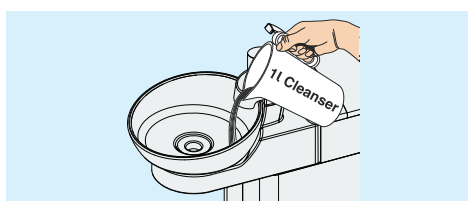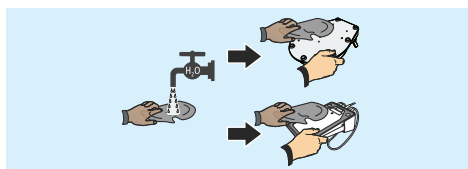

Si l'option „Nettoyage chimique des cordons” est présente :

Nettoyer les conduits d'évacuation

Les cordons et le système d'aspiration sont nettoyés avec le même produit de nettoyage chimique (voir REF 5970 905).

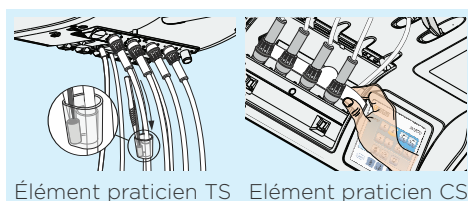


Élément praticien TS

Changer le rouleau de coton sur le cordon de turbine


Élément praticien CS

Remplacer le collecteur d'huile

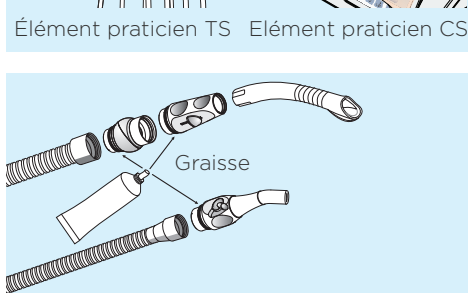

Graisser les pièces-à-main d'aspiration

Séparer les pièces à main d'aspiration et graisser les joints toriques après la thermodésinfection ou la stérilisation, ainsi que toutes les semaines.

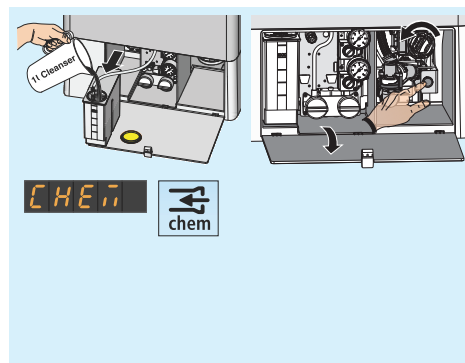

### Tous les mois ou en fonction des besoins

Compléter le niveau dans le réservoir de produit de nettoyage

„chem” apparaît sur le panneau de commande : Faire le plus rapidement possible l'appoint de produit pour le nettoyage chimique des cordons d'aspiration (option).

Nettoyer l'élément filtrant de l'aspiration humide

Dans le sous-dialogue Démarrer, appuyer sur la touche „Aspirer l'eau résiduelle” avant de retirer le filtre pour le nettoyer.

Remplacer les filtres (C) pour l'eau (A) et l'air (B)



Vider le bac à sédimentation (D) (option)

Porter des gants de protection pour vider le bac à sédimentation !

Contrôle microbiologique de l'eau

• A intervalles réguliers en fonction des résultats et

• après des périodes d'arrêt > 1 semaine.

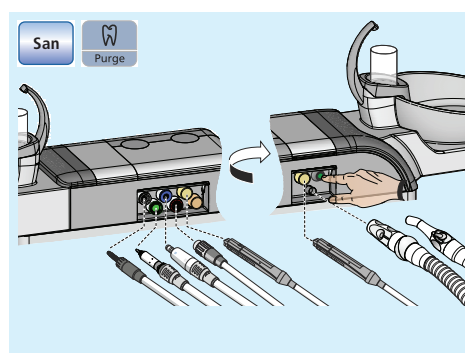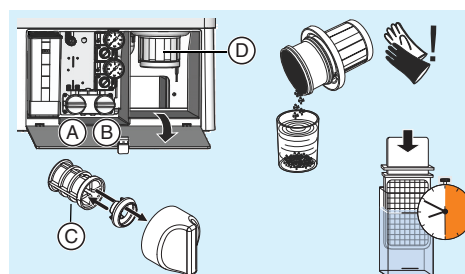


Assainissement du poste de traitement

Pour réduire le biofilm au sein du système d'alimentation en eau fraîche de l'unité de traitement

- blanc - turbine
- vert - moteur BL E
- bleu - moteur BL ISO E (interface ISO)
- rouge - détartreur SIROSONIC L
- jaune - Sprayvit E, eau sur la touche de droite
- orange - Sprayvit E, eau sur la touche de gauche

Après l'assainissement effectuer le nettoyage des cordons d'aspiration.

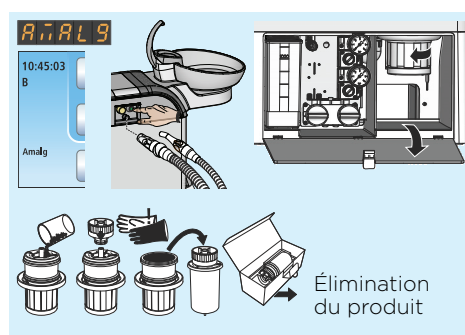

Remplacer le rotor d'amalgame

ATTENTION ! Le rotor doit être systématiquement remplacé au bout de 12 mois au maximum !

1. „Amalg” s'affiche sur l'interface utilisateur. Procéder à la désinfection
2. Uniquement lorsque l'unité est en service : retirer le rotor d'amalgame.
3. Verser les résidus d'amalgame collectés, fermer le rotor d'amalgame.
4. Retirer le rotor d'amalgame de la partie inférieure et l'éliminer dans le respect de l'environnement.

Pour plus de détails, se reporter à la notice d'utilisation.

En matière d'hygiène et de désinfection, observer les exigences et recommandations nationales (p. ex. RKI, ADA, CDC etc.).