

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Le partenaire de toutes vos solutions dentaires.

Le traitement dentaire en une seule séance

CEREC le rend possible

www.dentsplysirona.fr



Le traitement dentaire en une seule séance – pour vous et vos patients

Que penseriez-vous de pouvoir proposer à vos patients la pose d'une couronne en une seule séance plutôt que deux? Quelle serait la réaction de vos patients ? Nous savons déjà qu'ils seraient très enthousiastes! Les patients pourraient alors bénéficier d'un traitement rapide, agréable, sans porte-empreinte et sans prothèse provisoire. Proposez à vos patients un des traitement des plus moderne – avec CEREC !



Deux tiers

des patients seraient prêts à changer de dentiste pour profiter d'un traitement en une seule séance.¹



Deux tiers

des patients seraient prêts à effectuer un plus long trajet pour bénéficier d'un traitement dentaire en une seule séance.¹

Imaginez que vous puissiez offrir dès maintenant à vos patients des restaurations en une seule séance – avec tous les matériaux courants, ainsi que des traitements d'orthodontie et d'implantologie. Quelles seraient les nouvelles opportunités pour votre cabinet ? Efficacité, modernité et sécurité : CEREC!



95 %

de stabilité à long terme avérée.²



Toutes les 5 secondes

Une restauration CEREC est posée dans le monde.



> 250

études scientifiques démontrent la sécurité clinique de CEREC.

¹ Sondage réalisé par Exevia GmbH auprès de 600 patients dentaires, en Allemagne et aux Etats-Unis en novembre 2015

² Posselt, Kerschbaum, Longevity of 2328 chairside CEREC Inlays and Onlays, Int J Comput Dent. (2003)

Le flux de travail CEREC

Des restaurations finales en une seule séance!

1 Empreinte optique

Épargnez à vos patients l'inconfort du porte-empreinte traditionnel. Pour la prise d'empreinte, vous utilisez par exemple la CEREC Omnicam, une petite caméra en couleurs sans poudrage. Les images précises en 3D aux couleurs naturelles, rendent la prise d'empreinte simple, intuitive et ergonomique.

2 Conception


Le logiciel CEREC génère des propositions de restauration de qualité basées sur la fonction unique « Biojaw ». Cela vous permet de gagner du temps et d'obtenir la conception finale de votre restauration dans les plus brefs délais. Vous profitez d'une interface utilisateur simple, clairement structurée et intuitive.

3 Fraisage et meulage

L'unité de fraisage et de meulage CEREC ainsi que le logiciel CEREC sont spécialement synchronisés l'une avec l'autre. Le cycle de fraisage/meulage pour vos restaurations est très précis, permettant d'obtenir des bords et des surfaces lisses ainsi que des fissures très fines, indépendamment du matériau choisi.

4 Frittage/Finalisation

Le frittage et le glaçage des restaurations tout en oxyde de zirconium s'effectuent au fauteuil, dans le CEREC SpeedFire compact. La technique à induction permet des durées de frittage et cuisson parmi les plus courtes. Son utilisation est simple et très intuitive. En plus des zircons, tous les autres types de céramique en verre peuvent être traités dans le module CEREC SpeedFire.

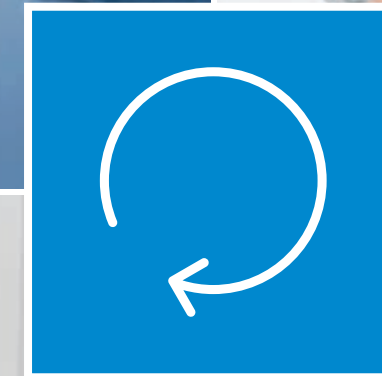

4

3

Une maniabilité intuitive

Grâce à la taille extrêmement réduite de la tête de la caméra et à un poids réduit de 313 grammes.

Empreintes sans poudre

Le scannage sans revêtement réduit la durée d'apprentissage et augmente le confort du patient.³

En couleur

Le scan en couleur permet d'obtenir un modèle numérique très réaliste.



NOUVEAU

Open Scan
Export

1

Des empreintes optiques conviviales pour les patients – avec la caméra CEREC Omnicam

Épargnez à vos patients l'inconfort d'un porte-empreinte traditionnel. Vous pouvez prendre des empreintes numériques avec la caméra CEREC Omnicam, une petite caméra couleur sans poudrage. Celle-ci est disponible en trois versions différentes : la variante chariot mobile éprouvée CEREC AC, le modèle de table flexible CEREC AF et la version ergonomique, intégrée CEREC AI. Faites votre choix en fonction du flux de travail de votre cabinet et de l'agencement de vos locaux.

³ En comparaison avec le CEREC AC Blue

CEREC AC – la variante chariot mobile

Avec le modèle CEREC AC avec Omnicam, tous les composants (système de caméra, ordinateur et écran) sont regroupés en une même unité de prise d'empreinte. La numérisation et la conception s'effectuent de façon centralisée avec la CEREC AC. Grâce à notre alimentation électrique sans interruption intégrée, l'appareil peut facilement être déplacé d'une salle de traitement à une autre. Cela représente une solution adaptée pour la majorité des cabinets dentaires. CEREC AC n'a pas cessé d'être développée au cours des 3 dernières décennies et a déjà fait ses preuves auprès de 38 000 utilisateurs.



CEREC AF – l'unité flexible sur table

CEREC AF est constituée des différents composants de la CEREC Omnicam, y compris la tablette porte-instruments et un PC avec moniteur. La caméra peut être transportée d'une salle de traitement à une autre avec une grande flexibilité, ce qui offre un avantage décisif pour les cabinets de groupe et ceux possédant plusieurs sites. La numérisation et la conception peuvent être réalisées séparément. Vous pouvez ainsi, par exemple, réaliser la conception dans une salle de traitement pendant que votre assistante ou votre collègue effectue déjà une nouvelle numérisation dans une autre.



CEREC AI – la version ergonomique, intégrée

Pour de nombreux utilisateurs CEREC, le traitement CEREC fait partie intégrante de leur travail quotidien. Avec la CEREC AI, Dentsply Sirona propose maintenant une solution adaptée : elle est composée d'une CEREC Omnicam avec support, qui est intégrée au poste de traitement TENEO via un bras séparé, et d'un PC avec moniteur. La CEREC Omnicam offre ainsi également une bonne prise en main en position 12 heures. Tout comme vous, le patient peut tout suivre directement sur le moniteur du poste de traitement ou sur une tablette fournie.

2

Le logiciel CEREC simplifie la conception⁴



Empreinte numérique réalisé avec CEREC AC



Restauration réalisée avec CEREC AC – par Dr. Todd Ehrlich, Austin, États-Unis

« ...La proposition initiale du logiciel CEREC est généralement tellement performante que je peux passer directement à la production sans avoir à effectuer d'autres ajustements ».


Dr. Peter Schneider, Heidelberg, Allemagne

Le logiciel CEREC analyse l'enregistrement complet et, à partir de là, calcule des propositions de bonne qualité de restauration. Vous économisez ainsi du temps et vous parvenez plus rapidement à la prochaine étape du processus, la fabrication. Vous bénéficiez d'une interface utilisateur simple, clairement structurée et esthétique.

⁴ En comparaison avec le CEREC SW 4.

NOUVEAU LOGICIEL CEREC 4.5

Pour une utilisation
intuitive et simple, y
compris la détection
des ombres

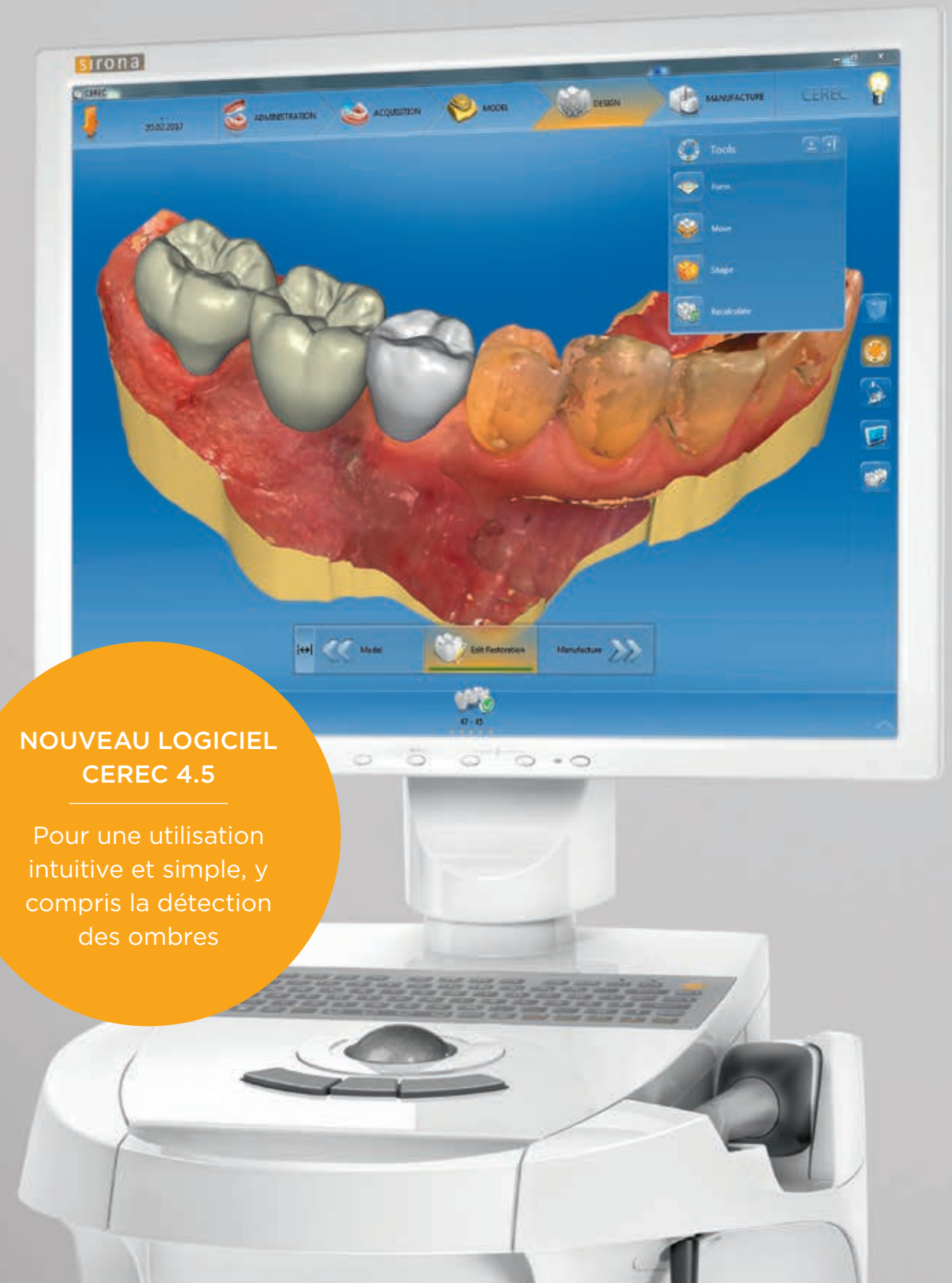

Des propositions de restauration de qualité

La fonction « Biojaw » fait office de véritable point fort du logiciel CEREC. Sur la base du scannage des dents, le logiciel génère une proposition de restauration propre au patient en tenant compte de la morphologie existante des dents. Dans la plupart des cas, cette proposition peut être directement fabriquée par l'unité de fraisage.

Simplicité d'utilisation

L'interface utilisateur claire et intuitive ainsi que les fonctions d'aide et de feed-back garantissent une utilisation efficace du logiciel CEREC.

D'excellentes performances de fraisage en une seule séance

L'unité de meulage et de fraisage CEREC et le logiciel CEREC sont spécifiquement synchronisés. L'usinage de la conception de la restauration est exact, les surfaces sont lisses, chaque petit détail des fissures est précis. Les bords sont très réguliers. Nos unités de meulage et de fraisage permettent aussi de réaliser des restaurations tout en oxyde de zirconium en une seule séance!

Précis

Les algorithmes optimisés et les outils fins permettent de réaliser les restaurations conçues en respectant fidèlement les détails.

Polyvalent

Chaque matériau nécessite un processus de traitement individuel adapté à ses caractéristiques propres. Qu'il s'agisse du meulage humide, du fraisage à sec ou humide – CEREC offre toujours la solution adaptée. Grâce à ses flux de travail automatiques, CEREC simplifie chaque processus.

Rapide

Selon l'indication et le matériau, l'unité de meulage et de fraisage CEREC peut usiner/fraisier une restauration individuelle d'une dent en 4 à 12 minutes.



4

Frittage et glaçage de la zircone – avec CEREC SpeedFire

CEREC SpeedFire est l'un des plus petit et plus rapide four de frittage sur le marché, et parvient à fritter une couronne en 10 à 15 minutes. Ceci permet d'utiliser aussi les avantages de l'oxyde de zirconium entièrement anatomique pour les applications réalisées au fauteuil. En outre, CEREC SpeedGlaze permet, si besoin est, d'appliquer un émail pouvant être cuit en quelques minutes dans le four CEREC SpeedFire. La restauration est maintenant prête à être posée dans la bouche du patient.

ENVOI AUTOMATIQUE DES ORDRES

Le logiciel CEREC envoie au four l'ordre accompagné de toutes les informations nécessaires.

TECHNIQUE A INDUCTION

...permet des durées de frittage et de cuisson courts.

SEULEMENT 10 A 15 MINUTES

...pour le frittage d'une couronne anatomique en oxyde de zirconium.



CEREC SpeedGlaze

CEREC SpeedGlaze permet de pulvériser la restauration frittée de manière homogène. La cuisson d'émaillage qui s'ensuit donne à la restauration son fini brillant.

« CEREC SpeedFire est le four dentaire dont vous avez besoin. Il peut fritter, glacer et cristalliser l'ensemble des matériaux. »



Technique à induction

Des durées de frittage et cuisson courts.

Indicateur de statut à LED

Les différentes couleurs indiquent l'état actuel du processus.

Chambre

Espace pour 3 couronnes individuelles ou jusqu'à des bridges à 3 éléments.

Écran tactile

Utilisation intuitive et haute résolution.

Réseau intelligent

Le logiciel CEREC envoie au four l'ordre accompagné de toutes les informations nécessaires.




reddot award 2016 winner

CEREC – votre passage en toute sécurité à la CFAO au fauteuil


Depuis 30 ans, CEREC a été synonyme de fabrication de restaurations en une seule séance. Nous avons mis au point et amélioré continuellement CEREC pour répondre à vos besoins et aux exigences de vos patients. Aujourd'hui, ses fonctions vont bien au-delà des simples restaurations.

CEREC s'étend aujourd'hui sur trois champs d'application : restaurations, implantologie et orthodontie – pour que vous soyez bien préparé pour l'avenir.

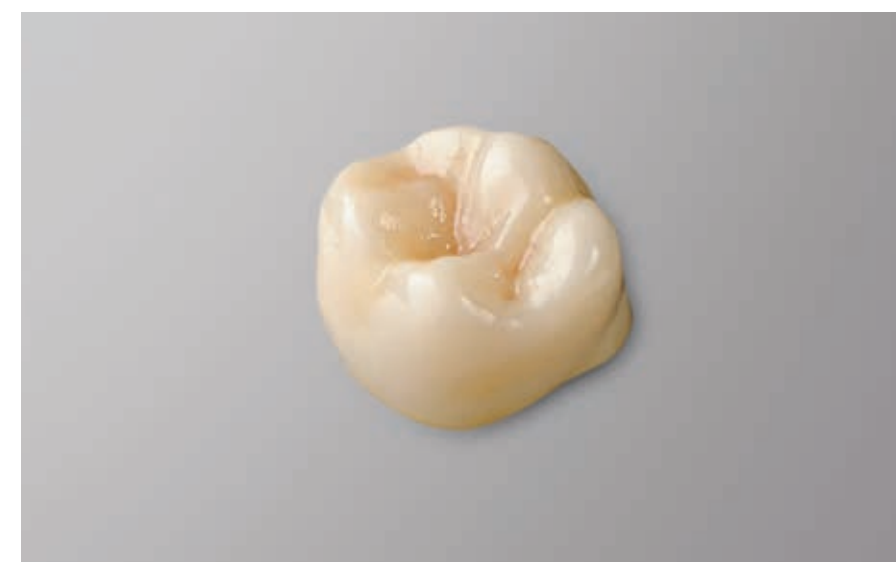

1 Restaurations

- Plus de 30 années d'expérience en CAO/FAO
- Des propositions de conception initiale spécifique au patient via l'analyse du scanage complet grâce à la fonction « Biojaw » unique
- Des performances significatives en matière de fraisage et meulage grâce aux nouveaux algorithmes
- Utilisation simple grâce à la nouvelle conception de l'interface utilisateur du logiciel CEREC
- Une vitesse d'usinage rapide pour la vitrocéramique

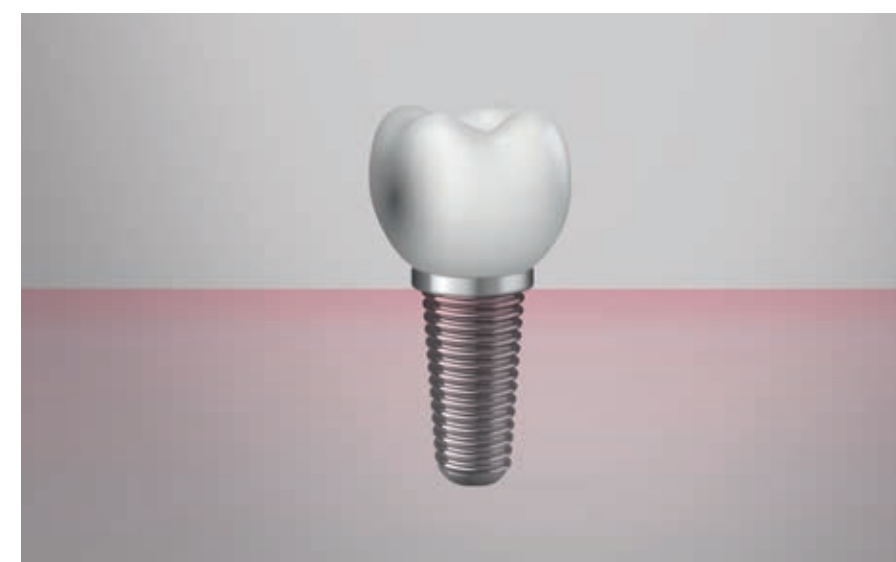

2 Implantologie


- Implantologie sur le fauteuil avec des couronnes vissées ou des piliers implantaires personnalisés en une seule séance
- Pose d'implants avec CEREC Guide 2, un guide chirurgical rapide et facile à utiliser
- Des couronnes en zircone vissées en une seule séance avec la nouvelle zircone Meso Block CEREC



3 Orthodontie

- Programme de traitement rapide des gouttières
- Stockage numérique et production de modèles à la demande sur des imprimantes 3D
- Empreintes numériques fiables avec une petite caméra sans poudre
- Outil d'analyse de modèle intégré

Implantologie CEREC intégrée au fauteuil

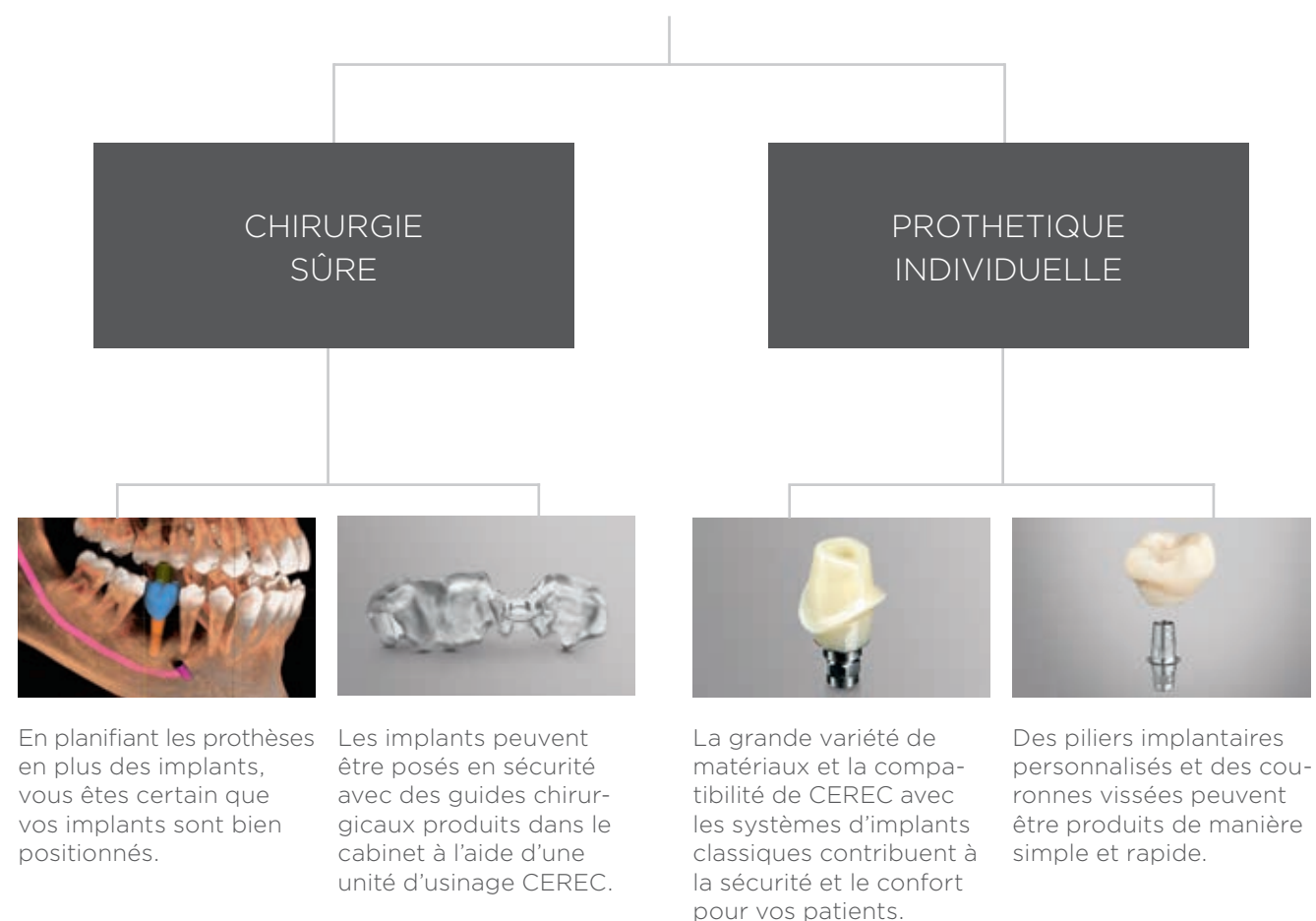

Les avantages de l'implantologie CEREC intégrée au fauteuil

CONTROLE

Planification guidée

- Planification numérique des implants tenant compte des aspects prothétiques et chirurgicaux
- Implantologie guidée avec CEREC Guide 2
- Contrôle total de la planification à la restauration finale

INDIVIDUELLE

Prothétique individuelle

- Piliers implantaires personnalisés ou couronnes vissées
- Apparence naturelle grâce au pilier implantaire de la couleur de la dent
- Profil d'émergence propre à chaque patient
- Compatible avec les systèmes d'implants les plus communs
- Vaste gamme de matériaux

RAPIDE

Moins de séances

- Traitement implantaire en une seule séance
- Moins de rendez-vous patients
- CEREC Guide 2 produit en l'espace d'une heure
- Réutilisation de la conception pour le pilier implantaire final ou la couronne vissée



« Avec CEREC, vous pouvez proposer à votre patient un traitement en une seule séance. Mais surtout, je gagne beaucoup de temps en produisant tout directement dans mon cabinet. »

Dr. Carlos Repullo BDs, DiplImpDent, Séville, Espagne



« Sans CEREC, le traitement implantaire était très chronophage. Aujourd'hui, nous proposons tout ce qu'il faut en un seul rendez-vous. »

Dr. med. dent. Hendrik Zellerhoff, Laer, Allemagne

Poser des implants de manière précise...

De la planification chirurgicale à la prothèse finale en passant par la pose d'implants, le système CEREC vous permet de gérer toute la procédure de pose d'implants dans votre cabinet.



1 Scannage

Dans un premier temps, toutes les images nécessaires à la planification sont préparées : empreintes intra-orales pour la prothèse proposée et images radiographiques en 3D pour la planification chirurgicale.

2 Plan

Le logiciel Galileos Implant aligne ensuite la proposition en matière de prothèse aux données de la radio. Cela permet de planifier l'implant et un guide chirurgical est produit.

3 Pose

L'implant est posé en toute sécurité avec un guide chirurgical. Dentsply Sirona propose un guide chirurgical accessible et rapide.

...en un seul rendez-vous

Grâce à CEREC, vous contrôlez toute la restauration. En seulement une étape de conception⁵, vous pouvez créer un pilier implantaire personnalisé avec une couronne adaptée ou vissée. Vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de matériaux pour la restauration provisoire ou finale. Au final, vous proposez à vos patients des restaurations individuelles et esthétiques.



4 Empreinte

La caméra CEREC Omnicam peut aussi effectuer des empreintes numériques des derniers implants mis en place, ce qui épargne aux patients l'expérience peu agréable du porte-empreinte traditionnel. Les images précises en 3D aux couleurs naturelles, rendent la prise d'empreinte simple, intuitive et ergonomique.

5 Conception

Le logiciel CEREC analyse le scannage complet et l'utilise pour générer des propositions de restauration. Les piliers implantaires et les couronnes sont faciles à concevoir en seulement une étape.

Fraisage/meulage

L'unité de fraisage et de meulage CEREC et le logiciel CEREC sont spécialement synchronisés. En fonction de l'indication, une vaste gamme de matériaux peut être utilisée pour produire directement des restaurations temporaires ou finales.

7 Frittage/finalisation

L'un des fours de frittage le plus rapide au monde, CEREC SpeedFire, peut fritter des couronnes vissées ou des piliers implantaires en zircone en 24 minutes environ.⁵

⁵ Notice : CEREC SpeedFire

L'orthodontie se numérise – avec CEREC

Avec CEREC, votre gamme de traitements peut être étendue pour inclure des applications d'orthodontie si vous le souhaitez. Avec ses nombreuses options de traitement, le logiciel CEREC Ortho supplémentaire facilite les premières étapes. Les praticiens axés sur l'orthodontie peuvent aussi utiliser des outils avancés comme le système d'analyse de modèle intégré.

« Les empreintes numériques présentent de nombreux avantages, en particulier pour mes patients. Je leur épargne l'inconfort d'un porte-empreinte traditionnel.

La procédure plus rapide permet également de démarrer le traitement plus tôt. Je n'imaginais plus travailler dans mon cabinet dentaire moderne sans cette avancée technique! »

Hanna Ritter, spécialiste en orthodontie, Hennef, Allemagne



Lorsque la planification du traitement est terminée, vous pouvez exporter ou envoyer le cas en un seul clic. Des interfaces personnalisées sont fournies pour transférer directement les données du logiciel CEREC Ortho de manière intuitive.

MTM® Clear•Aligner

Ideal Smile® ALIGNER
— FOR MINOR TOOTH MOVEMENT —

CA
DIGITAL

invisalign®

ClearCorrect™

DW Lingual Systems GmbH

SICAT
A Dentsply Sirona Company

Dolphin
Imaging & Management Solutions
a Patterson Technology

OnyxCeph™

Impression et stockage numériques

- Production de modèles à la demande sur des imprimantes 3D
- La majorité des appareils orthodontiques peuvent être réalisés à partir du modèle physique
- Modèles numériques d'étiquettes et de boîtes faciles et rapides à mettre en œuvre à des fins d'archivage
- Possibilité d'imprimer en option les résultats d'analyse (ex. analyse Bolton) directement en tant que PDF pour les documenter et les archiver

Empreintes numériques

- Résultats 100 % reproductibles grâce au scannage guidé très fiable
- Utilisation intuitive avec la petite caméra vidéo

Traitement plus rapide des gouttières

- Les empreintes numériques suppriment l'étape laborieuse de la création et l'envoi d'empreintes physiques, ce qui améliore les délais de traitement



SIRONA Connect – votre lien direct avec le laboratoire

Votre prothésiste de confiance est directement connecté à votre système CEREC via le portail Internet Sirona Connect. Vous épargnez ainsi à vos patients la prise d'empreinte conventionnelle, même en cas d'indications que vous ne voulez pas effectuer vous-même en une séance. Les empreintes numériques avec Sirona Connect complètent parfaitement CEREC, notamment en cas de couronnes et bridges stratifiés. Le logiciel Sirona Connect dont vous avez besoin pour envoyer les données des empreintes est pré-installé sur votre système CEREC. L'envoi de données via Sirona Connect est gratuit.


CABINET

Vous scannez les empreintes numériques dans votre cabinet, évaluez les données et les adressez à votre laboratoire dentaire.

LABORATOIRE

Le laboratoire reçoit les données, traite votre commande et livre la restauration comme d'habitude.

Le portail Sirona Connect dispose d'une fonction Skype intégrée qui vous permet de communiquer directement avec votre prothésiste dentaire.

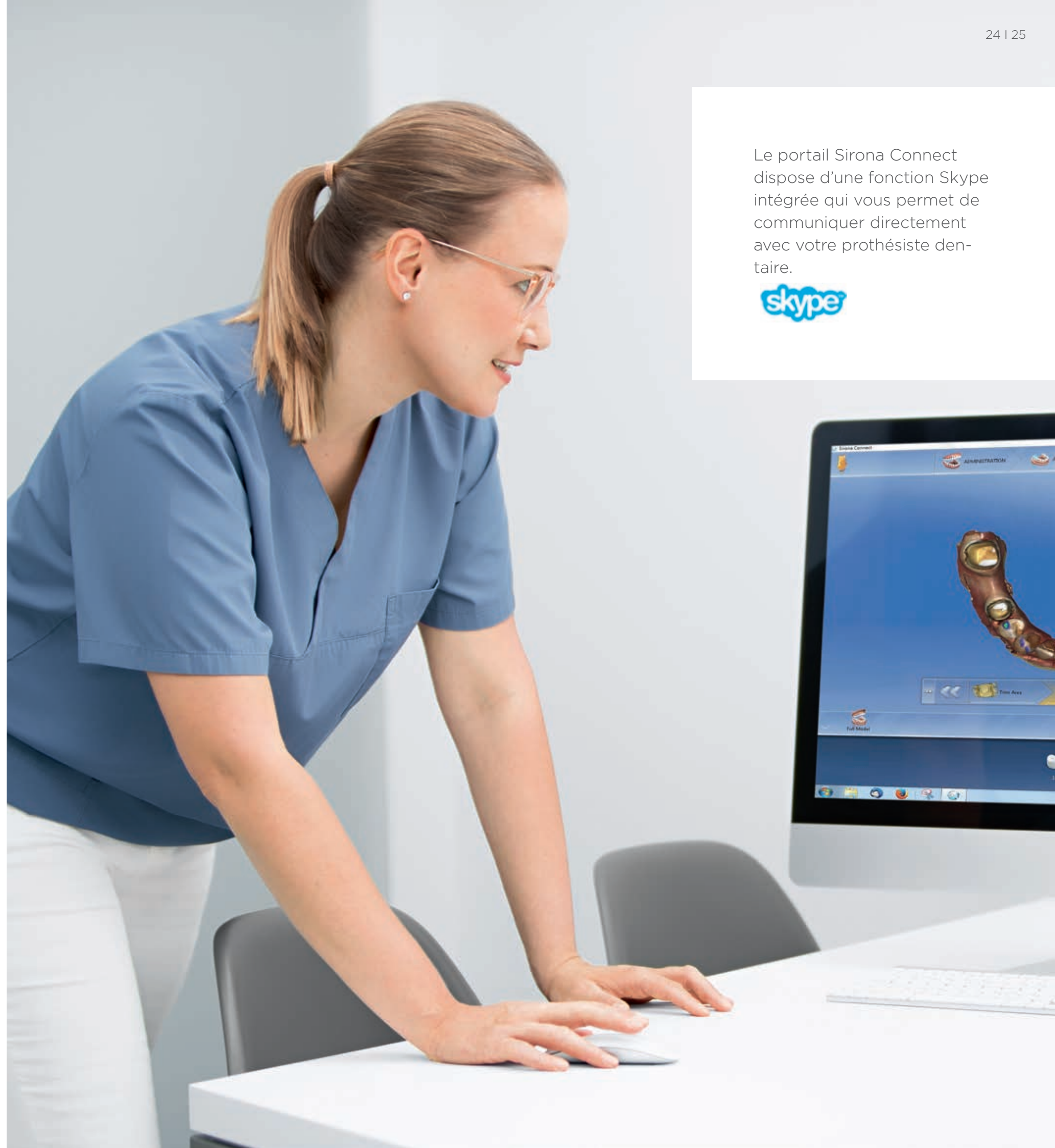

CEREC Club :

Pour tous ceux qui ne se contentent pas seulement des nouveautés



« J'ai des attentes très hautes par rapport à mes équipements, ce qui signifie que mon logiciel doit aussi rester toujours à jour. Avec CEREC Club, je suis assuré de bénéficier de tous ces aspects. »

Dr. Matthias Engeln, Hamburg, Allemagne

Avec CEREC Club, vous avez toujours une longueur d'avance : vous profitez des dernières innovations CEREC, vous sécurisez tout votre système et le développez facilement. Votre outil de travail est ainsi automatiquement à jour.

Faits & chiffres



CEREC AC – la version chariot mobile
CEREC AC avec Omnicam comprend un système de caméra, un ordinateur et un écran dans un centre d'acquisition compact monté sur 4 roues pour les empreintes numériques. Vous pouvez scanner et concevoir de manière centralisée avec le modèle CEREC AC.



CEREC AF – la version flexible sur table
CEREC AF comprend des composants individuels de CEREC Omnicam, ce qui comprend un plateau de caméra et un écran d'ordinateur. Vous pouvez choisir entre un écran 19" ou 24", ou utiliser celui de votre cabinet. La caméra peut être facilement transportée d'une salle de traitement à une autre.



CEREC AI – la version ergonomique, intégrée
Pour de nombreux utilisateurs CEREC, le traitement CEREC fait partie intégrante du flux de travail quotidien. Avec CEREC AI, Sirona propose une solution adaptée : elle se compose d'une caméra CEREC Omnicam avec un plateau intégré au poste de traitement TENEO via un bras séparé et d'un PC avec moniteur.



Système CEREC MC

- Restauration individuelle entièrement anatomique avec une taille de bloc allant jusqu'à 20 mm
- Précis
- Solution rentable





Système CEREC MC X

- Gamme complète pour réalisation au fauteuil jusqu'à une taille de bloc de 40 mm, y compris pour les bridges et les piliers
- Précis et rapide
- Mise à niveau en option avec le logiciel CEREC Premium
- Guide chirurgical CEREC Guide 2



CEREC MC XL Pack Premium

- Gamme complète pour cabinets et laboratoires dentaires jusqu'à une taille de bloc de 85 mm
- Usinage/meulage de tous les matériaux et traitements CEREC & CEREC Premium
- Précis et rapide
- Pratique : quatre moteurs et un écran tactile facile à utiliser
- Guides chirurgicaux CEREC Guide 2
- Meulage « extra-fin » en option

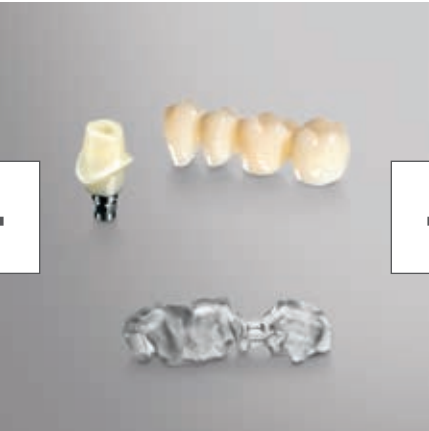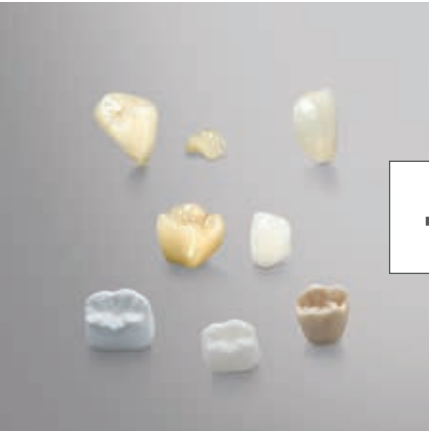

- CEREC SpeedFire**
- Frittage rapide des zircons à structure pleine : les processus ultra-rapide permettent un traitement en une seule séance
 - Rapidité + pré-séchage : les restaurations meulées par voie humide peuvent être effectuées en une seule séance
 - Température de frittage max. : 1 600°C
 - Processus de glaçage rapide : processus de glaçage le plus rapide en < 9 minutes
 - Vitesse de chauffage max. 300°C/min : pas de préchauffage ni maintien de températures requis
 - Refroidissement actif : réduit le délai d'attente par refroidissement actif
 - Interfaces : 2x USB 2.0, 1x LAN (RJ45), WLAN (en option via le dongle WLAN USB)

Les schémas renvoient aux temps de traitement des zircons CEREC et dépendent du volume de frittage et de la couleur.

Vos possibilités de fabrication avec CEREC

Performances	Système CEREC MC	Système CEREC MC X	CEREC MC XL Pack Premium
Indication	Restaurations entièrement anatomiques de dents unitaires	Gamme complète chairside	Gamme complète pour cabinets et laboratoires
Précision d'usinage	± 25 µm	± 25 µm	± 25 µm
Taille max. du bloc	15,5 mm x 19 mm x 20 mm	15,5 mm x 19 mm x 40 mm	22 mm x 40 mm x 85 mm
Ecran tactile	–	–	■
Quatre moteurs à broche	–	–	■
Logiciel CEREC 4.5	■	■	■
Restaurations individuelles (céramique feldspathique, vitrocéramique et céramique au disilicate de lithium, oxyde de zirconium anatomique, céramique hybride, blocs polymère en mono-tailles)	■ Le traitement de l'oxyde de zirconium anatomique en une séance nécessite le four CEREC SpeedFire	■ Le traitement de l'oxyde de zirconium anatomique en une séance nécessite le four CEREC SpeedFire	■ Le traitement de l'oxyde de zirconium anatomique en une séance nécessite le four CEREC SpeedFire
Bridge pouvant comporter jusqu'à quatre éléments	–	■	■
Piliers implantaires/Couronnes vissées	–	■	■
Guides chirurgicaux CEREC Guide	–	■	■
Logiciel CEREC Premium SW 4.4.4	□	□	■
Chapes, armatures, barres, fixations, télescopes, multicouche, fraisage par empilement, imbrication	–	□	■
Métal fritté	–	□	■
Armatures pouvant compter jusqu'à 12 éléments	–	–	■

■ Disponible □ En option

Partenaires matériaux certifiés CEREC




Matériaux CFAO Dentsply Sirona



Les atouts en un coup d'œil

CEREC CLUB

Profitez des avantages dès maintenant

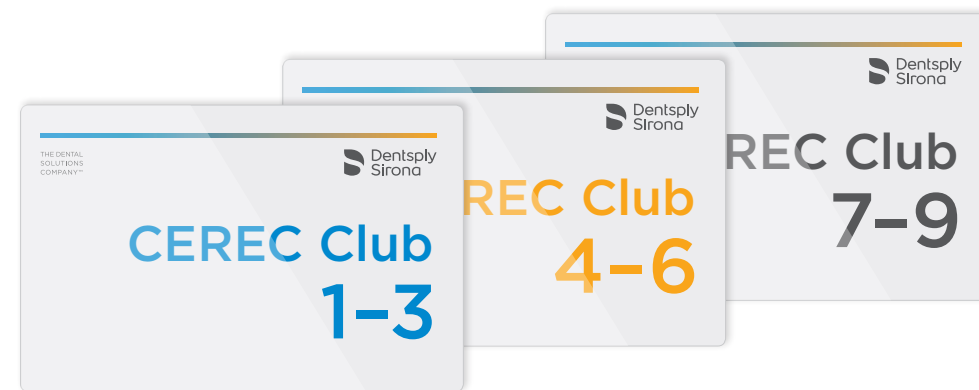

Avec les kits pour trois ans, vous recevrez des dernières mises à jour et mises à niveau de logiciels et des garanties exclusives des pièces de rechange ainsi que des kits d'entretien pendant toute la durée de vie de votre système. Vous pouvez ajouter des services et produits en option en fonction des besoins, à des tarifs préférentiels.

GARANTIE INNOVATION

Mises à jour et mises à niveau
1 logiciel CEREC
et CEREC Premium⁶

SECURITE D'EQUIPEMENT

Garantie pièces de rechange
étendue, kits d'entretien et mises
à niveau informatiques

EXCELLENT RAPPORT QUALITE-PRIX

Un service complet à toutes les
phases de vie de votre système
CEREC

Des conditions spéciales pour les laboratoires internes et les cabinets de groupe

Mentions Légales

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. **CEREC AC avec Omnicam.** Indications : Unité de prise d'empreinte pour la fabrication assistée par ordinateur de restaurations dentaires. Classe/Organisme certificateur : I/. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **CEREC AF/AF Connect/AI/AI Connect.** Indications : Unité de prise d'empreinte pour la fabrication assistée par ordinateur de restaurations dentaires. Classe/Organisme certificateur : I/. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **CEREC Zirconia.** Indications : Matériau d'oxyde de zirconium translucide pré-teint à haute résistance à la flexion pour l'usinage des restaurations dentaires. Classe/Organisme certificateur : IIa/CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **CEREC SpeedGlaze.** Indications : Spray utilisé pour le glaçage de restaurations entièrement anatomiques. Classe/Organisme certificateur : IIa/CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **CEREC Guide.** Indications : Guide chirurgical pour pose d'implants. Classe/Organisme certificateur : I/CE 0123 Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. 10/2017

Solutions procédurales

Prévention
Odontologie conservatrice
Orthodontie
Endodontie
Prothèses
Implants

Technologies habilitantes

Systèmes de CFAO
Systèmes d'imagerie
Postes de traitement
Instrumentation

Dentsply Sirona France

7 Ter Rue de la Porte de Buc
78008 Versailles Cedex - France
dentsplysirona.fr

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

**Dentsply
Sirona**

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

⁶ La licence du logiciel CEREC Premium dépend du type d'unité d'usinage.