

Spécifications techniques

DAC Universal

Conditions requises pour l'installation	
Alimentation électrique	90-120 V CA/190-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance absorbée	1,1 kW
Raccordement de l'air comprimé	Pression d'entrée : 5,0-8,0 bars ; max. Consommation d'air sur une courte durée : env. 60 NI/min à 5 bars
Capacité du réservoir d'huile	0,2 l
Capacité du réservoir d'eau	1,8 l
Consommation d'eau	Env. 600 ml par cycle (programme standard)
Qualité de l'eau	< 3 QS
Hauteur ouvert/fermé (avec couvercle standard) x Largeur x Profondeur	53 cm/35 cm x 38 cm x 37 cm
Équipement : non emballé/massif	6/5 instruments
Poids	23 kg
Distance minimale mur / plafond	10 cm/70 cm

Documentation

Connexions RS 232	Imprimante, logiciel de documentation, adaptateur USB, clés USB, cartes mémoire, etc.
Impression	Programme de stérilisation choisi, date, heure, numéro de lot, vide, pression, température, numéro de série, écart, etc.

Programmes

Programmes de stérilisation	
Possibilités de sélection	Programme standard
Les durées des cycles peuvent varier selon l'environnement de travail dans lequel l'autoclave est exploité.	134 °C, 3 min Stérilisation Durée totale du cycle : env. 18 min
	Programme prions standard
	134 °C, 18 min Stérilisation Durée totale du cycle : env. 32 min
	Programme pour instruments solides**
	Sélection individuelle du programme standard, délicat ou prions, toutefois sans lubrification. Les durées des cycles restent inchangées.
Programme de désinfection	
	Programme pour détartreur à ultrasons, inserts à ultrasons et buses d'inserts*
	134 °C, 3 min Désinfection Durée totale du cycle : env. 22 min

* couvercle Flex requis.

** couvercle Basket requis.

DAC Premium / DAC Premium Plus

	DAC Premium	DAC Premium Plus
Numéros de référence	65 26 920 65 36 929 (AUS)	65 26 938 65 36 937 (AUS)
Raccordement électrique	3.400 W / 220 - 240 V / 50/60 Hz	3.400 W / 220 - 240 V / 50/60 Hz
Dimensions extérieures (l x H x P)	47 x 56,5 x 57,5 cm	47 x 56,5 x 69 cm
Chambre de stérilisation (Ø x profondeur)	25 x 35 cm	25 x 45 cm
Poids (sans charge)	59 kg	66 kg
Volume de la cuve	18,4 l	23,8 l
Charge max.	6 kg d'instruments ou 2 kg de textiles	7 kg d'instruments ou 2,5 kg de textiles
Réservoir (eau dém. / eau dist)	Côté eau fraîche : 5 l (env. 7 cycles) ; Côté eaux usées : 3 l	Côté eau fraîche : 5 l (env. 7 cycles) ; Côté eaux usées : 3 l

DAC Premium	Temps de fonctionnement (sans séchage)		Temps de séchage
	Charge jusqu'à 6 kg Instruments non emballés	Charge jusqu'à 2,5 kg Textiles	
Programme universel	21 min	-	12 min
Programme rapide B*	14 min	-	6 min
Programme rapide S**	10 min	-	2 min
Programme délicat	36 min	39 min	12 min
Programme prions	38 min	-	12 min

DAC Premium Plus	Temps de fonctionnement (sans séchage)		Temps de séchage
	Charge jusqu'à 7 kg Instruments non emballés	Charge jusqu'à 2 kg Textiles	
Programme universel	21 min	-	12 min
Programme rapide B*	14 min	-	6 min
Programme rapide S**	10 min	-	2 min
Programme délicat	36 min	43 min	12 min
Programme prions	38 min	-	12 min

Toutes les durées dépendent de la charge et de l'alimentation en tension et en eau. * max 1,5 kg de produits non emballés ou bien 6 ou 7 kg de produits non emballés ** non emballés

Spécifications techniques

DAC Professional / DAC Professional Plus

	DAC Professional	DAC Professional Plus
Numéros de référence	61 45 309 (DE) 60 93 475 (EN) 61 26 705 (F) 61 26 713 (AUS)	65 26 912 (DE) 65 36 879 (EN) 65 36 887 (F) 65 36 895 (AUS)
Raccordement électrique	2.100 W / 220 - 240 V / 50/60 Hz	2.100 W / 220 - 240 V / 50/60 Hz
Dimensions extérieures (l x H x P)	42,5 x 48,5 x 63 cm	42,5 x 48,5 x 75,5 cm
Chambre de stérilisation (Ø x profondeur)	25 x 35 cm	25 x 45 cm
Poids (sans charge)	45 kg	50 kg
Volume de la cuve	17 l	22,6 l
Charge max.	5 kg d'instruments ou 1,8 kg de textiles	5 kg d'instruments ou 1,8 kg de textiles
Réservoir (eau dém. / eau dist)	Côté eau fraîche : 5 l (env. 7 cycles) ; Côté eaux usées : 3 l	Côté eau fraîche : 5 l (env. 7 cycles) ; Côté eaux usées : 3 l

DAC Professional	Temps de fonctionnement (sans séchage)		Temps de séchage
	Charge jusqu'à 5 kg Instruments non emballés	Charge jusqu'à 1,8 kg Textiles	
Programme universel	30 min	-	20 min
Programme rapide B*	30 min	-	10 min
Programme rapide S**	15 min	-	5 min
Programme délicat	45 min	45 min	20 min
Programme prions	45 min	-	20 min
Test sous vide	18 min (vide)	-	-

DAC Professional Plus	Temps de fonctionnement (sans séchage)		Temps de séchage
	Charge jusqu'à 5 kg Instruments non emballés	Charge jusqu'à 1,8 kg de textiles	
Programme universel	30 min	-	20 min
Programme rapide B*	30 min	-	10 min
Programme rapide S**	15 min	-	5 min
Programme délicat	45 min	45 min	20 min
Programme prions	45 min	-	20 min
Test sous vide	18 min (vide)	-	-


Toutes les durées dépendent de la charge et de l'alimentation en tension et en eau.

* max 1,5 kg de produits non emballés ou bien 6 ou 7 kg de produits non emballés ** non emballés

SiroSeal Premium


	SiroSeal Premium	SSiroSeal Professional
Numéro de référence	65 26 961	65 26 953
Raccordement électrique	300 W / 220 - 240 V / 50/60 Hz	300 W / 220 - 240 V / 50/60 Hz
Dimensions extérieures (l x H x P)	41,5 x 15 x 24 cm	41,5 x 15 x 24 cm
Poids (sans charge)	5,4 kg	5,4 kg
Plage de température	100 - 210 °C	160 - 200 °C
Temps de scellage	env. 3 sec	env. 3 sec
Temps de chauffage	env. 90 sec	env. 2 min
Longueur du cordon de soudure	max. 275 mm	max. 275 mm
Largeur du cordon de soudure	10 mm	10 mm
Interfaces	1 x clé USB de stockage, 1 x interface PC-USB	-

Support de rouleaux « standard »

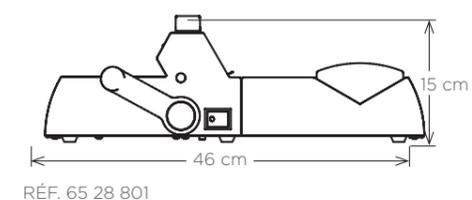

RÉF. 65 28 801

Support de rouleaux « confort »

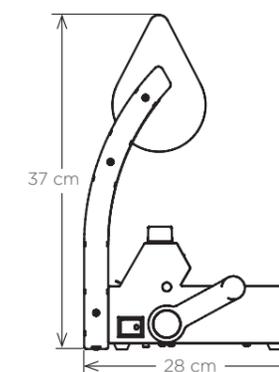

RÉF. 65 28 819