

Deep Shape

by 

Sagomatura

Detersione

Otturazione

MAILLEFER

ProTaper Ultimate™

 Dentsply
Sirona

MAILLEFER

ProTaper Ultimate™

SAGOMATURA

Impostazioni motore: 400 rpm / 4-5.2 Ncm


SEQUENZA BASE



Slider 016.002v



Shaper 020.004v

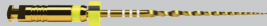

F1 020.007v



F2 025.008v



F3 030.009v

SOLO PER CANALI AMPI
E DRITTI



Slider 016.002v



FX 035.012v




FXL 050.010v



DETERSIONE

Dopo la rimozione di ogni strumento, detergere con l'ago di irrigazione.

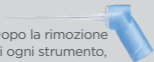

Usare SmartLite[®] Pro EndoActivator[®] per rimuovere i detriti



In arrivo

OTTURAZIONE



Punte di carta
AH Plus[®] Bioceramic Sealer
Punte di guttaperca Conform Fit



ACCESSORI



Versione
manuale
corrispondente



SX
Modificatore
di orificio

**EC REP****CE****Strumenti****Maillefer Instruments Holding Sàrl**

Chemin du Verger 3,
CH-1338 Ballaigues,
Switzerland

Dentsply DeTrey GmbH

De-Trey-Straße 1,
D-78467, Konstanz,
Germany

2797

**Guttaperca
e punte
di carta****Dentsply Tulsa Dental Specialties**

608 Rolling Hills Drive,
Johnson City, TN 37604,
USA

Dentsply DeTrey GmbH

De-Trey-Straße 1,
D-78467, Konstanz,
Germany

2797

**Ago per
irrigazione****Produits Dentaires SA**

Rue des Bosquets 18, CH-1800,
Vevey

PD Dental EU

74200 Thonon-les-Bains,
France

1639

**AH Plus[®]
Bioceramic
Sealer****Maruchi**

2-208, Medical Industry Complex
Blidg., 42-10, Taejanggongdangil,
Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311,
South Korea

Biogeri

Am Pfeilshof 12,
DE-22303 Hamburg,
Germany

0197