





# Riproducibilità delle V-3D-Shades con il concetto linea Kiss



V-3D-SHADES	Opaque	Dentine mixture				Incisal
		Dentine basic powders		Power Chroma additional powders		
		 Portioner large	 Portioner large	 Portioner small	 Portioner small	
1 M 1	B1	B1	-	-	-	S1
1 M 2	A1	A1	A2 (kein)	-	-	S1
2 L 1,5	B2	B2	-	-	-	S1
2 L 2,5	B2	B2	B3	-	-	S1
2 M 1	D2	D2	-	-	-	S2
2 M 2	A2	A2	A3	-	-	S2
2 M 3	B3	B3	-	PC 1	PC 3	S4
2 R 1,5	A2	A2 (2x)	-	PC 1	PC 4	S2
2 R 2,5	A2	A3	A2	PC 1	PC 4	S2
3 L 1,5	C2	C2	-	-	-	S5
3 L 2,5	B3	B3	-	-	-	S4
3 M 1	C1	C1	C2	-	-	S1
3 M 2	A3	A3	-	-	-	S3
3 M 3	B4	B4	-	PC 3	PC 5	S6
3 R 1,5	D3	D3 (2x)	-	PC 5	-	S4
3 R 2,5	A3,5	A3,5 (2x)	-	PC 3	PC 5	S3
4 L 1,5	C3	C3	C4 (small)	-	-	S5
4 L 2,5	A4	A4 (2x)	-	PC 4	PC 6	S5
4 M 1	C3	C3	C4	-	-	S5
4 M 2	A3,5	A3,5 (2x)	-	PC 4	PC 6	S3
4 M 3	A4	A4	-	PC 4	PC 6	S5
4 R 1,5	A3,5	A3,5	-	PC 5 (2x)	-	S3
4 R 2,5	A4	A4	-	PC 4	PC 5	S5
5 M 1	C4	C4	-	PC 4	PC 6	S6
5 M 2	A4	A4	-	PC 4	PC 6	S5
5 M 3	A4	A4	-	PC 4 (large)	PC 6 (large)	S5

I valori qui elencati sono da intendersi solo a scopo orientativo e devono essere considerati solo come linee guida. Le tonalità possono essere diverse. Abbiamo compilato e controllato con cura tutti i valori. Tuttavia, non possiamo in nessun caso essere responsabili dei vostri risultati.



Dentsply Sirona Italia S.r.l.  
Piazza dell'Indipendenza, 11/B · 00185 Roma · Fax 06 72640394  
infoweb.italia@dentsplysirona.com · www.dentsplysirona.com

©2018 Dentsply Sirona. All rights reserved.