


Maggior stabilità. Maggior sicurezza.
Progettato per mantenere le
lastre ai fosfori in posizione.

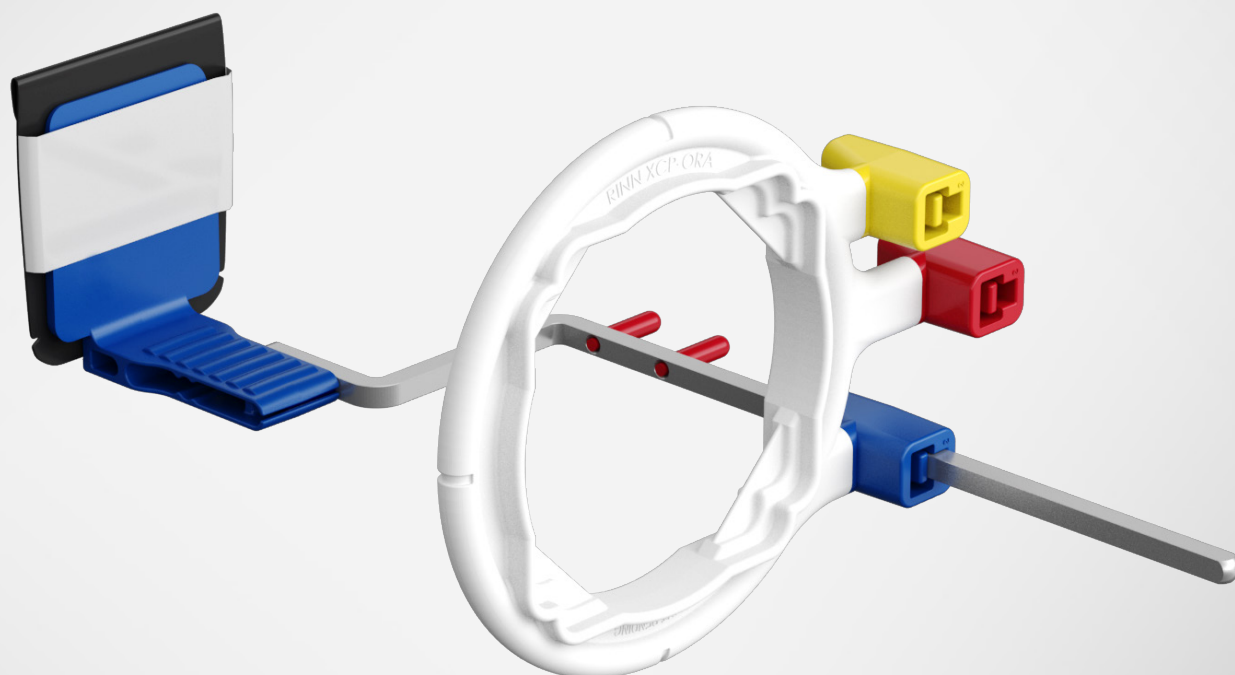

Rinn® XCP-PSP Fit™
Centratore per lastre ai fosfori

Maggior stabilità e sicurezza

Riduce al minimo il rischio di errori e ripetizioni

- Gli involucri protettivi con banda sicurezza “Secure Band” insieme ai biteblock mantengono in posizione ben salda la lastra al fosforo.
- Si adatta a tutti i principali produttori di lastre ai fosfori per le taglie 0, 1, 2 e 3
- Massima protezione delle lastre ai fosfori
- Codice colore che semplifica l’assemblaggio
- Migliore comfort del paziente grazie agli involucri protettivi morbidi ed ai biteblock con bordi arrotondati
- Utilizzati con braccio e anello XCP-ORA® della linea Rinn®, si riduce il numero dei pezzi presenti nello studio

Biteblock




Anteriore Thin



Anteriore Thick



Posteriore

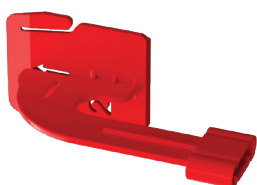

Bitewing orizzontale



Bitewing verticale



Endo orizzontale




Endo verticale




1. Preparazione

1.1 Involucri protettivi

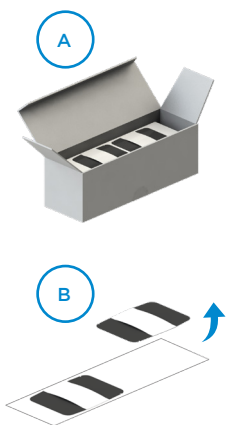


1.2 Lastra ai fosfori

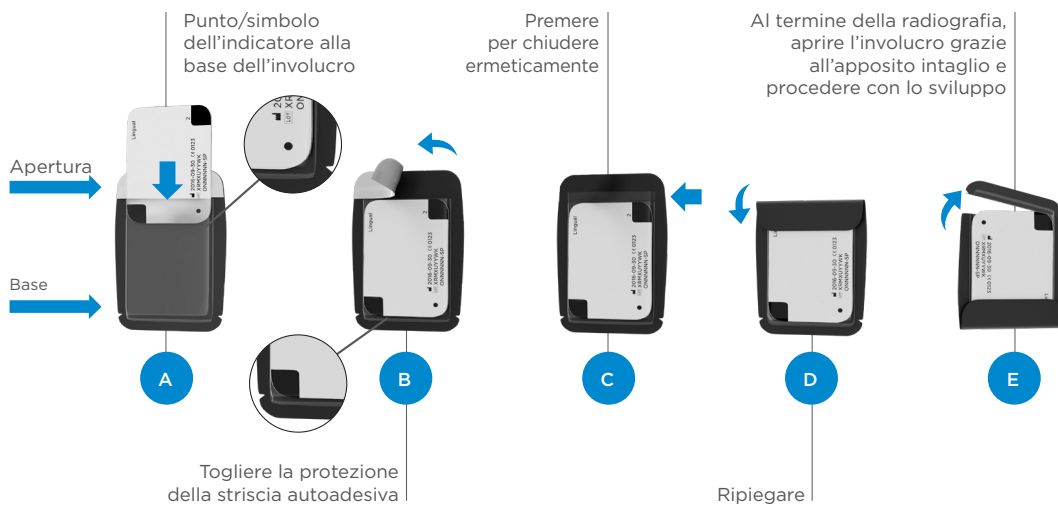

2. Posizionamento


STEP 1 Inserire la lastra ai fosfori nell'involucro con banda di sicurezza

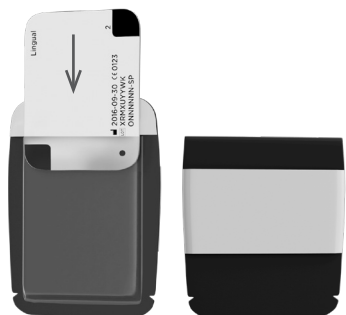

STEP 2 Posizionare la lastra sull'apposito supporto



STEP 3 Utilizzare braccio e anello Rinn® XCP-ORA® per un corretto posizionamento

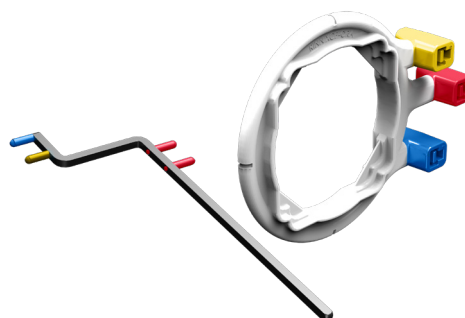


Codici prodotto

Rinn® XCP-PSP Fit™ Involucri protettivi con Secure Band



Involucri protettivi con Secure Band	Quantità
552710 Involucri protettivi, Misura #0	100
552711 Involucri protettivi, Misura #1	100
552712 Involucri protettivi, Misura #2	200
552714 Involucri protettivi, Misura #2	100
552713 Involucri protettivi, Misura #3	100

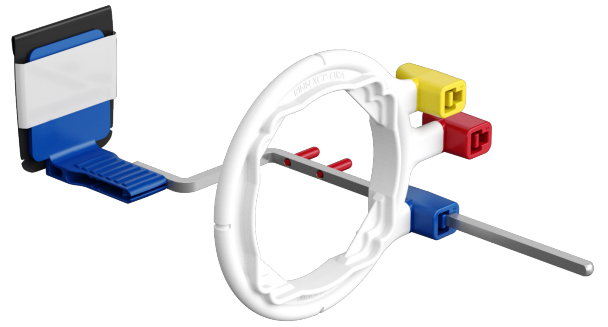

+

Rinn® XCP-PSP Fit™ Biteblocks



Anteriori Thick (Blu)	Lastre ai fosfori misura	Quantità
552730 Anteriore Thick	1	2
552731 Anteriore Thick	2	2



Anteriori Thin (Blu)	Lastre ai fosfori misura	Quantità
552740 Anteriore Thin	0	4
552741 Anteriore Thin	1	4
552742 Anteriore Thin	2	4
552743 Anteriore Thin	2	10



Posteriori (Gialli)	Lastre ai fosfori misura	Quantità
552750 Posteriore	0	4
552751 Posteriore	1	4
552752 Posteriore	2	4
552753 Posteriore	2	10



Bitewing Orizzontali (Rossi)	Lastre ai fosfori misura	Quantità
552760 Bitewing Orizzontale	0	4
552761 Bitewing Orizzontale	1	4
552762 Bitewing Orizzontale	2	4
552763 Bitewing Orizzontale	2	10
552764 Bitewing Orizzontale	3	4



Bitewing Verticali (Rossi)	Lastre ai fosfori misura	Quantità
552770 Bitewing Verticale	2	4



Endodontici Orizzontali	Lastre ai fosfori misura	Quantità
552781 Endo Orizzontale	2	4



Endodontici Verticali	Lastre ai fosfori misura	Quantità
552790 Endo Verticale	1	4
552791 Endo Verticale	2	4

+

Rinn® XCP-ORA® Braccio e Anello 3in1

ORA Anello & Braccio	Quantità
550771 XCP-ORA® Braccio e Anello	1
550772 XCP-ORA® Braccio e Anello	2
550773 XCP-ORA® solo anello	1
550774 XCP-ORA® solo braccio	1



Rinn® XCP® Braccio e Anello Endodontico

XCP Endo Anello & Braccio	Quantità
550597 Endo Braccio (metallo)	1
550598 Endo Anello (verde)	1




Rinn® XCP-PSP Fit® Kits Phosphor Plate Holder System

- 552700 Complete Solution Kit - Misura 0**
Contiene: Involucri protettivi misura 0 (100 pezzi), Biteblock Anteriore Thin misura 0 (4 pezzi), Biteblock Posteriore misura 0 (4 pezzi), Biteblock Bitewing Orizz. misura 0 (4), Braccio & Anello ORA (1 pezzo)
- 552701 Complete Solution Kit - Misura 1**
Contiene: Involucri protettivi misura 1 (100 pezzi), Biteblock Anteriore Thick misura 1 (2 pezzi), Biteblock Anteriore Thin misura 1 (4 pezzi), Biteblock Posteriore misura 1 (4 pezzi), Biteblock Bitewing Orizz. misura 1 (4 pezzi), Braccio & Anello ORA (1 pezzo)
- 552702 Complete Solution Kit - Misura 2**
Contiene: Involucri protettivi misura 2 (100 pezzi), Biteblock Anteriore Thick misura 2 (2 pezzi), Biteblock Anteriore Thin misura 2 (8 pezzi), Biteblock Posteriore misura 2 (8 pezzi), Bitewing Orizz. misura 2 (8 pezzi), Braccio & Anello ORA (1 pezzo)

Rinn® XCP-PSP Fit™ Phosphor Plate Holder System for Endo

- 552703 Complete Endo Kit**
Contiene: Involucri protettivi misura 1 (100 pezzi), Envelopes misura 2 (100 pezzi), Endo Vert. misura 2 (4 pezzi), Endo Orizz. misura 2 (4 pezzi), Endo Vert. #1 (4 pezzi), XCP Braccio Endo (1 pezzo), XCP Anello Endo (1 pezzo)

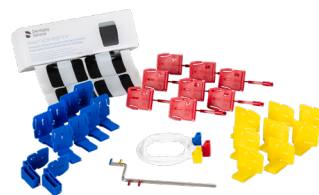

XCP-PSP Fit Complete Solution Kit



XCP-PSP Fit Complete Endo Kit



Dentsply Sirona Italia s.r.l.
Piazza dell'Indipendenza 11B · 00185 Roma · Fax 06 72640394
infoweb.italia@dentsplysirona.com · www.dentsplysirona.com

IT01703D