

# Palodent® 360

Sistema di matrici circolari

## TRUCCHI E CONSIGLI PRATICI



### Misure disponibili

Scegliere una banda che eccede leggermente l'altezza della circonferenza occlusale.



### Punto di contatto stretto?


Usare un anello separatore Palodent V3 oppure un cuneo di legno, così da ottenere spazio per il posizionamento della matrice.

### Denti piccoli

Ridurre la lunghezza della matrice prima dell'inserimento in bocca, per evitare di avere troppa differenza di diametro tra il dente e la matrice stessa.

### Posizione della rotellina

Posizionare la rotellina sulle pareti intatte dell'elemento, in modo da ottenere visibilità massima e facilità di accesso.

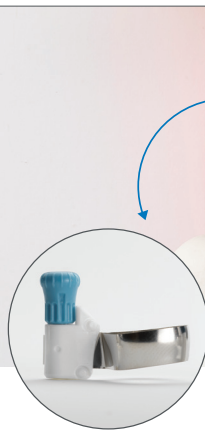

### Preso difficile e spazio ridotto

Tenere ferma la rotellina e muovere il corpo bianco in avanti, stringendo. Rilasciare la rotellina, permettendo al corpo di tornare al centro. Ripetere finché la banda non aderisce completamente.

### I prodotti Palodent sono ideati per lavorare insieme

Usare un anello Palodent V3 e/o i cunei per stabilizzare ulteriormente la banda e ottenere così la forma desiderata.

### Rimozione della matrice

Ruotare in senso antiorario la rotellina e spostare delicatamente avanti e indietro per allentare la matrice.