


# Guida tecnica per materiale da impronta (Cartucce da 50 ml)



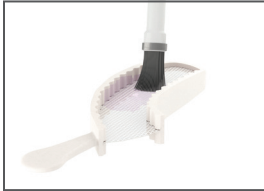


## PASSAGGIO 1

Applicare uno strato sottile di Caulk Tray Adhesive sul portaimpronte e asciugare ad aria per 5 minuti.


Nota bene: usare il **PUNTALE ROSSO** per il materiale ribasante.

Usare il **PUNTALE BLU** per il materiale da portaimpronte.

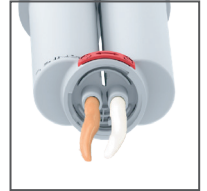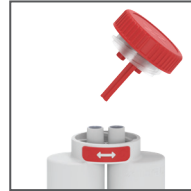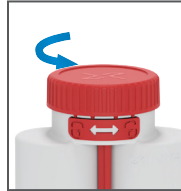



## PASSAGGIO 2

Aprire il sigillo di sicurezza svitando il tappo. Rimuovere il tappo dalla cartuccia. Effettuare il pareggio solo prima del primo utilizzo della cartuccia; il pareggio non è necessario dopo il primo utilizzo.

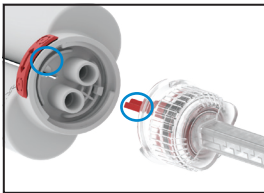


## PASSAGGIO 3

Per installare il puntale, inserire la chiavetta di allineamento nell'apertura apposita e poi avvitare saldamente finché non arriva a battuta (circa metà giro). Applicare il terminale intraorale sul puntale.

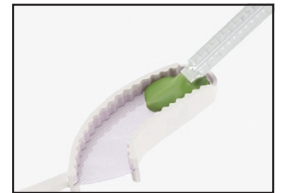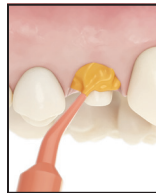

## PASSAGGIO 4

Estrudere il materiale ribasante attorno al dente preparato o al transfer implantare, riempiendo al tempo stesso il portaimpronte. Lavorare dai margini alla superficie occlusale/incisale. Tenere il puntale sempre immerso nel materiale e continuare con l'erogazione.

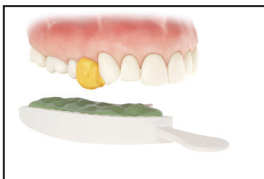

## PASSAGGIO 5

Inserire il portaimpronte nel cavo orale. Stabilizzare e mantenere la posizione senza movimenti per tutto il tempo di rimozione minimo. Dopodiché, rimuovere l'impronta.

Sia la cartuccia che i puntali vanno disinfettati e asciugati prima di essere messi via.

Prima dell'utilizzo successivo sostituire con un nuovo puntale: non è necessario il pareggio.



# Guida tecnica per materiale da impronta (Cartucce da 380 ml)

Questo sistema di erogazione calza in tutte le macchine miscelatrici in commercio con proporzione 5:1. Non è necessaria una macchina miscelatrice speciale.




## PASSAGGIO 1

Rimuovere il tappo esterno dalla cartuccia ruotando delicatamente in senso antiorario e sollevandolo dalla cartuccia.




## PASSAGGIO 2

Applicare il puntale dinamico sulla cartuccia ruotandolo in senso orario. Assicurarsi che la chiavetta di allineamento si inserisca bene all'interno della porta. Non è necessario l'anello a baionetta.

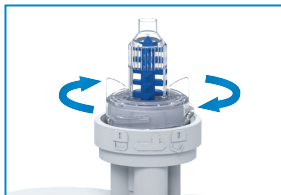

## PASSAGGIO 3

Caricare la cartuccia sulla macchina miscelatrice.

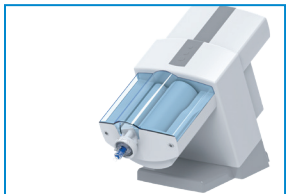


## PASSAGGIO 4

Assicurarsi che la cartuccia sia posizionata sotto il nasello di bloccaggio. Gli stantuffi possono essere mossi solamente quando il coperchio dell'apparecchio è chiuso. Quando l'asta esagonale si inserisce nel puntale miscelatore è possibile percepire un rumore: questo è un segnale di funzione. Non estrarre il materiale finché non è pronto per l'uso.



## PASSAGGIO 5A

Una volta pronte per l'erogazione, attivare la macchina, erogare e scartare il materiale mescolato all'inizio per accertarsi dell'omogeneità della miscelazione.

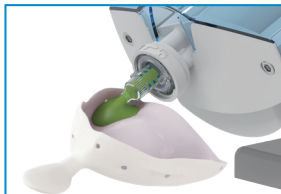

## PASSAGGIO 5B

Subito dopo l'attivazione e il pareggio del materiale attraverso il puntale, erogare sul portaimpronta come desiderato.



## PASSAGGIO 6

Disinfettare la cartuccia con il puntale miscelatore ancora attaccato. Funzionerà come tappo per il materiale quando non in uso.

**NOTA:** Per il primo utilizzo della cartuccia, erogare e scartare sempre circa 75 mm di materiale prima di riempire il portaimpronta. Per gli utilizzi successivi, scartare circa 30 mm prima di riempire il portaimpronta.



SOSTITUIRE  
CON NUOVO  
PUNTALE

## PASSAGGIO 7

Immediatamente prima del prossimo utilizzo, rimuovere il puntale miscelatore usato, installarne uno nuovo, pareggiare e passare all'erogazione.

NOTA: non usare cartucce danneggiate.



[dentsplysirona.com/ifu](https://dentsplysirona.com/ifu)



Dentsply Sirona | Piazza dell'Indipendenza, 11B | 00185 Roma | [www.dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com)