

Calibra® Ceram



PRE-TRATTAMENTO

Mordenzare con acido fluoridrico all'interno del manufatto e lasciare agire. Sciacquare ed asciugare. Applicare Calibra Silano (3 strati).



APPLICARE ADESIVO SUL DENTE

Applicare l'adesivo Prime&Bond Active sulla superficie. Strofinare delicatamente per 20 secondi ed asciugare. Non c'è bisogno di usare l'attivatore se usato insieme a Calibra Ceram.

Nota: La mordenzatura con acido fosforico è necessaria solo sullo smalto, mentre è opzionale sulla dentina.



ASCIUGARE AD ARIA

Asciugare con un getto d'aria moderato per 10-20 secondi.



APPLICARE CALIBRA CERAM

Pareggiare le paste in uscita dalla siringa doppia. Inserire il puntale miscelatore. Applicare uno strato sottile ed uniforme di Calibra Ceram all'interno del manufatto.



POSIZIONARE IL MANUFATTO

Posizionare il manufatto proteggendolo da eventuali contaminazioni.

Calibra® Ceram




PULIRE GLI ECCESSI

Fotopolimerizzare brevemente i margini per circa 5 secondi compiendo un movimento circolare. Il cemento in eccesso raggiungerà una fase gelatinosa: gli eccessi potranno essere rimossi entro 45 secondi.



RIMUOVERE GLI ECCESSI


Rimuovere gli eccessi senza danneggiare il manufatto.

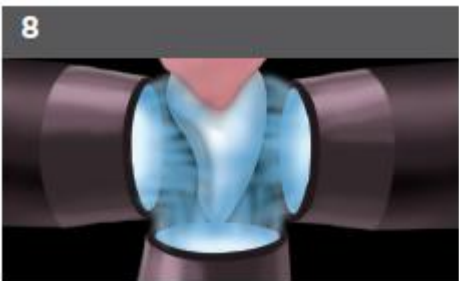

FOTOPOLIMERIZZARE

Fotopolimerizzare il manufatto per 20- 40 secondi lungo tutte le pareti.

• Minimal Wall Thickness

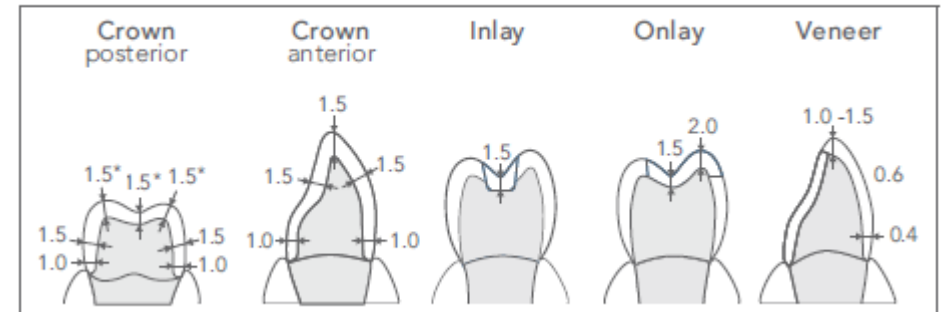

Spessori minimi richiesti per la fabbricazione di manufatti eseguiti in vetroceramica rinforzata.