


# Calibra® Universal



## PRE-TRATTAMENTO

Sabbiare le superfici interne con 50 micron di biossido di alluminio ( $Al_2O_3$ ) ad ameno 2,5 bar di pressione. Toccare la superficie sabbiata il meno possibile.

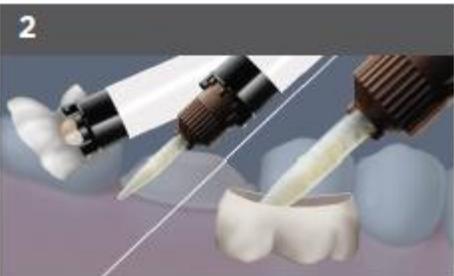


## APPLICARE CALIBRA UNIVERSAL

Pareggiare le paste in uscita dalla siringa. Inserire il puntale miscelatore. Applicare uno strato sottile ed uniforme di Calibra Universal all'interno del manufatto.




## POSIZIONARE IL MANUFATTO

Posizionare il manufatto proteggendolo da eventuali contaminazioni.

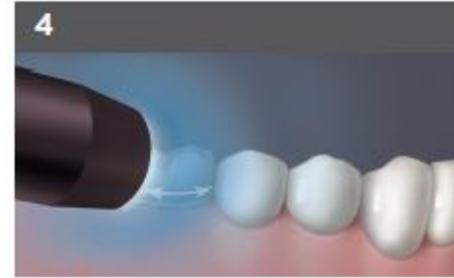

## PULIRE GLI ECCESSI

Fotopolimerizzare brevemente i margini per circa 5 secondi compiendo un movimento circolare. Il cemento in eccesso raggiungerà una fase gelatinosa: gli eccessi potranno essere rimossi entro 45 secondi.

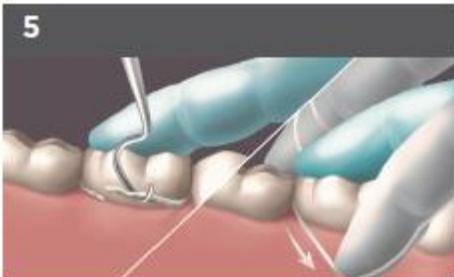

## RIMUOVERE GLI ECCESSI

Rimuovere gli eccessi senza danneggiare il manufatto.



## FOTOPOLIMERIZZARE

Fotopolimerizzare il manufatto per 20- 40 secondi lungo tutti i margini.