

Calibra® Veneer



APPLICARE LA PASTA PROVA

Posizionare sulla preparazione.
Rimuovere gli eccessi con un batuffolo di cotone o uno specchio. Le tinte possono essere mescolate per raggiungere l'estetica desiderata. **Nota importante:** le paste prova sono a base di glicerina, quindi non polimerizzano.



SCIACQUARE

Sciacquare la pasta prova di glicerina sotto un getto d'acqua ed asciugare.




PRE-TRATTAMENTO

Mordenzare con acido fluoridrico all'interno del manufatto e lasciare agire. Sciacquare ed asciugare. Applicare Calibra Silano (3 strati).



APPLICARE GEL MORDENZANTE

Applicare il gel mordenzante sullo smalto disponibile (opzionale sulla dentina). Sciacquare ed asciugare senza strofinare.

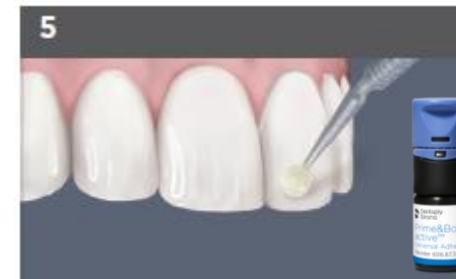

APPLICARE ADESIVO SUL DENTE

Applicare l'adesivo Prime&Bond Active sulla superficie. Strofinare delicatamente per 20 secondi ed asciugare.



ASCIUGARE AD ARIA

Asciugare con un getto d'aria moderato per 10-20 secondi.

Calibra® Veneer



PULIRE GLI ECCESSI

Fotopolimerizzare l'adesivo per 10 secondi.



PULIRE GLI ECCESSI

Fotopolimerizzare brevemente i margini per non più di 5 secondi compiendo un movimento circolare.



APPLICARE CALIBRA VENEER

Applicare uno strato sottile ed uniforme di Calibra Veneer all'interno del manufatto.




RIMUOVERE GLI ECCESSI

Rimuovere gli eccessi e le strisce separatrici senza danneggiare o spostare il manufatto.



POSIZIONARE IL MANUFATTO

Isolare i denti adiacenti con strisce separatrici. Posizionare il manufatto.

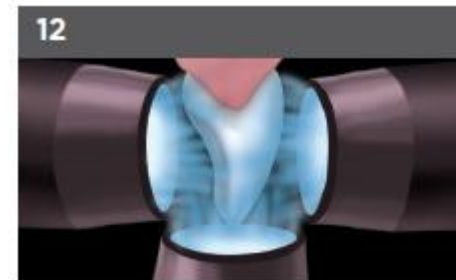

FOTOPOLIMERIZZARE

Fotopolimerizzare il manufatto per 20- 40 secondi lungo tutte le pareti.