

Guida alla caratterizzazione di Celtra Duo



Colore desiderato	Blocchetto	Massa per corpo	Massa incisale
A1	A1	Leggera applicazione di Stain 1, oppure solo glasura	i1
A2	A2	Leggera applicazione di Stain 1, oppure solo glasura	i1
A3	A3	Leggera applicazione di Stain 1, oppure solo glasura	i1
A3,5	A3,5	Leggera applicazione di Stain 2, oppure solo glasura	i2
A4	A3,5	Prima cottura: Leggera applicazione di Stain i1 sull'intera corona, compresa l'area incisale Seconda cottura: Corpo: miscela 50/50 di massa Sunset e Stain 3 Incisale: Stain i2	i2
B1	A1	Stain 2	i1
B2	B2	Leggera applicazione di Stain 2	i1
B3	B2	1 cottura con Stain 2	i1
B4	B2	2 cotture con Stain 2	i1
C1	B2	Leggera applicazione di Stain 3	i2
C2	B2	Stain 3	i2
C3	B2	Prima cottura: Miscela di 2 terzi di Stain 3 e 1 terzo di Stain 2 applicata sull'intera corona, compresa l'area incisale Seconda cottura: Corpo: miscela 50/50 della prima cottura e glasura Incisale: miscela 50/50 di i1 e glasura	Miscela 50/50 di i1 e glasura
C4	A3,5	Prima cottura: Miscela 50/50 di Stain 3 e di i1 e applicati sull'intera corona, compresa l'area incisale Seconda cottura: Corpo: miscela 50/50 della prima cottura e glasura Incisale: miscela 50/50 di i1 e glasura	Miscela 50/50 di i1 e glasura
D2	A1	Stain 4	i1
D3	A2	Stain 4	i1
D4	B2	Prima cottura: 50% di Stain 3 e 50% di i1 miscelati ed applicati sull'intera corona, compresa l'area incisale Seconda cottura: Corpo: miscela 50/50 dalla prima cottura e glasura Incisale: miscela 50/50 di i1 e glasura	i2