

Thermafil

サーマフィル

1本で三次元的根管充填



製品特長

1 時間短縮

1本の材料で、垂直及び側方への加圧ができ、三次元的な根管充填が、短時間で終了できます。細く彎曲した根管にも対応できます。

2 簡便な操作

根管拡大形成後、1本の材料とシーラを使用するシンプルなシステムのため、難しい操作は不要です。

3 除去が容易


キャリアの部分側面に溝が付与されているため、除去が必要な際、Hファイル等で容易に除去できます。(右記断面図参照)



■断面図

キャリア部分側面に溝を付与

使用手順

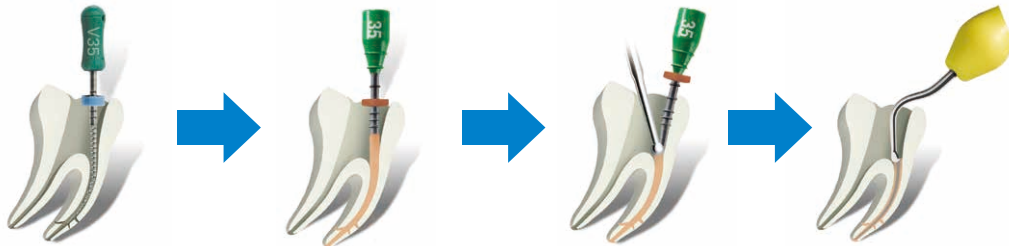

試適用NiTiファイル、ベリファイヤで作業長の確認を行い、根管壁へシーラを塗布します。

サーマプレップ²で加温したメルファーサーマフィルを、作業長まで挿入します。

メルファーサーマフィル充填完了後、サーマカットで不要なキャリア部分を切削します。

プラガー等を使用し、根管口付近の余剰なガッタパーチャのコンデンスを行います。

■臨床例



製品番号	製品名	包装
A016602502000	メルファーサーマフィル #20	6本入
A016602502500	メルファーサーマフィル #25	6本入
A016602503000	メルファーサーマフィル #30	6本入
A016602503500	メルファーサーマフィル #35	6本入
A016602504000	メルファーサーマフィル #40	6本入
A016602504500	メルファーサーマフィル #45	6本入
A016602505000	メルファーサーマフィル #50	6本入
A016602505500	メルファーサーマフィル #55	6本入
A016602506000	メルファーサーマフィル #60	6本入
A016602507000	メルファーサーマフィル #70	6本入
A016602508000	メルファーサーマフィル #80	6本入
A016602509000	メルファーサーマフィル #90	6本入
A016602510000	メルファーサーマフィル #100	6本入

製品番号	製品名	包装
A016602511000	メルファーサーマフィル #110	6本入
A016602512000	メルファーサーマフィル #120	6本入
A016602590000	メルファーサーマフィル アソート #20-#25	
A016700090000	メルファーサーマフィル ポステリアキット #20-#40	
A016800090000	メルファーサーマフィル アンテリアキット #45-#100	
A034802502000	メルファーサーマフィル #20	30本入
A034802502500	メルファーサーマフィル #25	30本入
A034802503000	メルファーサーマフィル #30	30本入
A034802503500	メルファーサーマフィル #35	30本入
A034802504000	メルファーサーマフィル #40	30本入

包装	価格
セット: ポステリアキット 20本入り 内容: #20、#25、#30、#35、#40 各4本入り	¥11,050
セット: アンテリアキット 20本入り 内容: #45、#50、#55、#60、#70 各3本、 #80、#90 各2本、#100 1本入り	¥11,050
セット: #20-#25 6本入り 内容: #20、#25 各3本	¥3,450
単品: 6本入り(種類別) #20、#25、#30、#35、#40、#45、#50、#55、#60、 #70、#80、#90、#100、#110、#120	¥3,450
単品: 30本入り(種類別) #20、#25、#30、#35、#40	¥16,040

関連製品



**歯科材料加温器
サーマプレップ2**
寸法: W155 X D178 X H81
重量: 約0.56 kg
電源電圧: 115V
周波数: 50/60Hz
消費電力: 最大 380W
製品番号: B00THPR115VUS
価格 ¥71,820

特長 サーマフィル専用加温器

◆ 時間短縮

スタート後、約15秒から約90秒でサーマフィルを適切な温度に加温でき、速やかに根管充填ができます。

◆ 簡便な操作

サイズ別加温が簡単にでき、セッティングの煩雑さがありません。

◆ 清掃が簡単

クリーニングモードの搭載により、毎回オープンの中をクリーンな状態に保てます。



**歯科用ファイル
ベリファイヤ**
長さ: 25mm
サイズ: #20、#25、#30、#35、#40、#45、
#50、#55、#60、#70、#80、#90
単品 6本入り(種類別)
セット 6本入り(#20~#45 各1本入り)
セット 6本入り(#50~#90 各1本入り)
製品番号: A017502502000~

価格 ¥2,380



**歯科用スチールバー
サーマカット**
長さ: 25mm
サイズ: #010、#012、#014、#016
単品 6本入り(種類別)
アソート 6本入り
(#010、#016 各1 #012、#014 各2本)
製品番号: A005032501000~

価格 ¥2,380



**歯科用スチールバー
ポストスペースバー**
長さ: 25mm、31mm
サイズ: #005、#007
包装: 6本入り(種類別)
製品番号: A005131300500~

価格 ¥5,940

表示価格は、2022年4月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。*仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<https://www.dentsplysirona.com>