

Simplant[®]

Simplant Pro 18 インストールマニュアル

テックサービス専用窓口

デンツプライシロナ株式会社

〒140-0012 東京都品川区勝島 1-5-21 東神ビルディング別館 11 号館

TEL: 受付時間 : 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

0120-016-152


FAX: 0120-280-630

E-mail: simplant-jp-service@dentsplysirona.com

1. インストール用ファイルのダウンロード

Yahoo!や Google などの検索エンジンを使って、「シムプラント」や「Simplant」を検索し、デンツプライシロナのシムプラントのページ(<https://www.dentsplysirona.com/ja-jp/explore/implantology/simplant.html>)を開き、下記の手順でダウンロードします。

① シムプラントのページを開きます。

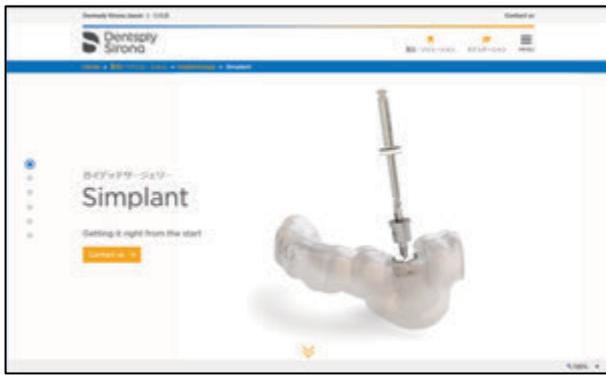

② 下方にスクロールし「シムプラントソフトウェアダウンロード」の「ダウンロード手順」を開きます。



③ 「シムプラント 18 Pro」の上で右クリックし「名前を付けてリンクを保存」を選択後、ダウンロードエラーが表示されますので、メニューから「保存」または「継続」を選択し、ダウンロードを続行してください。標準ではダウンロードフォルダに保存されます。

Microsoft Edge



画面右上



Google Chrome



画面左下




2. インストール

1 でダウンロードした「SIMPLANTProSetupJA.exe」をダブルクリックし、インストール用プログラムを実行します。


① 「次へ」をクリックします。




② 「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択後に、「次へ」をクリックします。

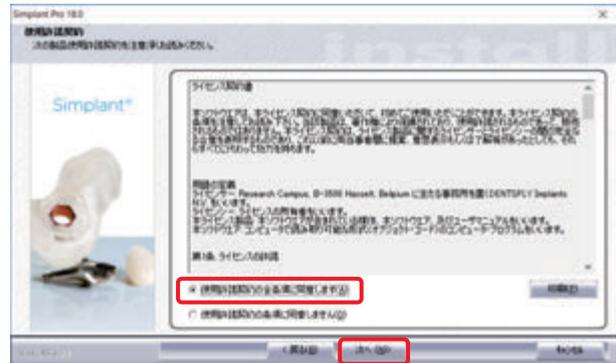

③ 「日本」を選択後に、「次へ」をクリックします。

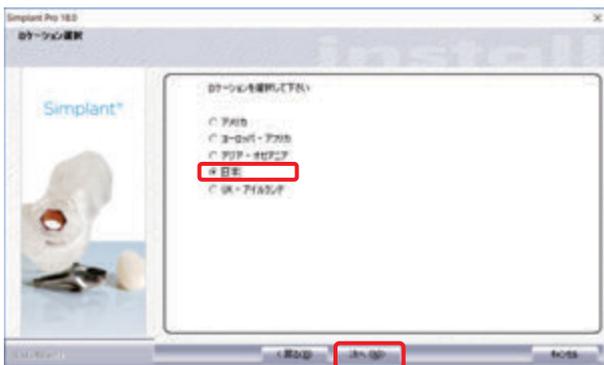


④ 標準のインストール先フォルダが表示されますので、「次へ」をクリックします。

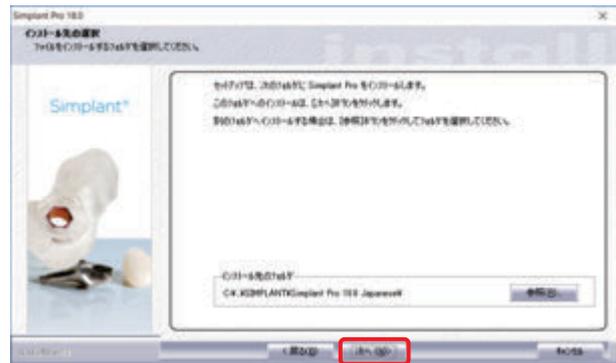

⑤ 標準のプログラムフォルダが表示されますので、「次へ」をクリックします。




⑥ 標準のデータ保存先（Cドライブ DentalData フォルダ）が表示されますので、「次へ」をクリックします。

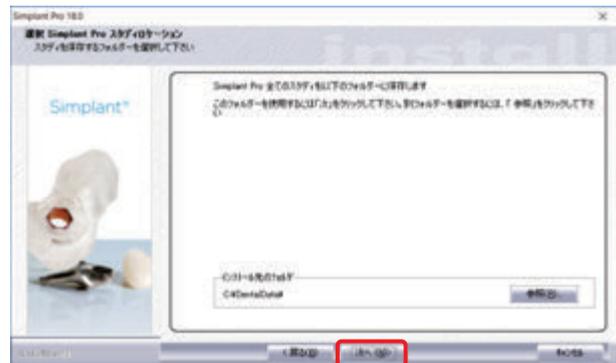


⑦ サンプルデータがコピーされますので、「はい」の選択のまま、「次へ」をクリックします。



⑧ 「次へ」をクリックします。

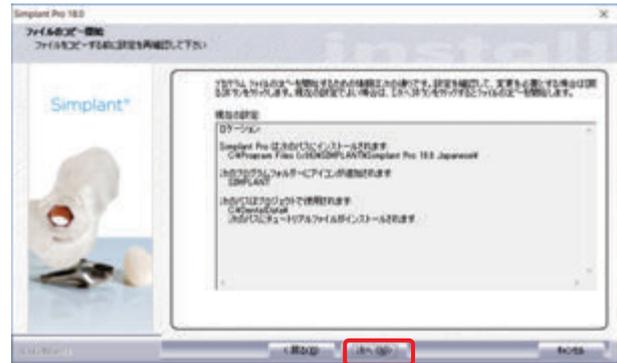

⑨ 「はい、今すぐコンピュータを再起動します」の選択のまま、「完了」をクリックし終了し、PC を再起動します。

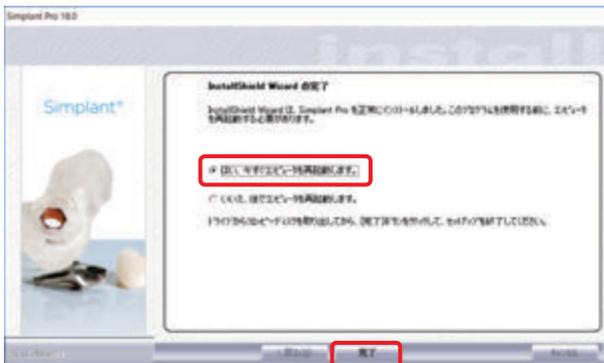


3. パスワード取得

PC 変更の場合は、テックサービスでのパスワード発行が必要です。【PC 変更の場合】をご参照ください。
 デスクトップ上のアイコン  をダブルクリックし Simplant Pro を起動します。

【インストールしたい PC がインターネットに接続されている場合】

- ① 「パスワードを申請する」の選択のまま、「次へ」をクリックします。
- ② 「オンラインを利用」の選択のまま、「次へ」をクリックします。

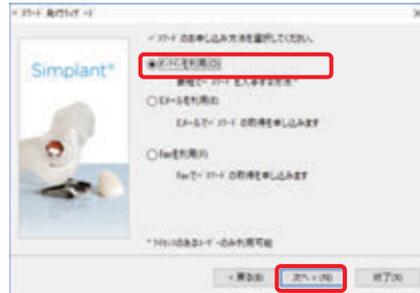

- ③ CCK 番号欄に「ユーザーID・パスワード・CCKKeyのご案内」の CCKKey 欄に記載された 4 桁区切り 16 文字の英数字を入力し、「次へ」をクリックします。



使用される英数字は
0123456789ABCD
EF
 ※英字の O オーは
 使用されません。

- ④ パスワード取得を待ち、正常に取得されたことを確認し、「終了」をクリックし終了します。



※注意※

パスワードが正常に取得できない場合は、以下の点をご確認いただき、再度、操作を行ってください。


- PC の日付と時刻（PC の画面右下 ）が正しく設定されているか。
- 正しいタイプ（Simplant Pro）、正しいバージョン（Ver18）をインストールしているか。
- 正しい CCKKey を入力しているか。

※複数ライセンスを所有し再導入される場合は、過去に導入した際の SystemID と CCKKey の組合せを合わせる必要があります。

- インターネットが正常に接続されているか。

【インストールしたい PC がインターネットに接続されていない場合】

- ① 「E メールまたは Fax で受け取ったパスワードを入力する」を選択し、「次へ」をクリックします。
- ② 画面中央の「システム ID」を確認します。

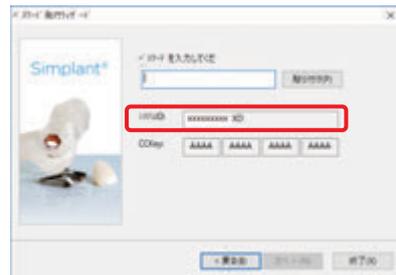


後で他の PC での入力が必要なので、メモする、テキストファイルに貼り付けるなどを、行ってください。

インターネットが接続された PC で、Yahoo!や Google などの検索エンジンを使って、「シムプラント」や「Simplant」を検索し、デンツプライシロナのシムプラントのページ(<https://www.dentsplysirona.com/ja-jp/explore/implantology/simplant.html>)を開き、下記の手順でパスワードを発行します。

- ③ シムプラントのページ内の「シムプラントソフトウェアダウンロード」をクリックし、手順 2 内の「パスワードを作成する」をクリックします。
- ④ 「ユーザーID・パスワード・CCKeyのご案内」の CCKey 欄に記載された 4 桁区切り 16 文字の英数字を入力し、「Search」または「検索」をクリックします。




- ⑤ ②で確認した「システム ID」とバージョン番号に「18」を入力し、「作成」をクリックします。
- ⑥ 「パスワードを作成しました」の下に表示されるパスワードを確認します。

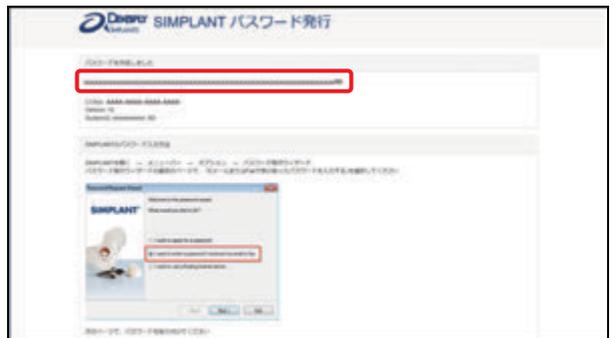

後でシムプラントが導入された PC での入力が必要なので、メモする、テキストファイルに貼り付けるなどを、行ってください。


シムプラントが導入された PC に戻り、他の PC で発行したパスワードを登録します。

- ⑦ ⑥で発行したパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。
- ⑧ 正常に登録されたことを確認し、「終了」をクリックし終了します。

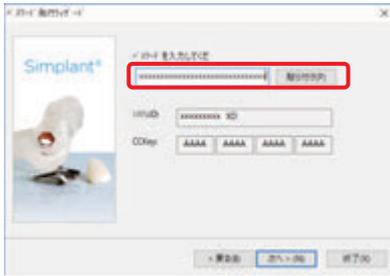

【PC 変更の場合】

- ① 「E メールまたは Fax で受け取ったパスワードを入力する」を選択し、「次へ」をクリックします。
- ② 画面中央の「システム ID」を確認します。

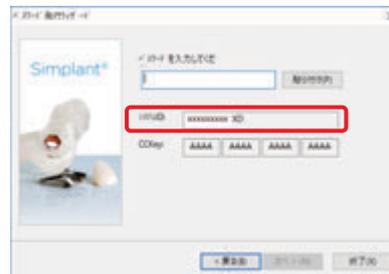

- ③ ②で確認した「システム ID」を、テックサービスへメールで送信し、パスワードの返信を待ちます。

送信先 : simplant-jp-service@dentsplysirona.com

件名 : PC 変更パスワード発行依頼

医院名、お名前、住所、電話番号

CCKey : AAAA-AAAA-AAAA-AAAA

変更前 PC のシステム ID : x x x x x x x x x XD

変更後 PC のシステム ID : x x x x x x x x x XD

※変更前 PC のシムプラントを起動し、メニュー「オプション>モジュール」で確認してください。

- ④ ③で受信したパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。
- ⑤ 正常に登録されたことを確認し、「終了」をクリックし終了します。




4. インプラントライブラリの設定

インプラントライブラリはアカウント毎の設定となります。シムプラント本体のインストールを、管理アカウントなど別アカウントで行った場合は、シムプラントを使用するユーザーアカウントへ切替えた後で、本作業を行ってください。

【インストールしたい PC がインターネットに接続されている場合】


デスクトップ上のアイコン  をダブルクリックし Simplant Pro を起動します。

- ① インプラントライブラリマネージャが開きます。使用するメーカーを、左側「利用可能なメーカー」より選択し、「追加」をクリックして、右側「インストールされている（される）メーカー」に表示されたことを確認後、「OK」をクリックして完了します。

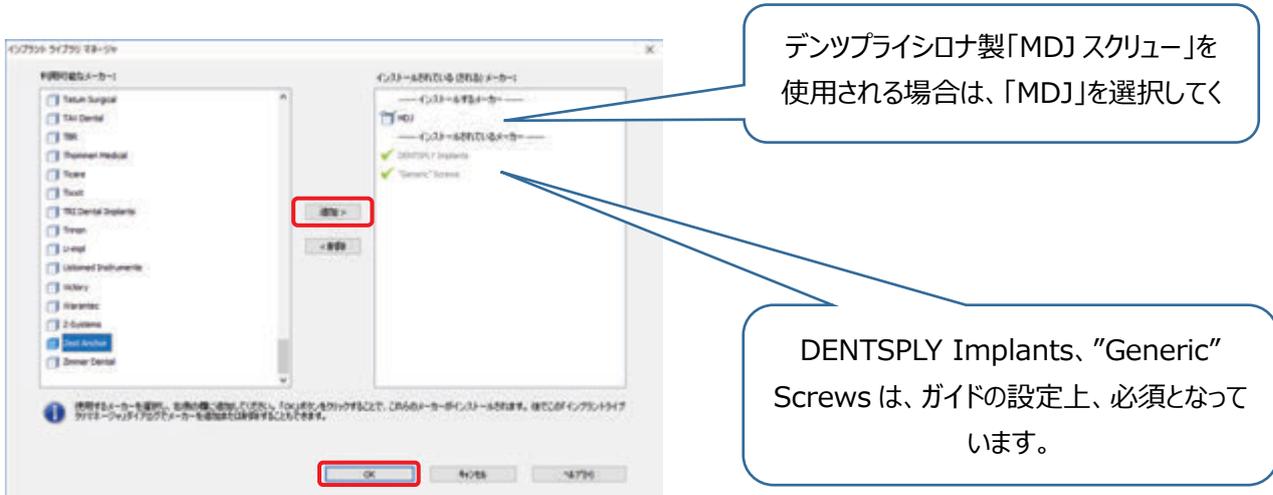

[Ctrl] を押しながら順に複数メーカーを左クリック、もしくは、1 メーカー選択後に [Shift] を押しながら更に 1 メーカーを左クリックで 2 メーカー間の全てを選択できます。

- ② 正常に完了したことを確認し、「OK」を押して終了します。

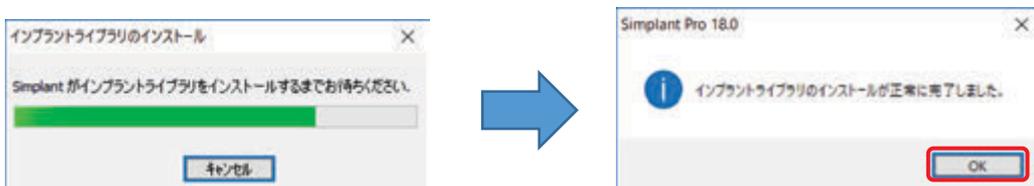


正常に完了しなかった場合は、メニュー「インプラント> インプラントライブラリマネージャ」を開き、①の作業を繰り返し行ってください。

【インストールしたい PC がインターネットに接続されていない場合】

インターネットが接続された PC で、Yahoo!や Google などの検索エンジンを使って、「シムプラント」や「Simplant」を検索し、デンツプライシロナのシムプラントのページ(<https://www.dentsplysirona.com/ja-jp/explore/implantology/simplant.html>)を開き、下記の手順でインプラントライブラリの設定準備を行います。


① シムプラントのページを開きます。

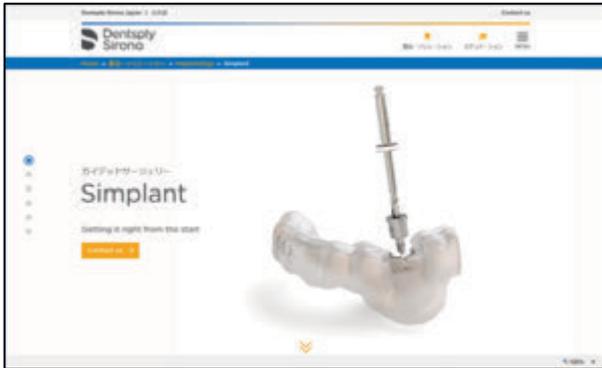


② 下方にスクロールし「ポータルサイト」をクリックします。




③ 右上「ヘルプ」をクリックします。

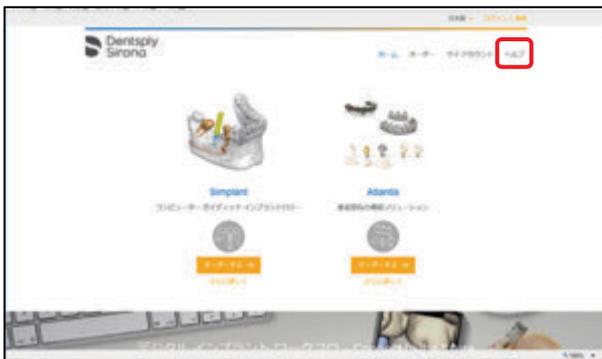


④ 左中央「シムプラント Pro 18.0」の「続行 →」をクリックします。

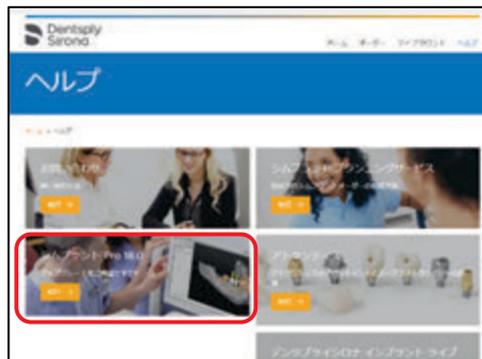


⑤ 「ここをクリックし Simplant Library Assistant をダウンロードします」をクリックし、「Simplant Library Assistant」をダウンロードします。

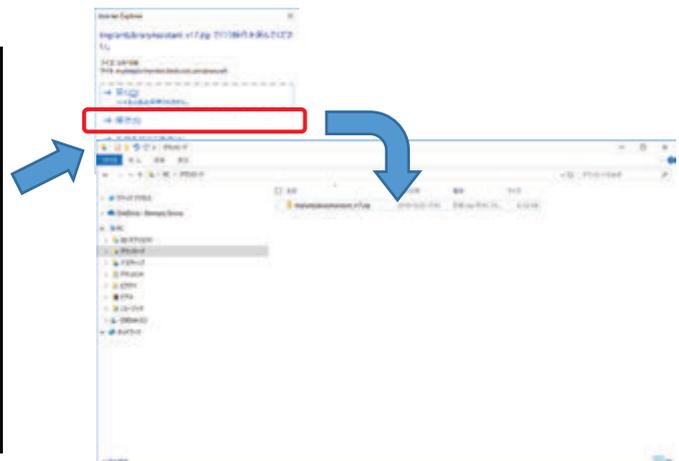


⑥ ⑤でダウンロードした ZIP ファイルを開き、デスクトップなどへ解凍します。

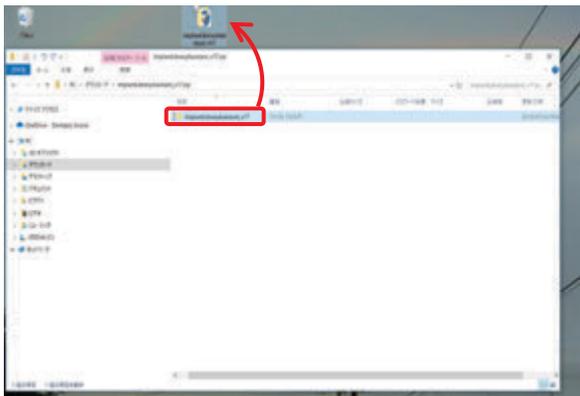


⑦ フォルダ
「ImplantLibraryAssistant_v17」をダブルクリックし開きます。
「ImplantLibraryAssistant.exe」を、ダブルクリックして実行します。

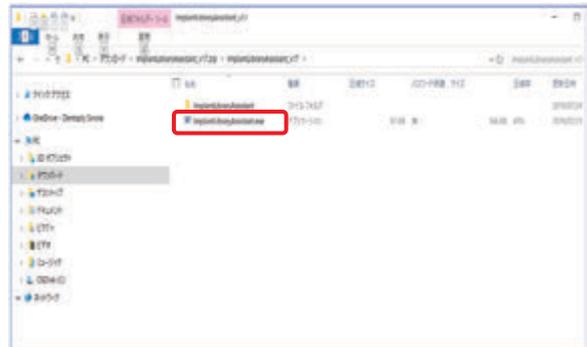



⑧ 「Download libraries from server」をクリックします。

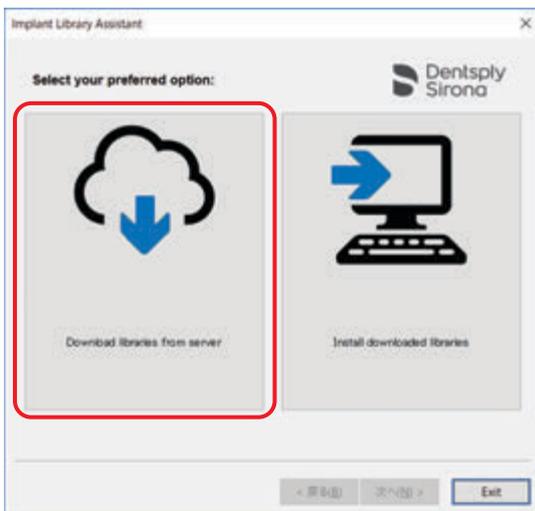

⑨ 設定したいメーカーにチェックを付け、「次へ」をクリックします。

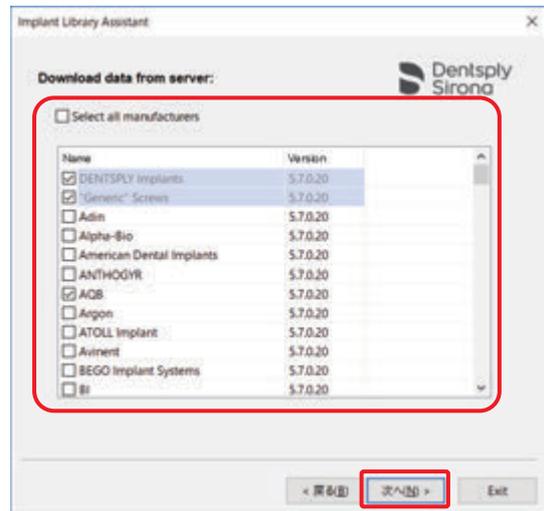


⑩ ダウンロードが正常に完了したことを確認し、「Exit」をクリックして終了します。

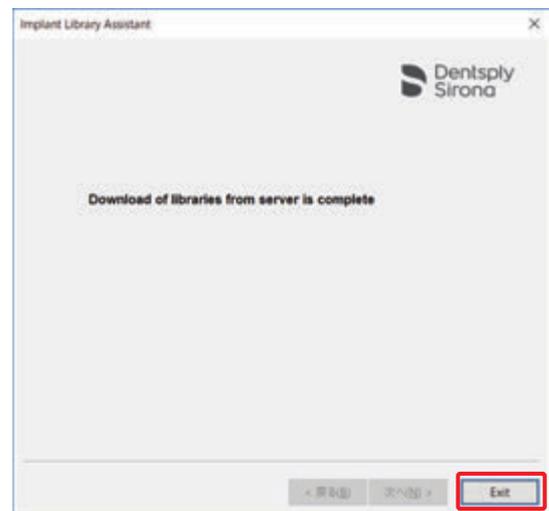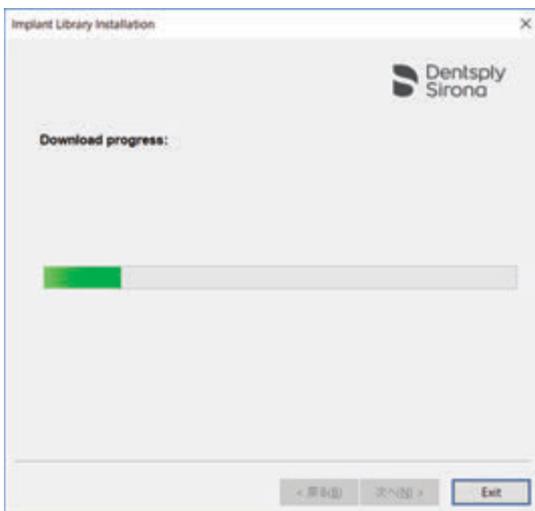


インターネット回線の状況により、ダウンロードが完了せずにエラーとなった場合は、本作業を再度行ってください。

⑪ フォルダ「data」が作成されたことを確認します。

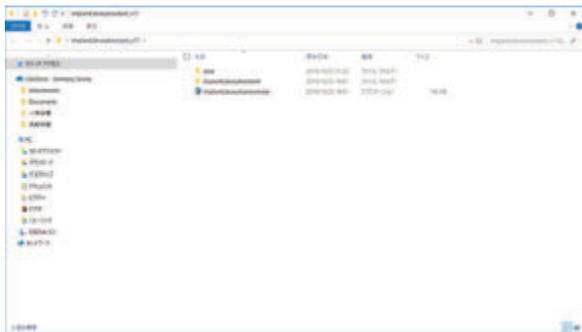


設定したいメーカーを追加したい場合は、フォルダ「data」を削除し、本作業を再度行ってください。

⑫ フォルダ「ImplantLibraryAssistant_v17」をUSBメモリなどにコピーします。

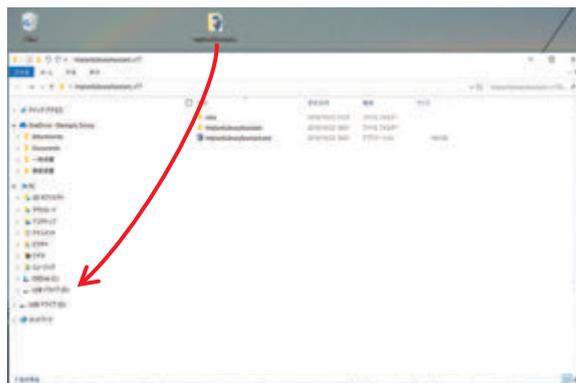


シムプラントを先にインストールした、インターネットに接続されていないPCに戻り、インプラントライブラリを設定します。


⑬ フォルダ「ImplantLibraryAssistant_v17」内の「ImplantLibraryAssistant.exe」をダブルクリックして実行します。

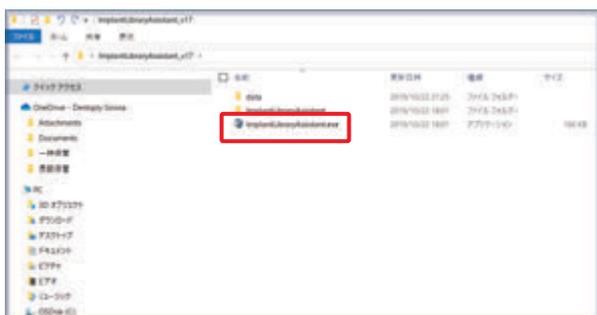

⑭ 「Install downloaded libraries」をクリックします。

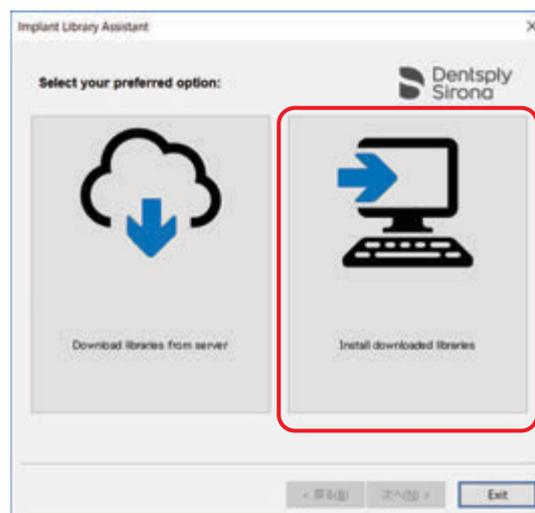


⑮ 「Simplant Pro 18.0」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

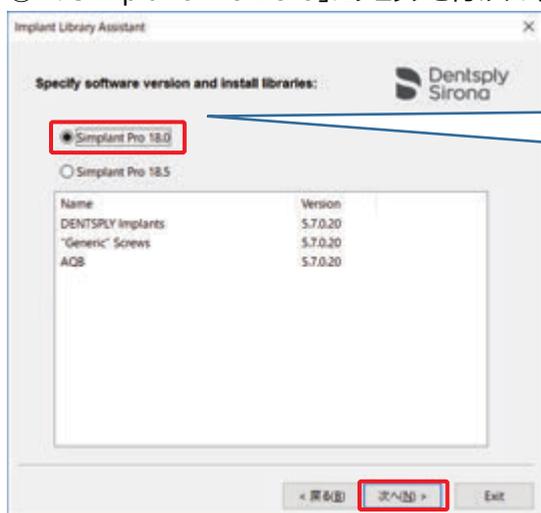

「Simplant Pro18.5」にチェックを付けたまま進めると、正常に設定されません。

⑯ ダウンロードが正常に完了したことを確認し、「Exit」をクリックして終了します。

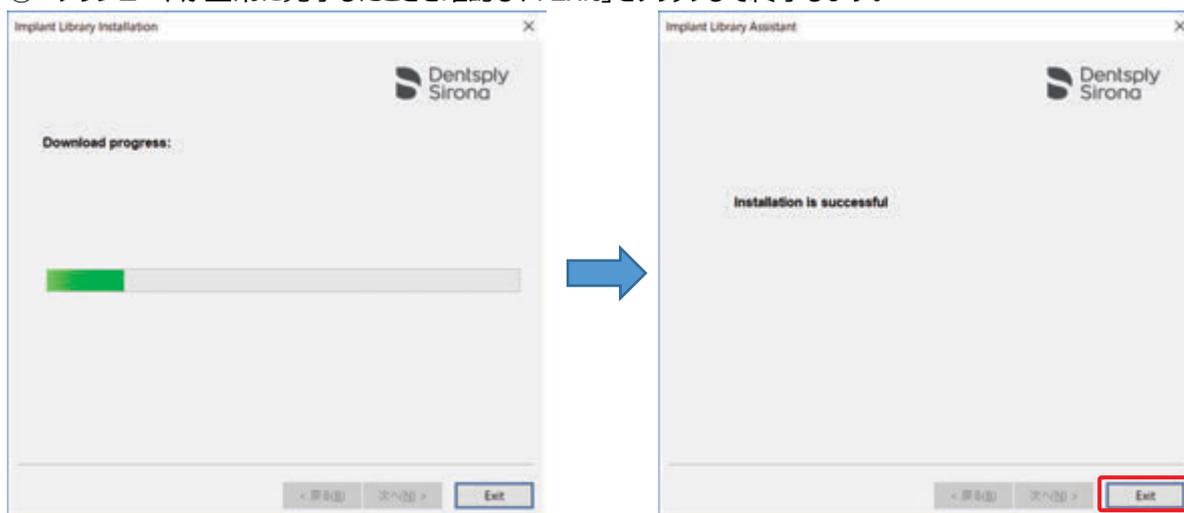

5. シムプラント必要機器構成

推奨	
CPU	Intel Core i5以上
グラフィック	AMD または NVIDIAの 専用グラフィックカード、DirectX 10.1 の完全準拠、1 GB のビデオメモリ
メモリ	4 GB 以上の RAM
スクリーン解像度	1440x900 以上の解像度
ハードディスク	20 GB 以上のハードディスク空き領域
ブラウザ	以下のいずれかのブラウザ Internet Explorer 11 Firefox 50 以降 Chrome 55 以降 Edge on Windows 10
OS	Microsoft Windows 7 SP1/10 64 ビット版
その他必要事項	インターネット接続 スクロール ボタン付きマウスおよびキーボード