

Aquasil Ultra

アクアジル ウルトラ

優れた親水性で細部の印象まで
確実にキャッチ



Ultra Wettable

超親水性

水分との馴染みが非常に高いため、歯肉縁下でも唾液や浸出液などの影響を受けにくく、縁下マージン部の気泡の巻き込みや流れ不足といった再印象のリスクを軽減します。



水との馴染みの良いウォッシュマテリアルが歯肉縁下の細部までしっかり流入します。




歯肉縁下にもしっかり入り込み、気泡の混入もなく印象が採れています。

Ultra Strong

超高強度

親水性によって細部まで流入した印象材がちぎれずに採れる強度を有しています。アクアジルウルトラ独自の架橋結合様式により、従来品に比べて高密度にシリコーンが重合してゆくため、引き裂き強度が強く、歯肉溝内や歯肉縁下マージンのような細部でもちぎれずにしっかりと再現します。

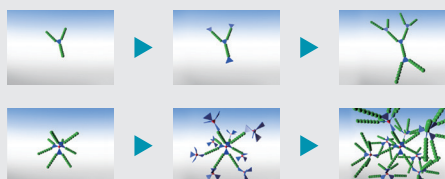

(図上) 弊社従来品：2次元的な架橋結合様式

(図下) アクアジルウルトラは4官能性シリコーンとの相乗作用により親水性や操作性を損なうことなく高い引き裂き強度を実現




細部もちぎれることなく縁下マージンが再現されています。


Ultra Forgiving

高い操作性

初期硬化までの操作余裕時間が長いため、全顎印象などの大きなケースにおいてもトレーマテリアルの圧接のタイミングが合わせやすい設計になっています。トレーマテリアルとウォッシュマテリアルが良好に馴染み、精度の高い印象採得が可能です。

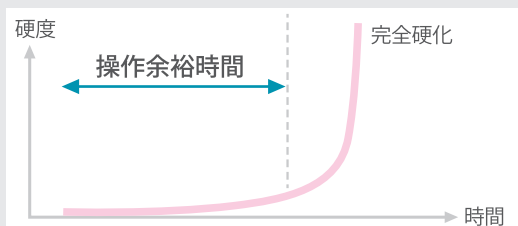

初期硬化までの操作余裕時間が長く余裕を持って操作できます。

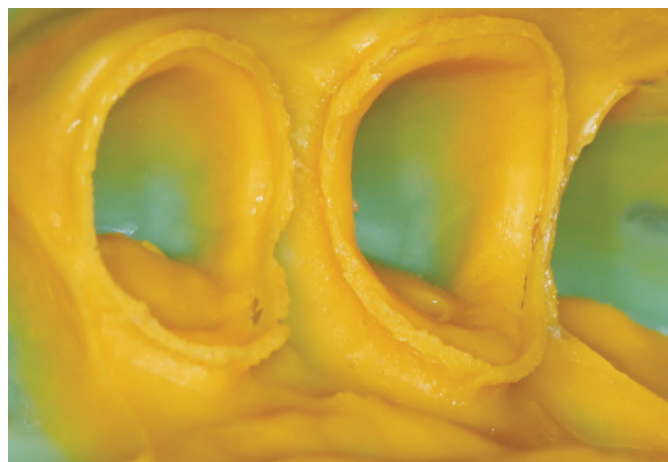

支台歯の印象。内面でトレーマテリアルとウォッシュマテリアルが馴染んでいる様子が確認できます。

写真提供：内山徹哉先生（東京都開業）



Delivery Option

Digit

シリンジに移し変える事なく使用できるデリバリー、アクアジルウルトラ digit。カートリッジよりもアクセスしやすく、シリンジ感覚で狙った部位に印象材を注入できます。



S サイズ 約 2～3 歯程度 / L サイズ 約 4～5 歯程度
(ミキシングチップ・口腔内注入用チップ込み)



使用量に応じた 2 種類の使い切りサイズにチップが付属。印象 1 回にかかる材料コストは、カートリッジと比較すると無駄が無く、低コストで使用することが出来ます。


B4

印象採得前に界面活性剤 B4 を使用することにより、さらに細部に入りやすく、容易に撤去することが可能になります。

*B4 単体での販売はございません。



B4 未処理

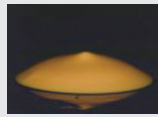

B4 処理



(写真上) 乾燥象牙質やレジンのようなヌレ性の低い部位に塗布することで被印象面のヌレ性が高まり、流入不足や気泡混入なく印象をとることが可能です。

(写真下) B4 の処置により歯牙の表面のヌレ性が高まりウォッシュマテリアルが馴染んでいる様子。

Duomix II & DECA

自動練和により均質な印象材を築盛できます。また、短時間 (全顎トレー約 20 秒)* で築盛できるため、トレーマテリアル圧接のタイミングも合わせやすくなります。

* ターボモード使用の場合



Product Lineup & Usage

種類・色調	トレー用				ウォッシュ用	
	パテ	リジット	ヘビー	モノフェーズ	LV	XLV
硬さ						
流動性	-	低い	やや低い	普通	高い	非常に高い
症例						
クラウン・インレー等	○	○	◎	○	◎	◎
ブリッジ	○	○	◎	○	◎	◎
デンチャー	○	○	○	◎ (無歯顎印象等)	◎ (有歯顎印象等)	◎ (咬座印象等)
インプラント	○	○	◎	○	◎	◎
操作余裕時間	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒
口腔内保持時間	約30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒



アクアジル ウルトラ

商品番号	商品名	価格
678171	アクアジル ウルトラ B4 イントロキット モノフェーズ	9,800 円
678173	アクアジル ウルトラ B4 イントロキット リジット	9,800 円
678175	アクアジル ウルトラ B4 イントロキット ヘビー	9,800 円
内容	<ul style="list-style-type: none"> ●モノフェーズ/リジット/ヘビー (ベース及びキャタリスト: 50ml): 2 個 ●XLV、LV: 各1 個 ●ミキシングチップ: 12 本 ●digit XLV: ラージ1 個 スモール2 個 ●digit LV: ラージ1 個 スモール2 個 ●digit ミキシングチップ: 6 個 ●digit シリンジディスペンサー: 1 本 ●digit 口腔内注入用チップ: 6 個 ●トレードヒューズ(14ml): 1 個 ●アプリケーターチップ: 50 本 ●ダッペンディッシュ: 1 個 ●B4(6ml) 	



各プロダクト(単品)

商品番号	商品名	価格
678768J	アクアジル ウルトラ XLV RS 単品	9,600 円
678140J	アクアジル ウルトラ XLV RS 単品: B4 入	12,000 円
678771J	アクアジル ウルトラ LV RS 単品	9,600 円
678130J	アクアジル ウルトラ LV RS 単品: B4 入	12,000 円
678773J	アクアジル ウルトラ モノフェーズ RS 単品	9,600 円
678775J	アクアジル ウルトラ ヘビー RS 単品	9,600 円
678777J	アクアジル ウルトラ リジット RS 単品	9,600 円
内容	<ul style="list-style-type: none"> ●XLV / LV (ベース及びキャタリスト: 50ml): 4 個 ●ミキシングチップ L: 12 本 *B4 入【B4(6ml)/アプリケーターチップ: 50 本 / ダッペンディッシュ: 1 個】 	



アクアジル ウルトラ digit

商品番号	商品名	価格
678040	アクアジル ウルトラ digit LV (S)	12,000 円
678240	アクアジル ウルトラ digit LV (S): B4 入	14,400 円
678041	アクアジル ウルトラ digit LV (L)	14,000 円
678241	アクアジル ウルトラ digit LV (L): B4 入	16,400 円
678043	アクアジル ウルトラ digit XLV (S)	12,000 円
678242	アクアジル ウルトラ digit XLV (S): B4 入	14,400 円
678044	アクアジル ウルトラ digit XLV (L)	14,000 円
678243	アクアジル ウルトラ digit XLV (L): B4 入	16,400 円
内容	<ul style="list-style-type: none"> ●digit LV (S / L) / digit XLV (S / L) (ベース及びキャタリスト S: 1.6ml / L: 2.4ml): 50 個 ●digit ミキシングチップ: 50 個 ●digit 口腔内注入用チップ: 50 個 *B4 入【B4(6ml)/アプリケーターチップ: 50 本 / ダッペンディッシュ: 1 個】 	



アクアジル イージーミックスパテ

商品番号	商品名	価格
678120	アクアジル イージーミックスパテ	7,500 円
内容	<ul style="list-style-type: none"> ●ベース (320ml) ●キャタリスト (320ml) ●計量スプーン: 2 個 	



アクアジル ウルトラ DECA

商品番号	商品名	価格
678782J	アクアジル ウルトラ DECA モノフェーズ RS	22,000 円
678784J	アクアジル ウルトラ DECA ヘビー RS	22,000 円
内容	<ul style="list-style-type: none"> ●DECA モノフェーズ / DECA ヘビー (ベース及びキャタリスト: 380ml): 2 個 ●DECA ミキシングチップ: 20 個 ●ロッキングリング: 1 個 	



デュオミックス 2

関連商品		
商品番号	商品名	価格
678020	digit シリンジディスペンサー: 2 本入	2,000 円
678003	digit ミキシングチップリフィル: 50 個入	3,800 円
678006	digit 口腔内注入用チップ: 50 個入	1,800 円
678950	DECA ミキシングチップ: 50 入	5,000 円
2761003000	デュオミックス 2 (印象自動練和器): 1 台	130,800 円

販売名: アクアジル ウルトラ 一般的名称: 歯科用シリコーン印象材 医療機器認証番号: 221AFBZX00079000 クラス分類: クラスII (管理医療機器)
販売名: デュオミックス 2 一般的名称: 歯科用印象材混和器 医療機器届出番号: 13B1X10236Y03500 クラス分類: クラスI (一般医療機器)

*表示価格は、2017 年 10 月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布信成ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<http://www.dentsply-sankin.com>