



ceram.x[®] SphereTEC[™] one


Universal Nano-Ceramic Restorative
セラメックススフィアテックワン

5色のシェードで VITA16色をカバーするため色あわせが簡単


- ・高い賦形性で思いどおりの形態を付与
- ・高い研磨性により短時間で光沢を獲得

シンプルなシェードシステムで色あわせが簡単

セラメックス スフィアテック ワンは、独自のクラウドシェードコンセプト*に基づいてシェード設計され、少ない本数でも多くのシェードに適合しやすくなっています。また、フィラーとレジンマトリックスの屈折率をあわせることによりカメレオン効果を発揮し、1本のシェードで複数のVITA シェードをカバーするため、わずか5本のシェードでVITA16 シェードが100% カバーされます。例えば、A3 シェードは VITA A3, C2, D3, D4 の4色に適合します。

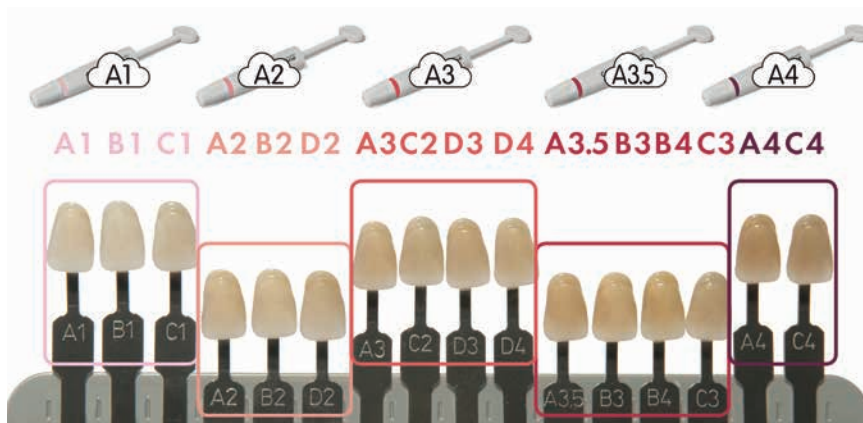

*クラウドシェードコンセプトとは、VITA シェードの近似した色相をひとつのまとまり（クラウド）として新たに分類したセラメックス独自のシェードコンセプトです。

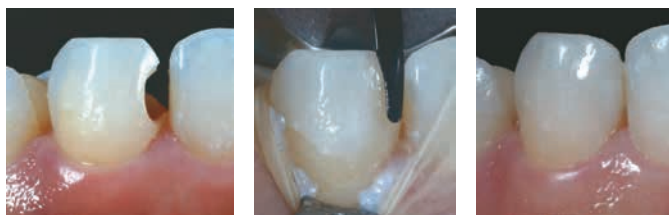


測色時 B1 であった症例にセラメックスの A1 を充填した症例。充填痕もなく馴染んでいる。

写真提供 北原信也 先生

新しいスフィアテック フィラーがもたらす快適な操作感


セラメックス スフィアテック ワンは粒状フィルター技術により、微細なサブミクロンフィラーから 3.5 ~ 15 μ m の真球状のフィラーに造粒しました。このスフィアテック フィラーの配合により、メリハリのある操作感、器具へのべたつきの抑止、優れた研磨性を実現しています。

スフィアテック フィラーとは？

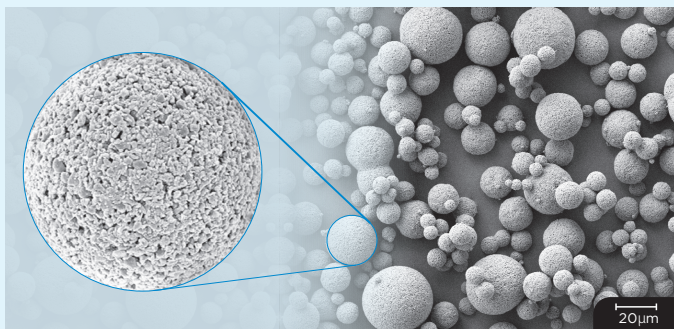

平均 0.6 μ m の微細なサブミクロンフィラーから噴霧顆粒法で得られたスフィアテック フィラーの表面性状。

メリハリのある操作感!

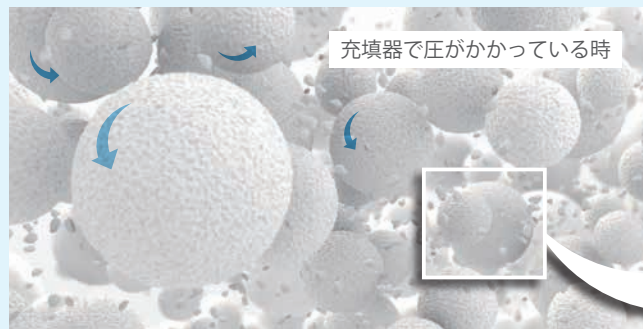

充填時に力を加えると、スフィアテック フィラーがボールが転がるような働きをし、わずかな力で賦形が可能です。

賦形性が高く、形態付与も思いのまま


チクソトロピー性が高く、充填操作中は適度な流動性があるものの、インスツルメントを離すとそのままの形が留まることによって賦形した状態を維持し、複雑な形態も再現しやすくなります。咬頭部や隆線、列溝など臼歯部における細かな賦形もストレスなく行えます。



写真提供 鷲野 崇先生


短時間で光沢が得られる優れた研磨性

スフィアテック フィラーは平均 $0.6 \mu\text{m}$ のサブミクロンフィラーにより造粒された真球状フィラーのため、研磨時には研磨材が当たった部分の微細なフィラーのみが研削され、短時間で光沢が得られます。

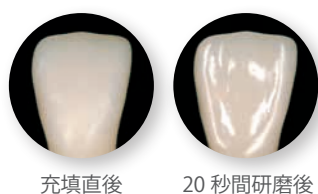

充填直後

20 秒間研磨後

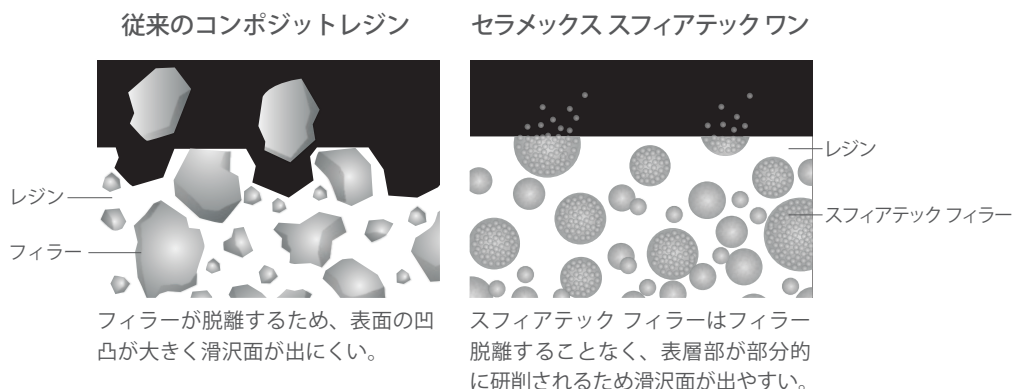

従来コンポジットレジジン

セラメックス スフィアテックワン

レジン

フィラー

フィラーが脱離するため、表面の凹凸が大きく滑沢面が出にくい。

レジン

スフィアテックフィラー

スフィアテック フィラーはフィラー脱離することなく、表層部が部分的に研削されるため滑沢面が出やすい。

User's Voice

セラメックス スフィアテック ワンを臨床で取り入れた先生方のコメントが動画でご覧いただけます。



vol.1 鷲野 崇先生



vol.2 大谷 一紀先生

インスツルメントにべたつきにくい！

レジンモノマー



充填器で圧がかかっていない時

stop

力が加わっていない状態の時には、サブミクロンフィラーがスフィアテック フィラーの転がりを抑止する働きをする事で形態を保ち、垂れずにとどまります。

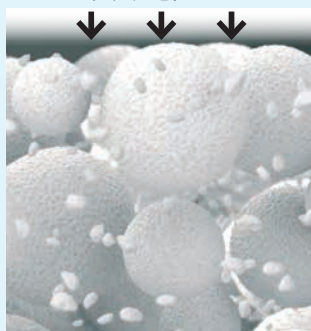


図1

べたつきの要素となるレジンモノマーは、多孔性のスフィアテックフィラー内に含まれる事で(図2)表層に出にくくなるため、充填時のべたつきを抑えます。

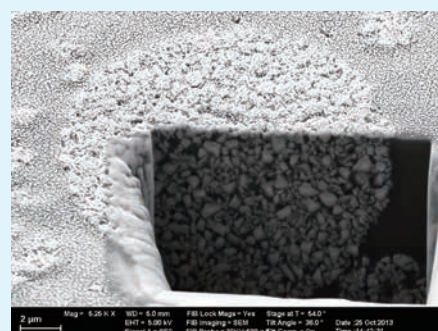


図2

セラメックス スフィアテックワン 各 3.0g 入

商品番号	商品名	標準価格
60701621	セラメックス スフィアテックワン A1 (VITA A1; B1; C1)	3,780 円
60701622	セラメックス スフィアテックワン A2 (VITA A2; B2; D2)	3,780 円
60701623	セラメックス スフィアテックワン A3 (VITA A3; C2; D3; D4)	3,780 円
60701625	セラメックス スフィアテックワン A3.5 (VITA A3.5; B3; B43; C3)	3,780 円
60701624	セラメックス スフィアテックワン A4 (VITA A4; C4)	3,780 円
60701564	セラメックス スフィアテックワンシェードガイド	3,780 円



プライム&ボンド ユニバーサル

商品番号	商品名	標準価格
60667350	プライム&ボンド ユニバーサル 4.0ml	11,440 円
60667350ST	プライム&ボンド ユニバーサル スターターキット	13,420 円
60667350WP	プライム&ボンド ユニバーサル ダブルパック	20,590 円
60667346	クリックスティッシュ 3 個入	2,500 円

関連製品

商品番号	商品名	標準価格
662010Y	POGO (ポリッシュ&ゴー) ディスク 30 本	19,170 円
662022Y	POGO (ポリッシュ&ゴー) ポイント 30 本	19,170 円
662023Y	POGO (ポリッシュ&ゴー) カップ 30 本	19,170 円
662025Y	POGO (ポリッシュ&ゴー) アソート 30 本	19,170 円
403338	V4 クリアメタルスターターパック	64,800 円
403339	V4 クリアメタルアップグレードパック	52,920 円
60603002	SDR	4,600 円
60603003	SDR エコパック	12,170 円
644400	スマートライト Pro イントロキット	216,000 円

販売名	一般的名称	届出・認証番号	クラス分類
セラメックス ST One	歯科充填用コンポジットレジン	229AGBZX00070000	II (管理医療機器)
プライム&ボンド ユニバーサル	歯科用象牙質接着材 (歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、歯科用シーリング・コーティング材)	230AGBZX00043000	II (管理医療機器)
POGO (ポリッシュ & ゴー)	歯科用ゴム製研磨材	13B1X10236Y00420	I (一般医療機器)
V4 システム	歯科充填・修復材補助器具	13B1X10236Y03920	I (一般医療機器)
エスディーアール	歯科充填用コンポジットレジン	223AFBZX00008000	II (管理医療機器)
スマートライト Pro	歯科重合用光照射器 (汎用歯科用照明器)	13B1X10236Y04390	I (一般・特管)

*表示価格は、2022年4月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

www.dentsplysirona.com