

仕様

- | | | | |
|-----------|-------------------------|----------|--------------------|
| ■ 寸法 | L240mm×W31mm | ■ 充電時間 | 最大3時間 |
| ■ 重量(照射器) | 90g | ■ 電圧・周波数 | 100-240VAC 50/60Hz |
| ■ 波長域 | 460-490nm | ■ 照射可能時間 | 40分(完全充電時) |
| ■ 出力 | 1,000mW/cm ² | ■ バッテリー | LSDバッテリー(低自己放電型電池) |
| ■ 照射口径 | 約10mm | | |

製品一覧



製品コード：64450020
スマートライト FOCUS イントロキット
 標準価格：149,040円

スマートライト FOCUS リフィル	1個
スマートライト FOCUS 用バッテリー	1個
スマートライト FOCUS 用スリーブ	300枚
スマートライト FOCUS 用シールド	5個
スマートライト FOCUS 用充電器	1個
スマートライト FOCUS 用アダプター	1個



製品コード：64450021
**スマートライト FOCUS 用
 バッテリー**
 標準価格：16,000円



製品コード：64450040
**スマートライト FOCUS 用
 シールド (5個入)**
 標準価格：7,780円



製品コード：64450030
**スマートライト FOCUS 用
 スリーブ (300枚入)**
 標準価格：5,180円



製品コード：64450050
**スマートライト FOCUS 用
 ACアダプター (1個)**
 標準価格：8,000円



製品コード：64450050
**スマートライト FOCUS 用
 充電器 (1個)**
 標準価格：18,000円

販売名：スマートライト FOCUS 一般的名称：歯科重合用光照射器 医療機器届出番号：13B1X10236Y03870 クラス分類：クラスI(一般医療機器) 特定保守管理医療機器

*表示価格は、2022年4月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元
デンツプライシロナ株式会社

カスタマーサービス
 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)
 ☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659
www.dentsplysirona.com

SmartLite® FOCUS

スマートライト フォーカス

軽くてシンプルな操作性と使いやすさに
 フォーカスした『ペンタイプLED照射器』です。

- ・軽くて持ちやすい
- ・臼歯部にも当てやすい
- ・照射時に熱くならない
- ・照射光が減衰しにくい
- ・ボタン操作がカンタン



軽くてシンプルな操作性と使いやすさにフォーカスした『ペンタイプLED照射器』です。



軽くて持ちやすい

重さわずか90gと軽く、手にフィットしやすい設計のため、照射中に手振れすることなく誰でもカンタンに扱えます。

重量わずか


90g

スリムな形状で臼歯部にも当てやすい

スリーブがストレートで、ヘッドもコンパクトなため、お子様や開口量の少ない患者さんの臼歯部にも当てやすいデザインです。また、スリーブは330°回転しますので口腔内のどの部位にも無理なく光を当てることができます。

330°

先端は330°
回転可能

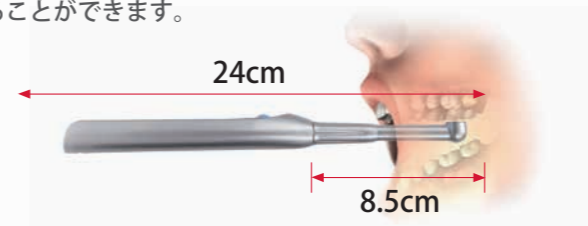

照射時に、熱くならない

照射時に発生する熱を、本体側に逃がすように設計されているため、歯肉付近の照射や、有髄歯への刺激など患者さんへ負担をかけずにご使用いただけます。

熱の流れ




照射距離が離れても減衰しにくい

光直進性が高く、窩底部やレジンコアなど照射距離があいてしまうような症例でも光量を保ったままの照射が可能です。



スマートライト FOCUS

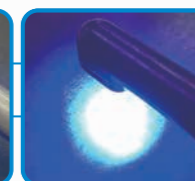

当社従来品

ボタン操作が簡単で迷わない

照射モードの選択や、時間設定などの複雑な設定は必要ありません。ボタンはひとつだけ、一度押しと照射がスタートし、もう一度押しと止まるので任意の時間で照射時間を設定できます。最大で20秒までの照射が可能です。


1 Touch



■ バッテリーパックは、歯科医院で交換可能

■ 最短10分で急速充電可能*

*バッテリー切れ、残量が少ない時は、5分で使用できる容量まで自動で急速充電されます。

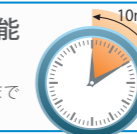

バッテリー交換が必要な際も、機器を預けずに交換できます

