

NEW



ceram.x<sup>®</sup> SphereTEC<sup>™</sup> one  
Universal Nano-Ceramic Restorative  
セラメックススフィアテックワン

5色のシェードで VITA16 色をカバーするため色あわせが簡単


- ・高い賦形性で思いどおりの形態を付与
- ・高い研磨性により短時間で光沢を獲得

## 5色のシェードシステムで色あわせが簡単

セラメックス スフィアテック ワンは、独自のクラウドシェードコンセプト\*に基づいてシェード設計され、少ない本数でも多くのシェードに適合しやすくなっています。また、フィラーとレジンマトリックスの屈折率をあわせることによりカメレオン効果を発揮し、1本のシェードで複数のVITAシェードをカバーするため、わずか5本のシェードでVITA16シェードが100%カバーされます。例えば、A3シェードはVITA A3, C2, D3, D4の4色に適合します。



\*クラウドシェードコンセプトとは、VITAシェードの近似した色相をひとつのまとまり（クラウド）として新たに分類したセラメックス独自のシェードコンセプトです。

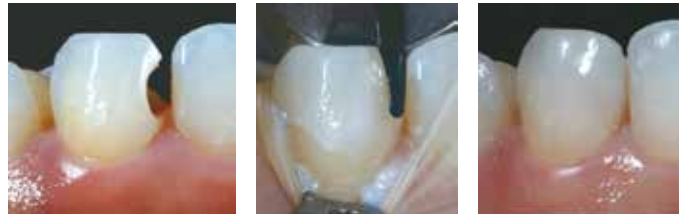


測色時 B1 であった症例にセラメックスの A1 を充填した症例。充填痕もなく馴染んでいる。

写真提供 北原信也 先生

## 新しいスフィアテック フィラーがもたらす快適な操作感


セラメックス スフィアテック ワンは粒状フィルター技術により、微細なサブミクロンフィラーから3.5～15 $\mu$ mの真球状のフィラーに造粒しました。このスフィアテック フィラーの配合により、メリハリのある操作感、器具へのべたつきの抑止、優れた研磨性を実現しています。

### スフィアテック フィラーとは？

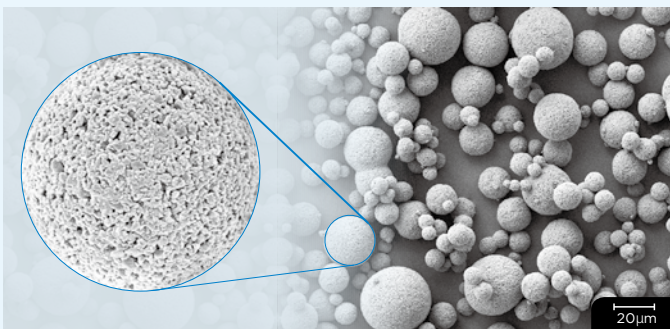

平均0.6 $\mu$ mの微細なサブミクロンフィラーから噴霧顆粒法で得られたスフィアテック フィラーの表面性状。


### メリハリのある操作感!

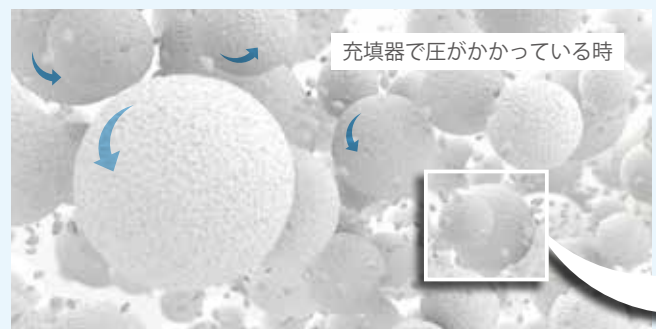

充填時に力を加えると、スフィアテック フィラーがボールが転がるような動きをし、わずかな力で賦形が可能です。

## 賦形性が高く、形態付与も思いのまま


チクソトロピー性が高く、充填操作中は適度な流動性があるものの、インスツルメントを離すとそのままの形が留まることによって賦形した状態を維持し、複雑な形態も再現しやすくなります。咬頭部や隆線、列溝など臼歯部における細かな賦形もストレスなく行えます。

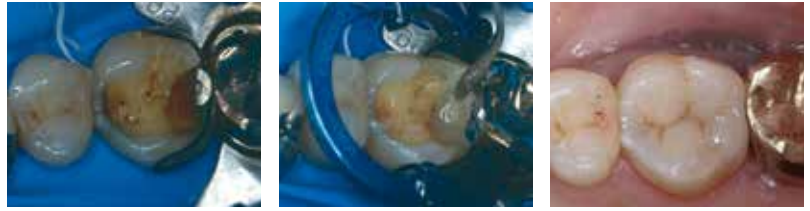

写真提供 鷲野 崇 先生

## 短時間で光沢が得られる優れた研磨性

スフィアテック フィラーは平均 0.6  $\mu\text{m}$  のサブミクロンフィラーにより造粒された真球状フィラーのため、研磨時には研磨材が当たった部分の微細なフィラーのみが研削され、短時間で光沢が得られます。

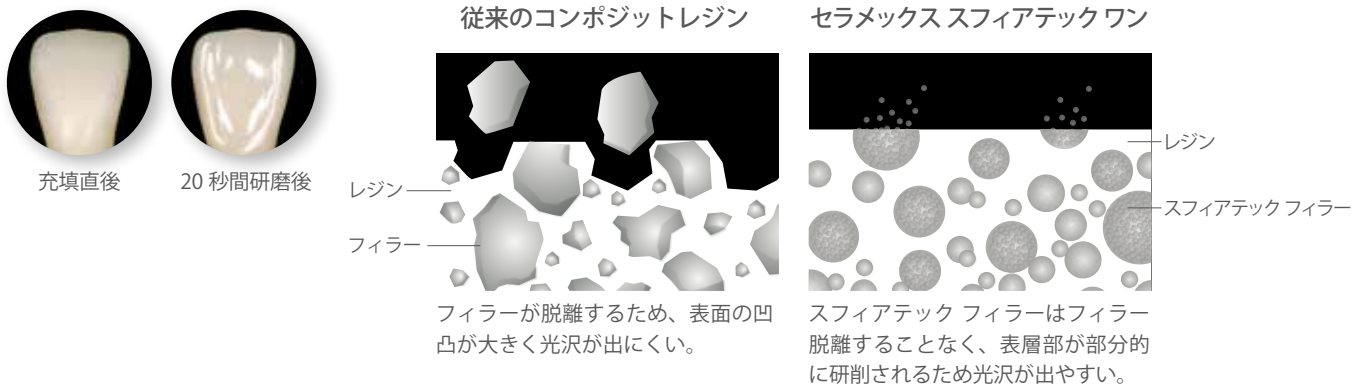

## User's Voice

セラメックス スフィアテック ワンを臨床で取り入れた先生方のコメントが動画でご覧いただけます。



vol.1 鷲野 崇 先生



vol.2 大谷 一紀 先生

## インスツルメントにべたつきにくい！

レジンモノマー



力が加わっていない状態の時には、サブミクロンフィラーがスフィアテック フィラーの転がりを抑止する働きをする事で形態を保ち、垂れずにとどまります。

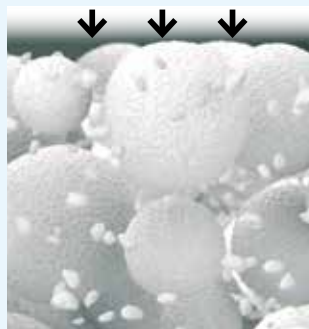


図 1

べたつきの要素となるレジンモノマーは、多孔性のスフィアテックフィラー内に含まれる事で (図 2) 表層に出にくくなるため、充填時のべたつきを抑えます。

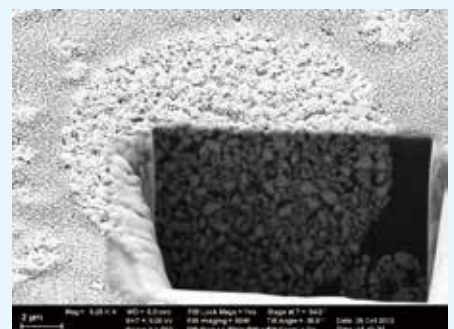


図 2

## セラメックス スフィアテックワン 各 3.0g 入

商品番号	商品名	価格
60701621	セラメックス スフィアテックワン A1 (VITA A1; B1; C1)	3,500 円
60701622	セラメックス スフィアテックワン A2 (VITA A2; B2; D2)	3,500 円
60701623	セラメックス スフィアテックワン A3 (VITA A3; C2; D3; D4)	3,500 円
60701625	セラメックス スフィアテックワン A3.5 (VITA A3.5; B3; B4; C3)	3,500 円
60701624	セラメックス スフィアテックワン A4 (VITA A4; C4)	3,500 円
60701564	セラメックス スフィアテックワンシェードガイド	3,500 円



## プライム&ボンド ユニバーサル

商品番号	商品名	価格
60667350	プライム&ボンド ユニバーサル 4.0ml	11,000 円
60667350ST	プライム&ボンド ユニバーサル スターターキット	12,900 円
60667346	クリックスディッシュ 3 個入	2,400 円

## 関連製品

商品番号	商品名	価格
662010Y	POGO (ポリッシュ&ゴー) ディスク 30 本	17,750 円
662022Y	POGO (ポリッシュ&ゴー) ポイント 30 本	17,750 円
662023Y	POGO (ポリッシュ&ゴー) カップ 30 本	17,750 円
662025Y	POGO (ポリッシュ&ゴー) アソート 30 本	17,750 円
403338	V4 クリアメタルスターターパック	60,000 円
403339	V4 クリアメタルアップグレードパック	49,000 円
60603002	SDR	4,260 円
60603003	SDR エコパック	11,270 円
64450020	スマートライト FOCUS イントロキット	138,000 円

販売名	一般的名称	届出・認証番号	クラス分類
セラメックス ST One	歯科充填用コンポジットレジン	229AGBZX00070000	II (管理医療機器)
プライム&ボンド ユニバーサル	歯科用象牙質接着材	230AGBZX00043000	II (管理医療機器)
POGO (ポリッシュ & ゴー)	歯科用ゴム製研磨材	13B1X10236Y00420	I (一般医療機器)
V4 システム	歯科充填・修復材補助器具	13B1X10236Y03920	I (一般医療機器)
エスディーアール	歯科充填用コンポジットレジン	223AFBZX00008000	II (管理医療機器)
スマートライト FOCUS	歯科重合用光照射器	13B1X10236Y03870	I (一般医療機器)

\*表示価格は、2018年6月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 \*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<http://www.dentsply-sankin.com>