

Aquasil Ultra User's voice

内山歯科クリニック
院長 内山 徹哉 先生

初期硬化までの作業時間が取れるので、
ボディとインジェクションのなじみがすごく良い。
Aquasil Ultra

アクアジルを導入されたきっかけ は何ですか？

以前の勤務先がアクアジルを使用していて、実際に使ってみて結構いいなと思って使い始めたのがきっかけです。開業後もさまざまな印象材を試したのですが、その中でも総合的に高い平均点を安定して出す印象材として残ったのがアクアジルです。

いろいろなシリコーン印象材がありますが、 良し悪しの判断はどんなところが 基準になりますか？

私は有歯顎の症例が多いのですが、クラウンやインレーの印象においてはボディとインジェクションのなじみが非常に大事だと思っています。口腔内でインジェクションを流す作業をしている間に固まりはじめてしまうものもあります。また、ボディとインジェクションがうまく馴染まないケースもあります。そうするとその境目にしわができたり、微妙な変形が起きたりして、印象の採り直しや場合によっては再製しなければならないこともあるので、やはりなじみの良さは重要ですね。

あとは、ペーストの状態でのボディとインジェクションの硬さの調和です。これは感覚的な意見になってしまいますが、ボディとインジェクションのペーストの状態でも硬さにあまり差が無ければ、歪みも出にくくエラー無く採れるものじゃないかなと思っています。



現在、アクアジルをご使用いただ いていますが、気に入っているポイント はどんな点ですか？

まずは、初期硬化までの作業時間がそこそと取れるので操作性が良く、ボディとインジェクションのなじみがすごく良いという点が好きですね。


例えば、写真①のようにボディとインジェクションの色が馴染んでグラデーションになっていますが、なじみの悪い印象材だとはなりません。次にペースト状態でのボディとインジェクションの硬さのバランスが硬すぎず、柔らかすぎずちょうど良いという点です。特にインジェクションのほど良い粘り具合は非常に気に入っています。あとは硬化した後の強度が強い点です。

マージンの部分はすごく細くなるので、すぐに切れてしまったりは困りますよね。写真②のように撤去時にこの部分がちぎれないで居座ってくれているというのも大きなポイントです。

この3つに加えて、アクアジルは値段もそれほど高くないので、そこも魅力のひとつだと思います。私の場合はかなり数量を使いますので。そういう意味では材料としての総合力が非常に高いと思います。



写真①

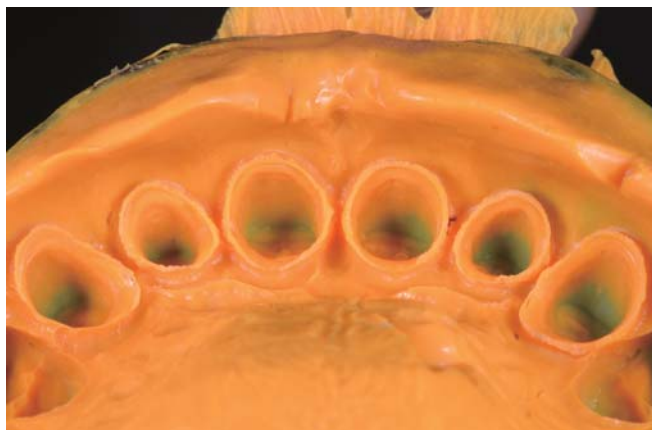

写真②

印象を採る際にはどんな工夫をされていますか？

私の場合は、自動練和器をずっと使っているのですが、精度の良い印象を採るために、圧接のタイミングをかなりシビアに合わせています。例えば、印象の際には最初にスタッフと声を掛け合い、トレーマテリアルを担当するスタッフには、練り初めからトレーに半分まで盛られた時点で声に出して言ってもらうようにしています。

ご用命は

そしてトレーマテリアルが準備できた時には口腔内へのウォッシュマテリアルの填入が完了していて、できるだけ時間をあけずにジャストタイミングで圧接できるようにしています。

自費の場合は求められることも大きいですし、遠方の患者さんもらっしやるため再印象のためにもう一度というわけにはなかなか行きません。できるだけ1回で済むようにバックアップ印象をとって、良い方を使うようにしています。

精度の高い補綴物を作るうえで大切な事はどんな点だと思いますか？

最近思うのは、不適合で再製となるケースにはドクター側の印象が原因によるものもあるんじゃないかな、という事です。技工士は印象が悪いとは立場的に言えませんので、多少悪くてもやむを得ず作っているケースが世の中には意外にあると思います。私も以前は、再製となった際に、こんなに一生懸命印象を採っているのに・・・という思いがありましたが、そうではなかったと最近気付きました。今一緒にやっている技工士は対等な関係を構築しているので、こちらが頑張っても印象を採って出しても、悪い時は指摘されますし、それを受けて再印象をとるケースもあります。印象の状態でマージンがどうか、縁下がでているか、段差が無いかなどは見た目にはわかりますが、目に見えていない小さな誤差や歪みは石膏模型にならないとわからない場合もあります。なので、技工士による印象の良し悪しにも耳を傾けて印象材もそういうリスクの少ないものを使う事が大切だと思います。



販売名	一般的名称	認証・届出番号	クラス分類
アクアジル ウルトラ	歯科用シリコーン印象材	認証番号:221AFBZX00079000	II (管理)
デュオミックス 2	歯科用印象材混ごう器	届出番号:13B1X10236Y03500	I (一般)

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

カスタマーサービス ☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<http://www.dentsply-sankin.com>