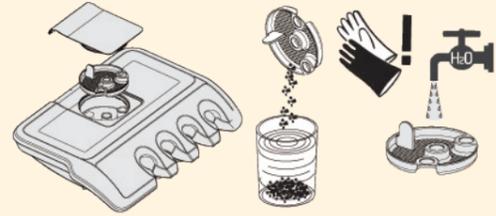


毎月(または必要時)行うメンテナンス



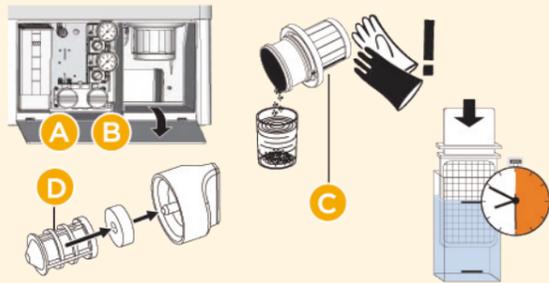
アシスタントユニットのバキュームフィルターの清掃

バキュームフィルターの清掃
 アマルガム残留物がある場合は水を入れた密封容器に回収し、環境に配慮し廃棄してください。
 残留物を廃棄後フィルターは水道の流水下で洗浄します。必ずグローブを装着して行います。



バキュームクリーナーの補充

●ユーザーインターフェースに「chem」が表示されたら、ウォーターユニット下部の扉内部にあるタンクにバキュームクリーナーを補充してください。



水/エア用フィルターの交換、沈殿タンクの清掃、水細菌検査の実施

水(A)、エア(B)フィルターの交換
 月に一回、水、エア用フィルターを点検し、汚れていたら新品と交換してください。

沈殿タンク(C)の清掃
 月に一回、沈殿タンク内の沈殿物を処分してください。また、沈殿タンクの着脱が硬くなったらOリングに専用グリスを塗布します。必ずグローブを着用して行います。

水細菌検査
 定期的または1週間以上使用しない場合に水細菌検査を実施してください。

サニテーション(水回路の洗浄)の実施

●月1回、トリートメントセンター水回路内のバイオフィームを低減するために洗浄(サニテーション)を行います。インスツルメントカップリングを対応するビルトインアダプタに差し込み行います。

ドクター側ビルトインアダプタ
 白:タービンカップリング
 緑:BLモーター 青:BLISO Eモーター(ISO用)
 赤:スケーラー 黄:スプレービッド(右水)
 橙:スプレービッド(左水)

アシスタント側ビルトインアダプタ
 バキュームホース 排唾管ホース
 橙:スプレービッド(左水)
 黄:スプレービッド(右水)

注:デントセプトSがパネルに付着した場合はすみやかに布などで拭き取ってください。

製造販売
デンツプライシロナ株式会社
 本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布借成ビル

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ■ 札幌支店 Tel:011-709-5800 | ■ 福岡支店 Tel:092-518-1800 |
| ■ 仙台支店 Tel:022-266-4020 | ■ 盛岡営業所 Tel:019-604-2340 |
| ■ 東京支店 Tel:03-5148-7895 | ■ 庄内営業所 Tel:0235-29-1217 |
| ■ 横浜支店 Tel:045-440-1521 | ■ 埼玉営業所 Tel:048-799-2931 |
| ■ 名古屋支店 Tel:052-251-8467 | ■ 静岡営業所 Tel:054-653-2711 |
| ■ 大阪支店 Tel:06-6243-6636 | ■ 宇都宮サービスステーション Tel:028-614-3710 |
| ■ 広島支店 Tel:082-546-2301 | |

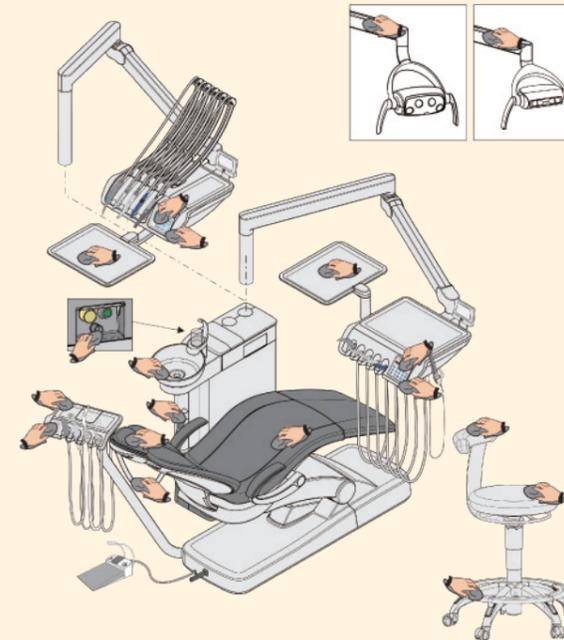
※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

BT 4504PD

INTEGO pro メンテナンスガイド


INTEGO pro

患者毎に行うメンテナンス






シート、パネル等の表面清掃/消毒




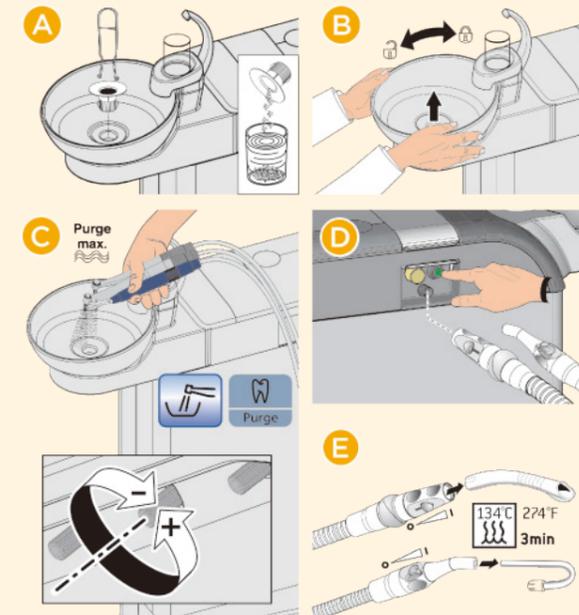
●デンツプライシロナが推奨する洗浄剤/消毒剤にて表面の拭清掃を行います。



水回路とバキューム装置の清掃/消毒

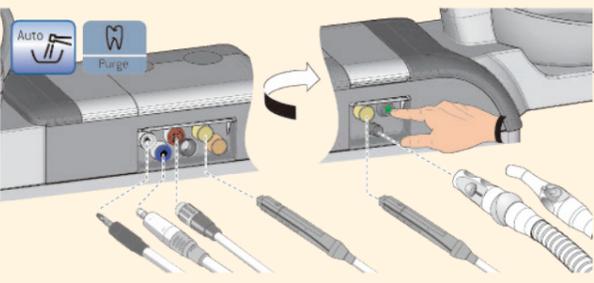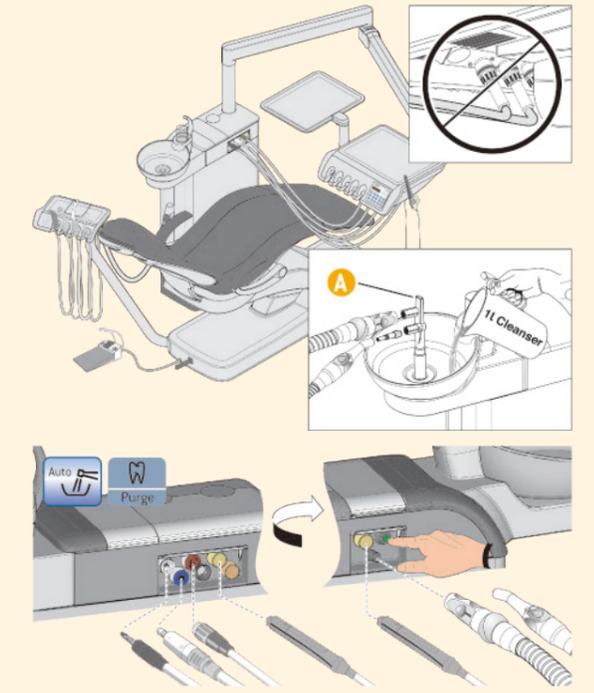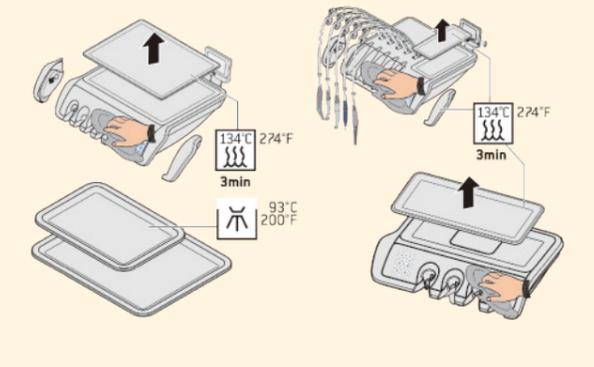- A カスビドボウルのトラップを清掃します。
- B カスビドボウルをデンツプライシロナ推奨の洗浄剤で清掃します。
- C 使用したインスツルメントのパージ(水の入替え)を水量を最大に行います。
- D バキュームホース、排唾管ホースをビルトインアダプタに差し込んで洗浄します。
注:ビルトインホース洗浄が無い場合は、コップ1杯の水を吸引させます。
- E バキュームハンドピースを滅菌します。
各チップを滅菌されたものと交換します。
注:デントセプトSがパネルに付着した場合はすみやかに布などで拭き取ってください。

<p>毎日行うメンテナンス</p> 	<p>始業時前の水回路内水の入替え(オートバージ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 診療開始前にインストゥルメントカップリングを対応するビルトインアダプタに差し込みオートバージを行います。 <p>ドクター側ビルトインアダプタ 白：タービンカップリング 緑：BLモーター 青：BLISO Eモーター (ISO用) 赤：スケーラー 黄：スプレービッド(右水) 橙：スプレービッド(左水)</p> <p>アシスタント側ビルトインアダプタ 黄：スプレービッド(右水) 橙：スプレービッド(左水) バキュームホース 排唾管ホース</p>
	<p>バキュームホースの洗浄</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 患者毎のバキューム洗浄時にバキュームクリーナー添加機能がない場合 ▲ バキュームホースを午前の診療終了後と1日の診療終了後に洗浄アダプタを使用して洗浄してください。 <p>終業時の水回路内水の入替え(オートバージ) 始業時と同様に診療終了後オートバージを行います。</p>
	<p>トレー用シリコンマット、ユニットハンドルカバーの滅菌、トレーの熱消毒、各ユニットの消毒</p> <p>シリコンマットの滅菌 ユニットトレー用シリコンマット、ユニットハンガーカバーはオートクレーブ滅菌が可能です。</p> <p>トレーの熱消毒 取り外し可能なトレーは93°Cで熱水消毒が可能です。</p> <p>各ユニットの消毒 ドクターユニット、アシスタントユニットはデンツプライシロナが推奨する消毒清掃剤で拭き消毒を行います。</p>
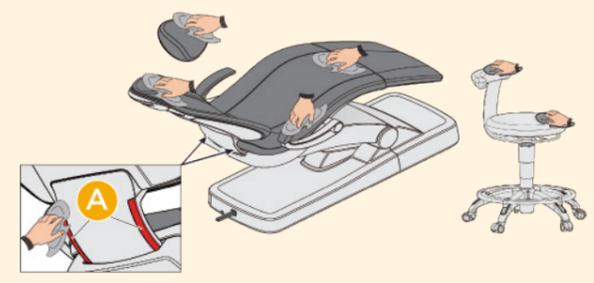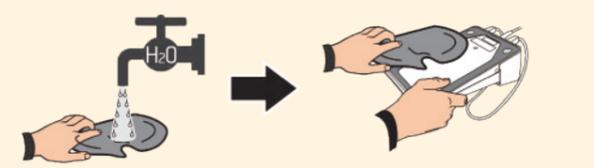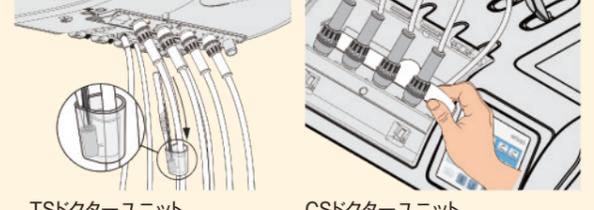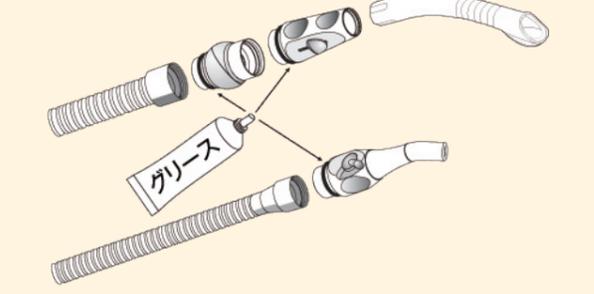
<p>毎週行うメンテナンス</p> 	<p>シートの洗浄とケア</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ デンツプライシロナが推奨する洗浄剤およびお手入れ剤でシートクッションを洗浄、ケアを行います。
	<p>排水回路の清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 週に一回デンツプライシロナが推奨する規定濃度のバキュームクリーナーを添加した洗浄水1リットルで排水回路の清掃をします。
	<p>フットコントローラーの床接地面の清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ フットコントローラーの床接地面部分を水で湿らせた布で清掃してください。
 <p>TSDドクターユニット CSドクターユニット</p>	<p>オイルキャッチャーコットンロールの交換</p> <p>TSDドクターユニット タービンホースのオイルキャッチャーコットンロールを交換します。</p> <p>CSドクターユニット カバーを外して、タービンホースのオイルコットンを交換します。</p>
	<p>バキュームハンドピースへのグリース塗布</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 熱消毒またはオートクレーブ滅菌後および週1回、バキュームハンドピースの各部およびOリングにデンツプライシロナ専用グリースを塗布します。 