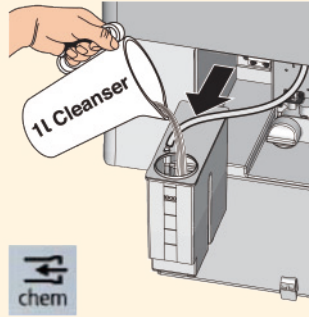
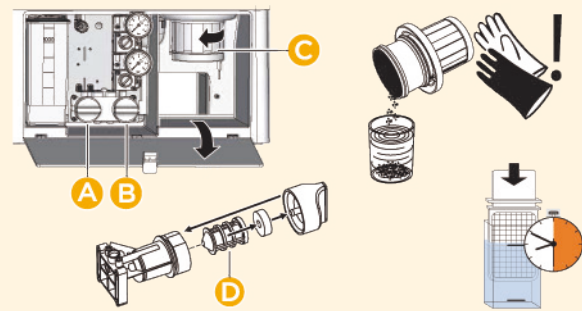


毎月(または必要時)行うメンテナンス



バキュームクリーナーの補充

- ユーザーインターフェースに「chem」が表示されたらウォーターユニット下部の扉内部にあるタンクにバキュームクリーナーを補充してください。



水/エアー用フィルターの交換、沈殿タンクの清掃、水細菌検査の実施

水 A、エアー B フィルターの交換

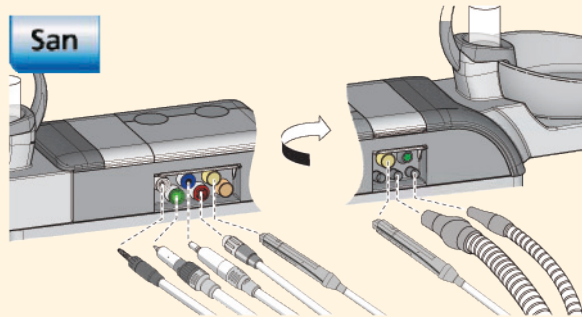
月に一回、水、エアー用フィルターを点検し、汚れていたら新品と交換してください。

沈殿タンク C の清掃

月に一回、沈殿タンク内の沈殿物を処分してください。また、沈殿タンクの着脱が硬くなったら Oリングに専用グリスを塗布します。必ずグローブを着用して行います。

水細菌検査

定期的または1週間以上使用しない場合に水細菌検査を実施してください。



サニテーション(水回路の洗浄)の実施

- 月1回、トリートメントセンター水回路内のバイオフィルムを低減するために洗浄(サニテーション)を行います。

ドクター側ビルトインアダプタ

白：タービンカップリング
緑：BLモーター 青：BLISO Cモーター
赤：スケーラー 黄：スプレービッド(右水)
橙：スプレービッド(左水)

アシスタント側ビルトインアダプタ

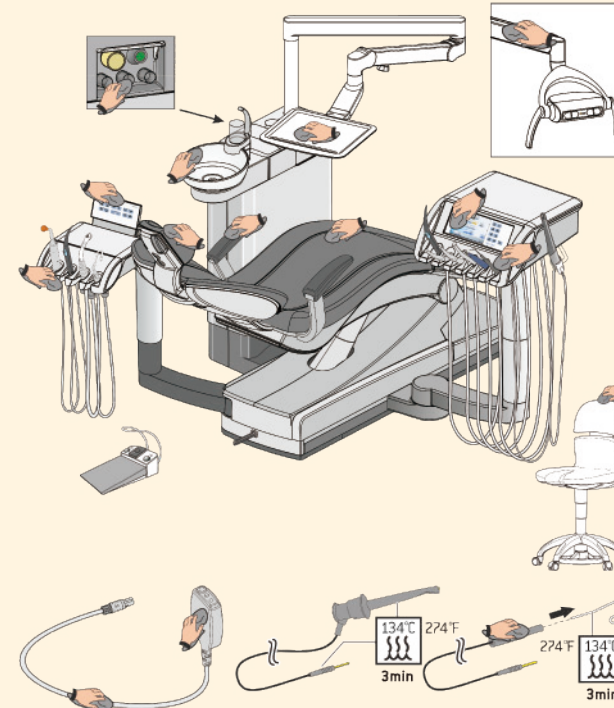
バキュームホース 排唾管ホース
橙：スプレービッド(左水)
黄：スプレービッド(右水)

注:デントセプトSがパネルに付着した場合はすみやかに布などで拭き取ってください。

TENEO メンテナンスガイド


TENEO

患者毎に行うメンテナンス



シート、パネル等の表面清掃/消毒

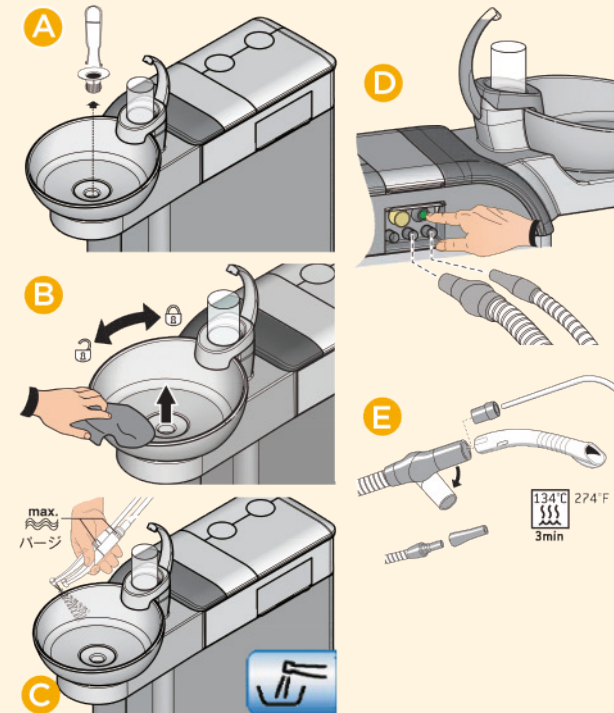- デンツプライシロナが推奨する洗浄剤/消毒剤にて表面の拭清掃を行います。
- 根管長測定機能に使用した各インスツルメントの滅菌/消毒を行います。



水回路とバキューム装置の清掃/消毒

- A カスビドボウルのトラップを清掃します。
- B カスビドボウルをデンツプライシロナ推奨の洗浄剤で清掃します。
- C 使用したインスツルメントのバージ(水の入替え)を水量を最大に行います。
- D バキュームホース、排唾管ホースをビルトインアダプタに差し込んで洗浄します。
注:ビルトインホース洗浄が無い場合は、コップ1杯の水を吸引させます。
- E バキュームハンドピースを滅菌します。
各チップを滅菌されたものと交換します。

製造販売

デンツプライシロナ株式会社





本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布借成ビル





※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

支店・営業所

■札幌支店	Tel: 011-709-5800	■福岡支店	Tel: 092-518-1800
■仙台支店	Tel: 022-266-4020	■盛岡営業所	Tel: 019-604-2340
■東京支店	Tel: 03-5148-7895	■庄内営業所	Tel: 0235-29-1217
■横浜支店	Tel: 045-440-1521	■埼玉営業所	Tel: 048-799-2931
■名古屋支店	Tel: 052-251-8467	■静岡営業所	Tel: 054-653-2711
■大阪支店	Tel: 06-6243-6636	■宇都宮サービスステーション	Tel: 028-614-3710
■広島支店	Tel: 082-546-2301		

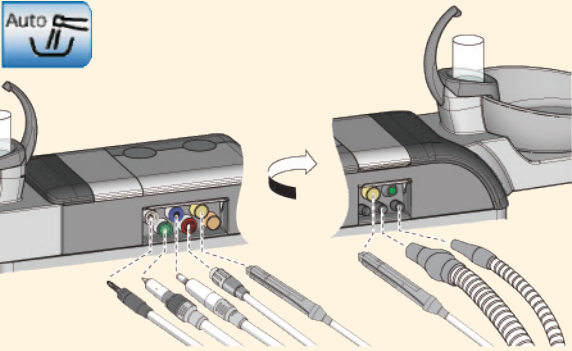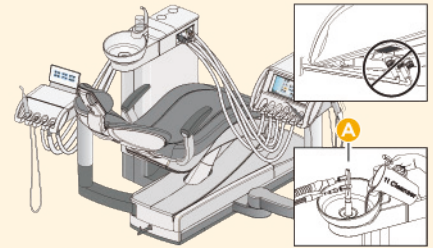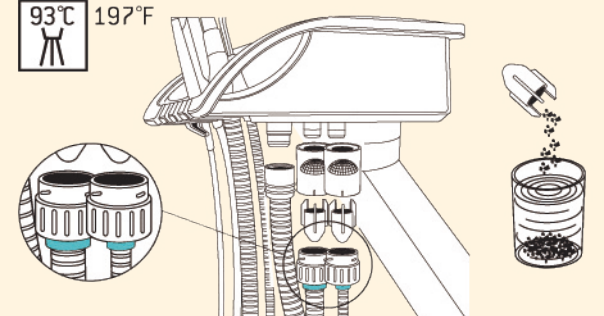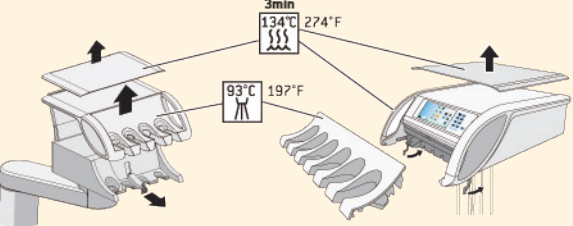BT 4704PD

毎日行うメンテナンス 	始業時前の水回路内水の入れ替え(オートバージ) ●診療開始前にインスツルメントカップリングを対応するビルトインアダプタに差し込みオートバージを行います。 ドクター側ビルトインアダプタ 白：タービンカップリング 緑：BLモーター 青：BLISO Cモーター 赤：スケーラー 黄：スプレービッド(右水) 橙：スプレービッド(左水) アシスタント側ビルトインアダプタ バキュームホース 黄：スプレービッド(右水) 排唾管ホース 橙：スプレービッド(左水)
 患者毎のバキューム洗浄時にバキュームクリーナー添加機能がない場合 ▲バキュームホースを午前の診療終了後と1日の診療終了後に洗浄アダプタを使用して洗浄してください。 終業時の水回路内水の入れ替え(オートバージ) 始業時と同様に診療終了後オートバージを行います。	バキュームホースの洗浄 患者毎のバキューム洗浄時にバキュームクリーナー添加機能がない場合 ▲バキュームホースを午前の診療終了後と1日の診療終了後に洗浄アダプタを使用して洗浄してください。 終業時の水回路内水の入れ替え(オートバージ) 始業時と同様に診療終了後オートバージを行います。
	バキュームホース内フィルターの清掃 ●バキュームホースのアシスタントユニットコネクタ内フィルターを清掃します。 アマルガム残留物がある場合は水を入れた密封容器に回収し、環境に配慮し廃棄してください。 注:熱消毒可能なバキュームホースには青緑色の印があります。
	トレイ用シリコンマットの滅菌、ユニットハンドルとインスツルメントホルダーの熱消毒 シリコンマットの滅菌 ユニットトレイ用シリコンマットはオートクレーブ滅菌が可能です。 ユニット/インスツルメントハンガーの熱消毒 取り外し可能なユニットハンドルとインスツルメントハンガーは93°Cで熱水消毒が可能です。

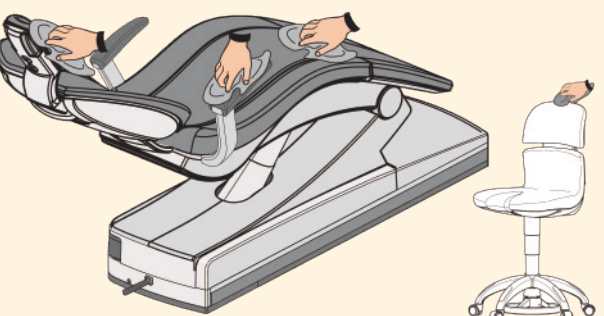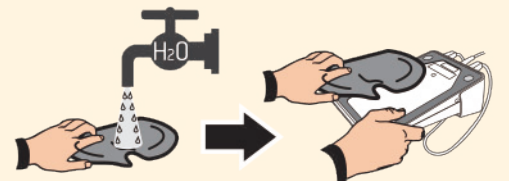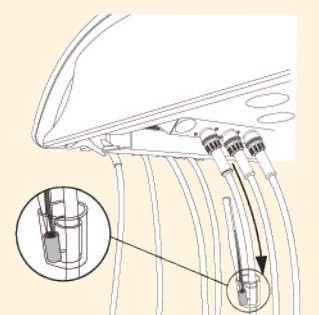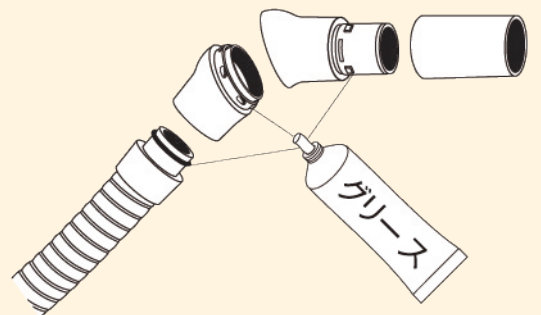毎週行うメンテナンス 	シートの洗浄とケア ●デンツプライシロナが推奨する洗浄剤およびお手入れ剤でシートクッションを洗浄、ケアを行います。
	フットコントローラーの床接地面の清掃 ●フットコントローラーの床接地面部分を水で湿らせた布で清掃してください。
	排水回路の清掃 ●週に一回デンツプライシロナが推奨する規定濃度のバキュームクリーナーを添加した洗浄水1リットルで排水回路の清掃を行います。
	オイルキャッチャーコットンロールの交換 ●タービンホースのオイルキャッチャーコットンロールを交換します。
	バキュームハンドピースへのグリース塗布 ●熱消毒またはオートクレーブ滅菌後および週1回、バキュームハンドピースの各部およびOリングにデンツプライシロナ専用グリースを塗布します。 