

Primescan Autoclavable Sleeve 사용 가이드

사용전



오토클레이브 장비 제조사의 지침에 따라 오토클레이브 슬리브의 멸균과정을 수행합니다.

사용시 주의 사항

아래 내용을 숙지한 후 구매 및 사용해 주십시오.

- ※ 일회용 렌즈는 굽힘 방지 기능이 없으므로 렌즈가 치아 표면에 닿지 않도록 스캔해 주십시오. Primescan은 Dynamic Depth Scan의 기능으로 0 ~ 20mm의 깊이를 스캔 할 수 있습니다.
- ※ 오토클레이브 슬리브 사용시 환자의 구강을 건조한 상태로 유지시켜 주십시오. 일회용 렌즈는 슬라이드형 탈착 방식으로 슬리브와 일회용 렌즈 사이에 틈이 생길 수 있습니다. 일회용 렌즈 안쪽으로 타액이 침투하지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- ※ 임플란트, 교정환자, 무치악 환자 등 구강 건조 상태를 유지하기 힘든 경우, 일회용 슬리브 또는 기본형 사파이어 글래스 슬리브를 권장합니다.
- ※ 진료 중 일회용 렌즈를 교체할 경우 새로 장착된 일회용 렌즈가 예열될 때까지 시간을 가진 후 사용하십시오.

환자에게 사용 시



일회용 렌즈의 포장지를 제거합니다. (환자 1명 당 렌즈 1개 사용)



슬리브의 노치(홈)에 일회용 렌즈가 정확히 장착되도록 밀어넣습니다.



스캐너 헤드 부분에서 슬리브 보호캡을 제거 합니다.



슬리브가 스캐너에 정확히 고정되도록 장착시킵니다.



스캐너를 스캐너 홀더에 내려놓고 예열이 완료되면 사용합니다.

주의: 스캐너를 내려놓기 전, 소독제로 스캐너 홀더를 닦아 소독하십시오.



일회용 렌즈 1박스(50개입) 사용 주기로 스캐너 보정을 진행해야 합니다. 보정 후, 일회용 렌즈는 폐기하고 슬리브는 소독제로 닦습니다. 구강 스캔 전, 새로운 일회용 렌즈를 장착합니다.

사용후 멸균 처리



소독용 천(Wipe)으로 스캐너 바디와 슬리브를 닦아냅니다.



슬리브를 스캐너에서 탈거한 후, 일회용 렌즈를 슬리브에서 제거합니다. 사용한 렌즈는 규정에 따라 폐기합니다.



소독용 천으로 스캐너 홀더를 닦아냅니다. 스캐너 헤드 보호캡을 스캐너에 장착하고, 스캐너 홀더에 내려놓습니다.



멸균 처리 과정을 진행합니다.



프라임스캔 오토클레이브 슬리브 사용 방법은 공식 홈페이지에서 영상으로 확인할 수 있습니다. 슬리브 및 렌즈 런칭 기념 프로모션을 2021년 12월 31일까지 진행합니다.