

# Connect Software 5.2.6

## Updatebeschreibung (DE)


Dentsply Sirona freut sich, das neue Connect SW 5.2.6 Update bekannt zu geben.

### Änderungen zur vorherigen Version 5.2.4

- Unterstützung einer neuen Primescan Firmware
- Unterstützung der Konnektivität zur Praxisverwaltungssoftware (in Kürze verfügbar)  
Diese neue Funktion der Dentsply Sirona cloud Plattform DS Core ermöglicht es, einen 3D-Scan aus einer Praxisverwaltungssoftware zu starten. Über die neue DS Core Applikation *PMS Connector for CEREC/Connect* werden Patientendaten automatisch an Primescan/Omicam AC und Primescan Connect übermittelt.  
Weitere Informationen zum PMS Connector für CEREC/Connect stehen in Kürze im Bereich „Equipment/Geräte“ in DS Core zur Verfügung.
- Hinweis auf die Funktion *Ordering via DS Core*  
Beim Öffnen des Connect Case Centers erscheint ein Pop-up Fenster mit einem Informationslink zum Bestellservice in DS Core.
- Allgemeine Stabilitätsverbesserungen und Bugfixes

### Installationshinweis:

Automatisches Update: Die Update-Benachrichtigung für Connect SW 5.2.6 wird automatisch angezeigt. Starten Sie den Update-Vorgang direkt durch Drücken von "Download" oder starten Sie den Vorgang später. Wenn Sie den Aktualisierungsvorgang später starten möchten, müssen Sie zur Windows-Taskleiste wechseln.

- Öffnen Sie das Dentsply Sirona AutoUpdate Center, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken: 
- Das Connect SW 5.2.6 Service Pack ist in der Aktualisierungsliste des Dentsply Sirona AutoUpdate Centers aufgeführt. Nach Abschluss des Downloads kann die Installation von Connect SW 5.2.6 gestartet werden.  
Führen Sie eine Sicherung aller Patientendaten durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Führen Sie eine Installation nicht auf mehr als einer Erfassungseinheit oder einem Computer gleichzeitig durch, wenn sich diese im selben Netzwerk befinden.
- Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie bitte das Patientendatenbankverzeichnis in der Software.
- (Konfiguration / Einstellungen / Patientendatenbank). Der Pfad sollte immer auf ein Verzeichnis verweisen, niemals auf das Stammverzeichnis eines Laufwerks, d.h. niemals zu bspw. "D: \", sondern zu "D: \ Data"
- Die Verwendung des richtigen Grafikkartentreibers ist erforderlich, um eine optimale Funktionalität Ihrer Connect-Software 5.2.6 sicherzustellen. Beim Start Ihrer Software wird automatisch überprüft, ob Ihr Treiber korrekt ist. Sollten Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

### Hardware support note:

Die Connect SW 5.2.6 unterstützt Omnicam-Scanner (mit geführtem Scannen) und Primescan-Scanner (kein geführter Scan erforderlich), erfordert jedoch die Ausführung der neueren AC-Modelle mit Touchscreen und Windows 10. Für Omnicam-Geräte vor 2019 (ohne Touchscreen) ist ein Windows 10-Update erforderlich, um diese Software verwenden zu können. Weitere Informationen zum Upgrade dieser Geräte erhalten Sie von Ihrem Händler.

Alle Connect Software-Downloads finden Sie hier:

<https://www.dentsplysirona.com/en/explore/cerec/downloads.html>

<https://www.dentsplysirona.com/en/explore/digital-impression/downloads.html>

<https://www.dentsplysirona.com/en/discover/discover-by-brand/connect-software.html>

<https://www.dentsplysirona.com/en/explore/3d-printing/primeprint/software-downloads.html>

<https://my.cerec.com/en/products/connect-sw-5-2.html>