

CEREC Premium SW 4.5.0 Materialpack- Beschreibung

Für dieses Materialpack wird eine Softwarelizenz CEREC Premium 4.5.0 benötigt, die über den Lizenzmanager aktiviert werden muss. Sie erhalten das Materialpack " CEREC_Premium_4.5.0_MP_Setup.exe" entweder über ein Auto-Update, oder Sie können die Datei manuell auf <https://my.cerec.com/de-de/produkte/cerec-premium-software.html> herunterladen.

Neues Material

- Hersteller *Ivoclar Vivadent*, Material *Tetric CAD*, Blöcke I 12 und C 14; weltweit freigeschaltet
- Hersteller *GC*, Material *CERASMART300*, Blöcke 12, 14 und 16; nur in Japan freigeschaltet
- Hersteller *Kuraray Noritake Dental*, Material *KATANA Zirconia Block (ST)*; weltweit freigeschaltet
- Hersteller *Kuraray Noritake Dental*, Material *KATANA Zirconia Block (STML)*; weltweit freigeschaltet

Herstelleränderung


- Material *CELTRA DUO* wird unter Hersteller *DENTSPLY SIRONA* geführt (bislang Hersteller *DENTSPLY*)

Namensänderung

- Namentliche Differenzierung der bereits integrierten Blockgrößen *Telio CAD A16 (S)* und *A 16 (L)* (Hersteller *Ivoclar Vivadent*) durch Umbenennung der Blockvarianten in entsprechenden Prozessen in *Telio CAD Abutment*

Installation

- Besuchen Sie die Seite <https://my.cerec.com/de-de.html> und laden Sie dort die Datei „CEREC_Premium_4.5.0_MP_Setup.exe“ herunter
- Doppelklicken Sie die heruntergeladene Datei und wählen Sie anschließend „Ausführen“ aus.
- Akzeptieren Sie im Anschluss das „License Agreement“ und wählen Sie „Install“ aus.

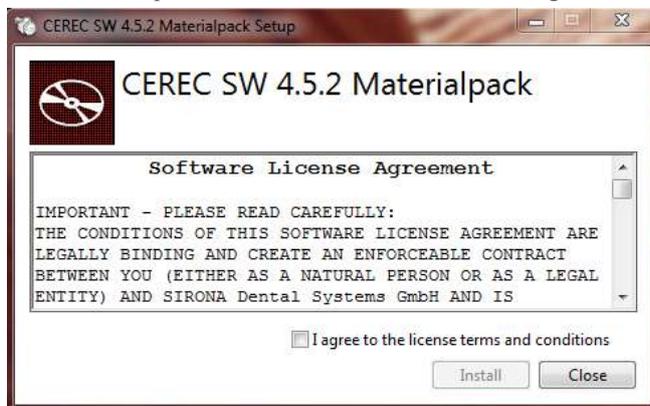

- Das Materialpack wird automatisch installiert und beim nächsten Start Ihrer Premium Software sollten sich die Materialien in der Liste befinden
- Überprüfen können Sie die Korrektheit der Block Datenbank durch Klicken auf das Controlpanel der CEREC Software. Die richtige Version der „Block DB“ lautet 450.32.368

•

