

CEREC SW 4.5.2 Materialpack-Beschreibung

Für dieses Materialpack wird eine Softwarelizenz CEREC 4.5.2 benötigt, die über den Lizenzmanager aktiviert werden muss. Sie erhalten das Materialpack "CEREC_4.5.2_MP_Setup.exe" entweder über ein Auto-Update, oder Sie können die Datei manuell auf <https://my.cerec.com/de-de/produkte/cerec-sw.html> herunterladen.

Neues Material

- Hersteller Ivoclar Vivadent, Material *Tetric CAD*, Blöcke I 12 und C 14; weltweit freigeschaltet
- Hersteller GC, Material *CERASMART300*, Blöcke 12, 14 und 16; nur in Japan freigeschaltet

Zusätzliche Freischaltung in den USA

- Hersteller *Kuraray Noritake Dental*, Material *KATANA Zirconia Block (ST)*
- Hersteller *Kuraray Noritake Dental*, Material *KATANA Zirconia Block (STML)*

Namensänderung

- Namentliche Differenzierung der bereits integrierten Blockgrößen *Telio CAD A16 (S)* und *A 16 (L)* (Hersteller *Ivoclar Vivadent*) durch Umbenennung der Blockvarianten in entsprechenden Prozessen in *Telio CAD Abutment*

Installation

- Besuchen Sie die Seite <https://my.cerec.com/de-de.html> und laden Sie dort die Datei „CEREC_4.5.2_MP_Setup.exe“ herunter und speichern Sie diese auf Ihrem Computer
- Öffnen Sie durch Doppelklick die heruntergeladene Datei und wählen Sie anschließend „Ausführen“ aus.
- Akzeptieren Sie im Anschluss das „License Agreement“ und wählen Sie „Install“ aus.



- Das Materialpack wird automatisch installiert und beim nächsten Start Ihrer CEREC Software befinden sich die Materialien in der Liste.

- Überprüfen können Sie die Korrektheit der Block Datenbank durch Klicken auf das Controlpanel der CEREC Software. Die richtige Version der „Block DB“ lautet 452.1.368

